



Instrução de USO RDC185/01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Suctor de Saliva

Nome Comercial: B-Care conjunto para higiene oral - 24horas

Modelos: BC24KITL0

Nº do Cadastro na ANVISA: **81832580071**

Fabricante recomenda o uso único


Prazo de Validade: 2 anos

Embalagem: Unitária.

Pronto uso

Não estéril

Fotos

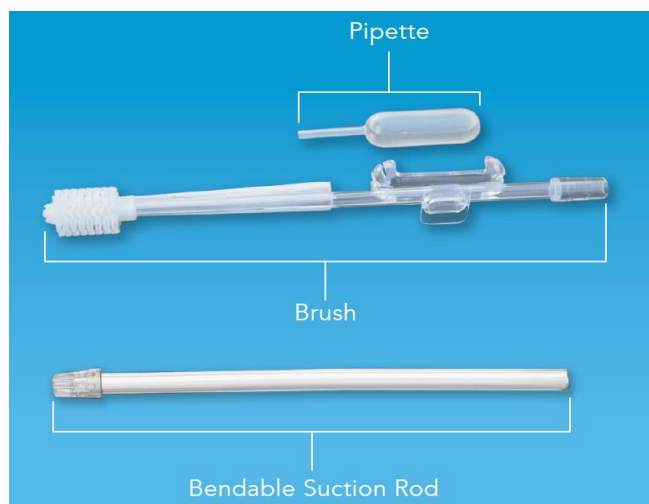



Instrução de USO RDC185/01



Swab

Indicação de Uso/Finalidade

O B-Care conjunto para higiene oral é uma abordagem inovadora para higiene bucal de pacientes intubados em unidades de cuidados intensivos. Com uma escova de dentes cilíndrica atraumática com amplas cerdas e com capacidade de sucção que possibilita a aplicação de soluções antissépticas bucais ou solução hidratante (não objeto desse registro), o B-care simplifica o trabalho da equipe de cuidados e garante uma limpeza e hidratação completas da cavidade oral auxiliando na remoção de placas de biofilme, que podem causar gengivites e sangramento, evitando infecções e proporcionando aos pacientes dentes e gengivas saudáveis garantindo sua saúde bucal.

Componentes e Composição

Escova: Elastômero termoplástico

Haste de sucção: Elastômetro termoplástico

Pipeta: Polietileno

Swab: Policloreto de vinila (PVC) + esponja

Condições de Armazenamento

O B-Care deve ser armazenado em temperatura ambiente, em um ambiente limpo e seco.



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IUCHO-B
rev.01

Instrução de USO RDC185/01

Condições para o Transporte

O B-Care deve ser transportado em temperatura ambiente, em um ambiente limpo e seco.

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

- Este produto deve ser utilizado apenas para o uso pretendido. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Manuseie e armazene adequadamente
- Não desmonte o produto.
- NÃO use se a embalagem estiver danificada.
- O dispositivo deve ser usado apenas para a finalidade pretendida.
- Não estéril. NÃO tente esterilizar ou autoclavar este produto.
- Não use o produto se alguma peça mostrar sinais de dano. Isso pode causar ferimentos.
- O fabricante recomenda o uso único.

Precauções

Não aplicável

Contraindicações

O produto não deve ser utilizado em crianças.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001. CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IUCHO-B
rev.01

Instrução de USO RDC185/01

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Biovo Technologies Ltd. - 23 HaMelacha St.,
P.O.B 11419, Rosh-HaAyin 4809173, Israel