

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: set/20
	Instrução de Uso	IUACAB-H Rev. 00

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Cirurgica

Nome Comercial: Avental Cirúrgico Halyard AeroBlue*

Modelos e Especificações

41724 - Avental Cirúrgico Halyard AeroBlue*, G, Extra-Longo

41726 - Avental Cirúrgico Halyard AeroBlue*, GG, Extra-Longo

41732 - Avental Cirúrgico Halyard AeroBlue*, P

41733 - Avental Cirúrgico Halyard AeroBlue*, G

41734 - Avental Cirúrgico Halyard AeroBlue*, GG

41736 - Avental Cirúrgico Halyard AeroBlue*, GGG

Registro Anvisa: 81832580073

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 03 anos

Embalagem unitária.

Produto estéril - Óxido de Etileno.

Fotos:



	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: set/20
	Instrução de Uso	IUACAB-H Rev. 00

Especificações

Código	Nome Comercial	Comprimento cm (posterior, medido da gola à barra)	Gramatura g/m ² (parte frontal)	Quantidade de Toalhas por Pacote	Quantidade de aventais por Caixa
41724	Avental Cirúrgico Aero Blue*, G, Extra-Longo	145,4 cm	56 gsm	1	30
41726	Avental Cirúrgico Aero Blue*, GG, Extra-Longo	150,5 cm	56 gsm	1	30
41732	Avental Cirúrgico Aero Blue*, P	117,50 cm	56 gsm	1	34
41733	Avental Cirúrgico Aero Blue*, G	125,1 cm	56 gsm	1	32
41734	Avental Cirúrgico Aero Blue*, GG	130,81 cm	56 gsm	1	30
41736	Avental Cirúrgico Aero Blue*, GGG	151,46 cm	56 gsm	1	26

Descrição e Indicação

Os Aventais Cirúrgicos Halyard AeroBlue* destinam-se a proteger tanto o paciente quanto a equipe cirúrgica durante os procedimentos cirúrgicos. Os aventais cirúrgicos são dispositivos que devem ser usados pelo pessoal da sala de cirurgia durante procedimentos cirúrgicos para proteger o paciente cirúrgico quanto o pessoal da sala de cirurgia contra a transferência de microorganismos, fluidos corporais e material particulado.

Os Aventais Cirúrgicos AeroBlue* foram projetados para fornecer proteção de barreira para procedimentos cirúrgicos de fluido médio a alto (AAMI Nível 3 na zona crítica **).

Esses aventais também proporcionam conforto, permitindo que o usuário fique calmo e fornecendo uma gama completa de movimentos para o usuário.

Instruções de Uso

1. Remover o Avental da embalagem, respeitando técnica asséptica;
2. Secar as mãos com a toalha que acompanha o avental;
3. Os aventais deverão ser desdobrados respeitando técnica asséptica, antes de serem vestidos;

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: set/20
	Instrução de Uso	IUACAB-H Rev. 00

4. Descartar o produto após sua utilização.

Composição

SMS na parte posterior

SMS/F/SMS: laminado de SMS/Filme Plástico/SMS na parte frontal e mangas

Toalha: Polpa Celulose e Polipropileno

Não contém látex de borracha natural.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Advertências

Não aplicável

Precauções

Não aplicável

Contraindicações

Não aplicável

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: set/20
	Instrução de Uso	IUACAB-H Rev. 00

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virginia - Estados Unidos da América 23116