


| | | |
|--|---|-----------------|
|  | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | Emissão: jun/20 |
| | Instrução de Uso | |

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Cirúrgica

Nome Comercial: Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável

Modelos e Especificações

| Código | Nome Comercial | Comprimento cm (posterior, medido da gola à barra) | Gramatura g/m ² (parte frontal) | Quantidade de Toalha por Pacote | Quantidade por Caixa |
|--------|---|---|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 44672 | Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, P | 117,5 | 63 | 1 | 34 |
| 44673 | Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, G | 125,1 | 63 | 1 | 32 |
| 44674 | Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, GG | 130,8 | 63 | 1 | 30 |
| 44675 | Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, GGG | 137,5 | 63 | 1 | 28 |
| 44676 | Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, GGGG | 151,4 | 63 | 1 | 26 |
| 44677 | Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, G, Extra-Longo | 145,4 | 63 | 1 | 30 |
| 44678 | Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, GG, Extra-Longo | 151,1 | 63 | 1 | 30 |
| 44679 | Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, GGG, Extra-Longo | 157,8 | 63 | 1 | 30 |


Registro Anvisa: 81832580002

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

| | | |
|--|---|---------------------|
|  | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | Emissão: jun/20 |
| | Instrução de Uso | IUACAC-H rev. 01 |

Fotos:



Conteúdo

Cada código é composto por um avental e toalha.

Cada unidade é comercializada individualmente em embalagem de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek* e Filme Plástico. Todas as embalagens são colocadas em um saco plástico e este é acondicionado em caixa de papelão para transporte.

Descrição e Indicação

Os aventais cirúrgicos destinam-se a proteger tanto o paciente quanto a equipe cirúrgica durante os procedimentos cirúrgicos. Os aventais cirúrgicos são dispositivos que devem ser usados pelo pessoal da sala de cirurgia durante procedimentos cirúrgicos para proteger tanto o paciente cirúrgico quanto o pessoal da sala de cirurgia contra a transferência de microrganismos, fluidos corporais e material particulado.

Os Aventais Cirúrgicos de Desempenho Respirável Aero Chrome* fornecem proteção de barreira líquida AAMI nível 4 nas zonas críticas do avental. A parte de trás do Aero Chrome* respirável desempenho cirúrgico vestido na zona não crítica tem um tecido SMS que é respirável ao ar e fornece proteção de barreira de líquido AAMI nível 1.

Instruções de Uso

1. Remover o Avental da embalagem, respeitando técnica asséptica;
2. Secar as mãos com a toalha que acompanha o avental;

| | | |
|--|---|---------------------|
|  | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | Emissão: jun/20 |
| | Instrução de Uso | IUACAC-H rev. 01 |

3. Os aventais deverão ser desdobrados respeitando técnica asséptica, antes de serem vestidos;

4. Descartar o produto após sua utilização.

Composição

Parte Posterior do Avental: SMS Polipropileno

Parte Frontal e Mangas: Laminado de Spunbond, Filme e SMS

Toalha: Polpa Celulose e Polipropileno

Não contém látex de borracha natural.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Descarte: O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Advertências

Não aplicável.

Precauções

Não aplicável.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

| | | |
|--|---|---------------------|
|  | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | Emissão: jun/20 |
| | Instrução de Uso | IUACAC-H rev. 01 |

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América