

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jan/21
	Instrução de Uso	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Cirúrgica

Nome Comercial: Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável

Modelos e Especificações

Código	Nome Comercial	Comprimento cm (posterior, medido da gola à barra)	Gramatura g/m ² (parte frontal)	Quantidade de Toalha por Pacote	Quantidade por Caixa
44672	Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, P	117,5	63	1	34
44673	Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, G	125,1	63	1	32
44674	Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, GG	130,8	63	1	30
44675	Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, GGG	137,5	63	1	28
44676	Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, GGGG	151,4	63	1	26
44677	Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, G, Extra-Longo	145,4	63	1	30
44678	Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, GG, Extra-Longo	151,1	63	1	30
44679	Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável, GGG, Extra-Longo	157,8	63	1	30

Registro Anvisa: 81832580002

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jan/21
	Instrução de Uso	

Fotos:



Conteúdo

Cada código é composto por um avental e toalha.

Cada unidade é comercializada individualmente em embalagem de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek* e Filme Plástico. Todas as embalagens são colocadas em um saco plástico e este é acondicionado em caixa de papelão para transporte.

Descrição e Indicação

Os aventais cirúrgicos destinam-se a proteger tanto o paciente quanto a equipe cirúrgica durante os procedimentos cirúrgicos. Os aventais cirúrgicos são dispositivos que devem ser usados pelo pessoal da sala de cirurgia durante procedimentos cirúrgicos para proteger tanto o paciente cirúrgico quanto o pessoal da sala de cirurgia contra a transferência de microrganismos, fluidos corporais e material particulado.

Os Aventais Cirúrgicos de Desempenho Respirável Aero Chrome* fornecem proteção de barreira líquida AAMI nível 4 nas zonas críticas do avental. A parte de trás do Aero Chrome* respirável desempenho cirúrgico vestido na zona não crítica tem um tecido SMS que é respirável ao ar e fornece proteção de barreira de líquido AAMI nível 1.

Instruções de Uso

1. Remover o Avental da embalagem, respeitando técnica asséptica;
2. Secar as mãos com a toalha que acompanha o avental;

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jan/21
	Instrução de Uso	IUACAC-H rev. 02

3. Os aventais deverão ser desdobrados respeitando técnica asséptica, antes de serem vestidos;

4. Descartar o produto após sua utilização.

Composição

Parte Posterior do Avental: SMS Polipropileno

Parte Frontal e Mangas: Laminado de Spunbond, Filme e SMS

Toalha: Polpa Celulose e Polipropileno

Não contém látex de borracha natural.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Descarte: O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Advertências

Não aplicável.

Precauções

Não aplicável.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jan/21
	Instrução de Uso	IUACAC-H rev. 02

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd, Mechanicsville, Virginia - Estados Unidos da America 23116