

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jan/21
	<b>Instrução de Uso</b>	


## Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Cirúrgica

Nome Comercial: Avental Cirúrgico Halyard

## Modelos e Especificações

Código	Descrição	Comprimento (posterior, medido da gola à barra)	Gramatura g/m <sup>2</sup>	Quantidade de Toalha por Pacote	Quantidade por Caixa
46665	Avental Cirúrgico ValueSelect*, M	108 cm	35	2	26
46666	Avental Cirúrgico ValueSelect*, G	117 cm	35	2	24
47285	Avental Cirúrgico ValueSelect*, G, Extra-Longo	150 cm	35	2	20
46667	Avental Cirúrgico ValueSelect*, GG	126 cm	35	2	22
47286	Avental Cirúrgico ValueSelect*, GG, Extra-Longo	150 cm	35	2	20
46668	Avental Cirúrgico ValueSelect*, GGG	135 cm	35	2	22
99284	Avental Cirúrgico BASICS*, G	125 cm	41	1	20
99285	Avental Cirúrgico BASICS*, GG	131 cm	41	1	20
90012	Avental Cirúrgico, Manga Ragland, G	125 cm	98	1	36
90042	Avental Cirúrgico, Manga Ragland, GG	131 cm	98	1	34
90018	Avental Cirúrgico, Manga Reta, G	121 cm	98	1	36
90048	Avental Cirúrgico, Manga Reta, GG	132 cm	98	1	32
46864	Avental Cirúrgico SPECTRUM*, M	113 cm	48	1	32
46865	Avental Cirúrgico SPECTRUM*, G	123 cm	48	1	28
46866	Avental Cirúrgico SPECTRUM*, GG	128 cm	48	1	28
46868	Avental Cirúrgico SPECTRUM*, GGG	135 cm	48	1	24
46869	Avental Cirúrgico SPECTRUM*, GGGG	145 cm	48	1	24
95101	Avental Cirúrgico Ultra, P	117 cm	58	1	34
95111	Avental Cirúrgico Ultra, G	125 cm	58	1	32
95121	Avental Cirúrgico Ultra, GG	131 cm	58	1	30
95131	Avental Cirúrgico Ultra, GGG	137 cm	58	1	28

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jan/21
	<b>Instrução de Uso</b>	IUACH-H rev. 02

Registro Anvisa: 81832580003

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

## Fotos



## Conteúdo

Cada código é composto por um avental e toalha.

Cada unidade é comercializada individualmente em embalagem de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\* e Filme Plástico. Todas as embalagens são colocadas em um saco plástico e este é acondicionado em caixa de papelão para transporte.

## Descrição e Indicação

Os aventais cirúrgicos destinam-se a proteger tanto o paciente quanto a equipe cirúrgica durante os procedimentos cirúrgicos. Os aventais cirúrgicos são dispositivos que devem ser usados pelo pessoal da sala de cirurgia durante procedimentos cirúrgicos para proteger tanto o paciente cirúrgico quanto o pessoal da sala de cirurgia contra a transferência de microrganismos, fluidos corporais e material particulado. Todos os aventais listados neste documento atendem aos requisitos de desempenho da EN 13795.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jan/21
	<b>Instrução de Uso</b>	IUACH-H rev. 02

Os aventais Cirúrgicos Padrão ValueSelect \*, o Avental Cirúrgico Não Reforçado SPECTRUM \* e os Aventais Cirúrgicos Ultra satisfazem os requisitos de barreira a líquidos conforme ANSI / AAMI PB70: 2012.

O Avental Cirúrgico Não Reforçado SPECTRUM \* e o Avental Cirúrgico Ultra satisfazem os requisitos de barreira líquida AAMI Nível 3 de acordo com ANSI / AAMI PB70: 2012.

Os aventais cirúrgicos padrão ValueSelect \* atendem aos requisitos de barreira a líquidos AAMI Nível 2.

### **Instruções de Uso**

1. Remover o Avental da embalagem, respeitando técnica asséptica;
2. Secar as mãos com a toalha que acompanha o avental;
3. Os aventais deverão ser desdobrados respeitando técnica asséptica, antes de serem vestidos;
4. Descartar o produto após sua utilização.

### **Composição**

Avental Padrão de tecido SMS: Polipropileno

Toalha: Polpa de Celulose e Polipropileno

Não contém látex de borracha natural.

### **Condições de Armazenamento**

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições de Manipulação**

Descarte: O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jan/21
	<b>Instrução de Uso</b>	IUACH-H rev. 02

**Advertências**

Não aplicável.

**Precauções**

Não aplicável.

**Contraindicações:**

Não aplicável.

**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

**Fabricante Responsável:** O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd, Mechanicsville, Virginia - Estados Unidos da America 23116