

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	<b>Instrução de Uso</b>	

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Hospitalar

Nome Comercial: IUACL-H Avental Laminado para Procedimento COMFORT Rev.00

### Modelo e Especificações Técnicas:

Código	Descrição	Comprimento cm	Comprimento Peito - cm	Comprimento da Manga em cm
46946	Avental Laminado para Procedimento COMFORT Grande	116,8 cm	70,1 cm	50,8 cm
46947	Avental Laminado para Procedimento COMFORT Extra-Grande	122,2 cm	72,4 cm	53,3 cm

- Desenho com abertura traseira
- Disponível com ganchos
- Para exposição pesada a contato com fluidos ou produtos químicos

Registro Anvisa: 81832580068

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: Indeterminado

Produto de Pronto Uso.

### Fotos



	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUACL-H rev. 01

### **Conteúdo**

São acondicionados 10 aventais em embalagem de polietileno e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte, contendo 100 unidades.

### **Descrição e Indicação**

O Avental Laminado COMFORT é indicado para a ser usado por profissionais de saúde em vários ambientes de saúde, para proteger o paciente e o pessoal de saúde da transferência de microrganismos, fluidos corporais e material particulado.

O a película laminada deste avental foi testada e atende à norma ASTM F1670 (método de teste padrão para resistência de materiais usados em roupas de proteção à penetração por sangue sintético) e ASTM 1671 (método de teste padrão para resistência de materiais usados em roupas de proteção à penetração por sangue patógenos transmitidos usando a penetração de bactérias Phi-X174 como sistema de teste).

### **Instruções de Uso**

1. Retirar o avental da embalagem e desdobrá-lo ante de vestir
2. Vestir o avental respeitando técnicas e protocolos da instituição;
3. Após a utilização descartar o avental em local apropriado.

### **Composição**

Polipropileno Spunbond

Filme de Polietileno

Não contém látex de borracha natural.

### **Condições de Armazenamento**

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Mantenha o máximo possível em sua caixa.

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUACL-H rev. 01

### **Condições de Manipulação**

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

### **Advertências**

— Proibido Reprocessar

### **Precauções**

O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

### **Contraindicações:**

Não aplicável.

**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

**Fabricante Responsável:** O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116