

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUACVS-H rev. 01

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Cirurgica

Nome Comercial: Avental Cirúrgico ValueSelect\* Filme-Reforçado Halyard

### Modelos e Especificações

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Comprimento (posterior, medido da gola à barra)</u>	<u>Quantidade de Toalha por Embalagem</u>	<u>Quantidade por Caixa</u>
46673	Avental Cirúrgico ValueSelect* Filme-Reforçado Halyard M	108 cm	2	22
46674	Avental Cirúrgico ValueSelect* Filme-Reforçado Halyard G	117 cm	2	22
47287	Avental Cirúrgico ValueSelect* Filme-Reforçado Halyard G, Extra-Longo	150 cm	2	20
46675	Avental Cirúrgico ValueSelect* Filme-Reforçado Halyard GG	126 cm	2	22
47288	Avental Cirúrgico ValueSelect* Filme-Reforçado Halyard GG, Extra-Longo	150 cm	2	20
46676	Avental Cirúrgico ValueSelect* Filme-Reforçado Halyard GGG	135 cm	2	22

Registro Anvisa: 81832580008

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

### Foto



	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUACVS-H rev. 01

## Conteúdo

Cada código é composto por um avental e toalha. É acondicionado e comercializado individualmente em embalagem de Polietileno. Todas as embalagens são colocadas em um saco plástico e este é acondicionado em caixa de papelão para transporte.

## Descrição e Indicação

Os aventais cirúrgicos destinam-se a proteger tanto o paciente quanto a equipe cirúrgica durante os procedimentos cirúrgicos. Os aventais cirúrgicos são dispositivos que devem ser usados pelo pessoal da sala de cirurgia durante procedimentos cirúrgicos para proteger tanto o paciente cirúrgico quanto o pessoal da sala de cirurgia contra a transferência de microrganismos, fluidos corporais e material particulado.

O Avental Cirúrgico ValueSelect\* Filme-Reforçado tem um reforço de proteção para fornecer proteção ao paciente e ao usuário em ambientes cirúrgicos.

O Avental Cirúrgico ValueSelect\* Filme-Reforçado atende aos requisitos da barreira de líquidos AAMI Nível 3 e aos requisitos de desempenho de acordo com a norma EN 13795.

## Instruções de Uso

1. Remover o Avental da embalagem, respeitando técnica asséptica;
2. Secar as mãos com a toalha que acompanha o avental;
3. Os aventais deverão ser desdobrados respeitando técnica asséptica, antes de serem vestidos;
4. Descartar o produto após sua utilização.

## Composição

Toalha: Polpa de Celulose e Polímero

Avental: Tecido SMS com Reforço do filme Polipropileno (PP)/ Polietileno (PE) e Spunbond (PP)

Não contém látex de borracha natural.

## Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUACVS-H rev. 01

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições de Manipulação**

Descarte:

O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

### **Advertências**

Proibido Reprocessar.

### **Precauções**

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

### **Contraindicações:**

Não aplicável.

**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

**Fabricante Responsável:** Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América