

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Hospitalar

Nome Comercial: Avental Descartável para Procedimento Halyard

Modelo e Especificações Técnicas:

Código	Descrição	Tamanho	Comprimento	Cor
69105	Avental descartável para Procedimento Halyard Universal	Universal	116 cm	Amarelo
69106	Avental descartável para Procedimento Halyard Extra-Grande	Extra-Grande	122 cm	Amarelo

Registro Anvisa: 81832580063

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 03 anos

Produto de Pronto Uso.

Fotos



	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUADP-H rev. 00

Conteúdo

São acondicionados 10 aventais em embalagem de polietileno e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte, contendo 100 unidades.

Descrição e Indicação

Os Aventais descartáveis para procedimento são vestimentas indicadas para uso por profissionais da saúde em situações que requerem contato rotineiro com os pacientes, isolamento de contato ou tarefas gerais de limpeza. Indicados também para apoiar estratégias de controle de infecções de hospitais e outros profissionais de saúde.

Instruções de Uso

1. Retirar o avental da embalagem;
2. Desdobrar o avental respeitando técnicas e protocolos da instituição, antes de vesti-lo;
3. Descartar o avental imediatamente após sua utilização em local apropriado de acordo com os protocolos da Instituição.

Composição

Spunbond (Polipropileno).

Não contém látex de borracha natural.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Mantenha o máximo possível em sua caixa.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUADP-H rev. 00

Advertências

— Proibido Reprocessar

Precauções

O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116