	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: dez/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUAIAAMI-H Rev.00

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Cirúrgica

Nome Comercial: Avental para Isolamento AAMI2 Halyard

### Modelo

48362 Avental para Isolamento AAMI2 -Halyard


Registro Anvisa: 81832580080

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem - Caixa

### Fotos:

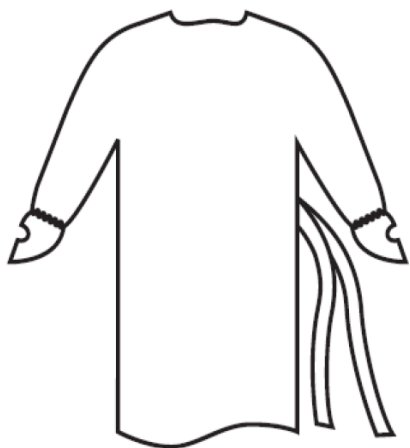

### Especificações

Código	Descrição	Barreira de Proteção	Tamanho	Comprimento
48362	48362 Avental para Isolamento AAMI2 - Halyard	AAMI2	Extra-Grande	122 cm

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: dez/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUAIAAMI-H Rev.00

### **Descrição e Indicação**

Os aventais para isolamento foram projetados para fornecer barreira de proteção em diferentes tipos de procedimentos em que possam ocorrer exposição a fluidos.

São indicados para uso único e destinados ao uso por profissionais de saúde em situações que exijam contato de rotina com o paciente, isolamento de contato ou tarefas gerais de limpeza. Usado para apoiar estratégias de controle de infecção de hospitais e outros prestadores de cuidados de saúde.

### **Instruções de Uso**

1. Retire o avental da embalagem;
2. Desdobre o avental.
- 3- Vista o avental colocando-o sobre cabeça e depois vista as mangas, encaixando o polegar na abertura contida próximo ao punho.
- 4- Utilize as tiras para ajustar o avental ao corpo.
- 3- Após a utilização descartar o avental utilizado de acordo com os protocolos da Instituição.

### **Composição**

Tecido SMS (Polipropileno) com Elástico nas Mangas.

### **Condições de Armazenamento**

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições de Manipulação**

Descarte: O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

### **Advertências**

Proibido Reprocessar

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: dez/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUAIAAMI-H Rev.00

### **Precauções**

O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

### **Contraindicações**

Não aplicável.

**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

**Fabricante Responsável:** O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virginia - Estados Unidos da América 23116