

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: dez/20
	Instrução de Uso	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Cirúrgica

Nome Comercial: Avental Impermeável Halyard

Modelos 69307: Avental Impermeável Halyard

Registro Anvisa: 81832580081

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem – Caixa

Fotos:



Especificações

Código	Descrição	Tamanho	Comprimento
69307	69307 Avental Impermeável Halyard	Grande	120 cm

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: dez/20
	Instrução de Uso	IUAIH-H Rev.00

Descrição e Indicação

Os aventais impermeáveis são destinados para uso por profissionais de saúde que possam entrar em contato com grande exposição a fluídos.

São de uso único e indicados para serem utilizados em situações que exijam contato de rotina com o paciente, isolamento de contato ou tarefas gerais de limpeza. Utilizado também para apoiar estratégias de controle de infecção de hospitais e outros prestadores de cuidados de saúde.

Instruções de Uso

1. Retire o avental da embalagem;
2. Desdobre o avental.
- 3- Vista o avental, encaixe o polegar na abertura contida próximo ao punho.
- 4- Utilize as tiras para ajustar o avental ao corpo.
- 3- Após a utilização descartar o avental utilizado de acordo com os protocolos da Instituição.

Composição

Filme de polietileno.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Descarte: O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Advertências

Proibido Reprocessar

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: dez/20
	Instrução de Uso	IUAIH-H Rev.00

Precauções

O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Contraindicações

Não aplicável

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virginia - Estados Unidos da América 23116