

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	

## Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Cirúrgica

Nome Comercial: Avental para Proteção em Isolamento

## Modelos e Especificações

Código	Descrição	Barreira de Proteção	Tamanho	Largura do Peito / Comprimento / Manga	Cor
69979 *	Avental para Proteção em Isolamento Grande AAMI2 Amarelo	AAMI2	Grande	26/ 46/ 21 in 66/ 117/ 53 cm	Amarelo
13962	Avental para Proteção em Isolamento BASICS* Universal AAMI2 Amarelo	AAMI2	Universal	26/ 43/ 21 in 66/ 109/ 53 cm	Amarelo
13961	Avental para Proteção em Isolamento BASICS* Extra Grande AAMI2 Amarelo	AAMI2	Extra Grande	30/ 47/ 23 in 76/ 119/ 58 cm	Amarelo
35460 *	Avental para Proteção em Isolamento Grande AAMI2 Amarelo	AAMI2	Grande	26/ 46/ 21 in 66/ 117/ 53 cm	Amarelo
54311	Avental para Proteção em Isolamento Extra Grande AAMI3 Azul	AAMI3	Extra Grande	30/ 50/ 24.5 in 76/ 127/ 62 cm	Azul
54310	Avental para Proteção em Isolamento Grande AAMI3 Azul	AAMI3	Grande	26/ 46/ 22.25 in 66/ 117/ 57 cm	Azul
69981	Avental para Proteção em Isolamento Grande AAMI2 Azul	AAMI2	Grande	26/ 46/ 22 in 66/ 117/ 57 cm	Azul
69987	Avental para Proteção em Isolamento Extra Grande AAMI2 Azul	AAMI2	Extra Grande	30/ 50/ 24 in 76/ 127/ 61 cm	Azul
69988	Avental para Proteção em Isolamento Extra Grande AAMI2 Amarelo	AAMI2	Extra Grande	30/ 50/ 24 in 76/ 127/ 61 cm	Amarelo
54100	Avental para Proteção em Isolamento Grande AAMI1 Amarelo	AAMI1	Grande	26/ 46/ 22.25 in 66/ 117/ 57 cm	Amarelo
54101	Avental para Proteção em Isolamento Extra Grande AAMI1 Amarelo	AAMI1	Extra Grande	30/ 50/ 24.5 in 76/ 127/ 62 cm	Amarelo
54110	Avental para Proteção em Isolamento Grande AAMI1 Azul	AAMI1	Grande	26/ 46/ 22.25 in 66/ 117/ 57 cm	Azul
54111	Avental para Proteção em Isolamento Extra Grande AAMI1 Azul	AAMI1	Extra Grande	30/ 50/ 24.5 in 76/ 127/ 62 cm	Azul

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	

- Aventais que atendem aos requisitos do Nível 1 da AAMI a 4% AQL:

Penetração de Impacto Spray  $\leq 4,5$  g

Pressão hidrostática: não aplicável / requerido

- Aventais que atendem aos requisitos do Nível 2 da AAMI a 4% AQL:

Penetração de impacto de pulverização  $\leq 1,0$  g

Pressão hidrostática  $\geq 20$  cm

- Aventais que atendem aos requisitos do Nível 3 da AAMI a 4% AQL:

Penetração de impacto de pulverização  $\leq 1,0$  g

Pressão hidrostática  $\geq 50$  cm

OBS: AQL = Limite de Qualidade de Aceitação

Registro Anvisa: 81832580042

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 03 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\*.

Produto de Pronto Uso.

### Fotos



### Conteúdo

Embalado individualmente em embalagem de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\* com Filme Plástico. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de Polietileno contendo 10 unidades. E então, são acondicionadas em caixa papelão para transporte, contendo 10 bolsas com 100 unidades.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUAPI-H rev. 02

### **Descrição e Indicação**

Aventais descartáveis, destinadas aos profissionais de saúde em situações que exijam contato com isolamento.

É usado para apoiar estratégias de controle de infecção de hospitais e outros prestadores de serviços de saúde.

### **Instruções de Uso**

1. Remover o Avental da embalagem;
2. Os aventais deverão ser desdobrados, respeitando técnicas e protocolos da instituição, antes de serem vestidos;
3. Descartar o produto imediatamente após sua utilização na área de Isolamento de acordo com os protocolos da Instituição.

### **Composição**

Não-tecido SMS (Polipropileno) com Elástico nas Mangas.

### **Condições de Armazenamento**

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições de Manipulação**

Descarte: O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

### **Advertências**

Proibido Reprocessar.

### **Precauções**

O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUAPI-H rev. 02

**Contraindicações:**

Não aplicável.

**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

**Fabricante Responsável:** Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América