

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	Instrução de Uso	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Campo Cirúrgico

Nome Comercial: Campo Cirúrgico SMS c/ Bolsa Coletora

Modelo e Especificações

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade por Caixa</u>
89529	Campo Cirúrgico SMS c/ Bolsa Coletora de Fluídos- Fenestra Incisional Cesárea II	100 in. x 72 in. x 120 in. / 254 cm x 183 cm x 305 cm	8
89526	Campo Cirúrgico SMS c/ Bolsa Coletora- Fenestra Incisional Abdominal/Cesárea	100 in. x 72 in. x 120 in. / 254 cm x 183 cm x 305 cm	7
89492	Campo Cirúrgico SMS c/ Bolsa Coletora de Fluídos- ORTHOARTS*- Artroscopia ombro	60 in. x 100 in. / 152 cm x 254 cm	12
89305	Campo Cirúrgico SMS c/ Bolsa Coletora de Fluídos- Fenestra Oval Oftálmico Básico	56 in. x 52 in. / 142 cm x 132 cm	40
89304	Campo Cirúrgico SMS c/ Bolsa Coletora de Fluídos- Oftálmico Básico	56 in. x 52 in. / 142 cm x 132 cm	40
89265	Campo Cirúrgico SMS c/ Bolsa Coletora de Fluídos- Artroscopia de Joelho	88 in. x 124 in. / 224 cm x 315 cm	10

Registro Anvisa: 81832580032

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

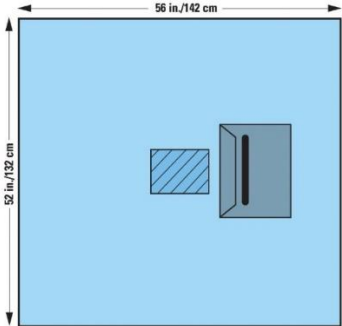
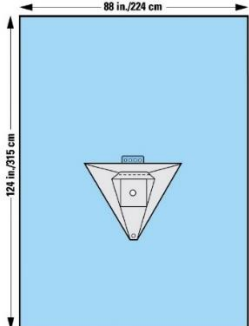
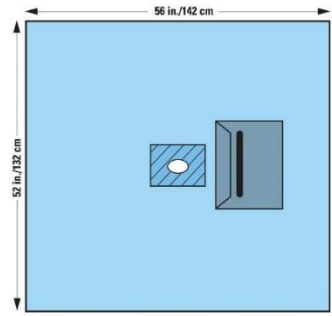
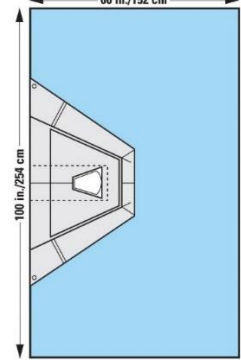
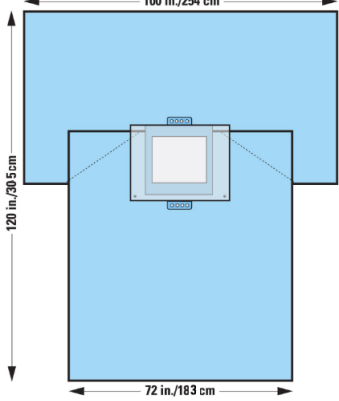
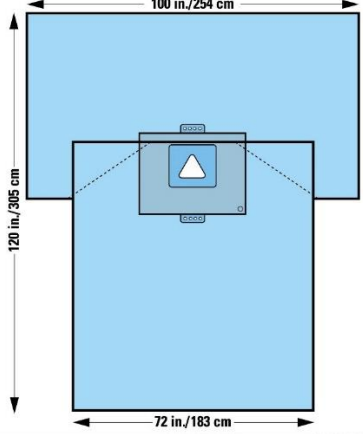
Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.




Instrução de Uso

IUCCBC-H
rev. 02

Fotos

89304	89265
	
89305	89492
	
89529	89526
	

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	Instrução de Uso	IUCCBC-H rev. 02

Conteúdo

Os campos são fornecidos estéreis, embalados individualmente.

A embalagem primária é Tyvek* ou Papel Grau Cirúrgico com Filme Plástico. A embalagem secundária, para transporte, é papelão – celulose.

Descrição e Indicação

Os campos cirúrgicos são destinados a proporcionar uma região estéril, limpa e seca, bem como proporcionar uma região isolada e livre de partículas ou líquidos para o cirurgião, paciente e ambiente cirúrgico garantindo assim uma área apropriada para a realização do procedimento cirúrgico.

Instruções de Uso

- Remova o campo cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Campo em Não-Tecido SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) feitos em 100% Polipropileno com Bolsas e/ou Fenestras Incisionais em Plástico de Polietileno.

Não contém látex.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

- O produto deve ser conservado em sua embalagem original;
- Evitar sua exposição à luminosidade, umidade, altas temperaturas e partículas de pó;
- Os produtos devem ser acomodados em prateleiras suspensas ou em armários fechados;
- Cuidar para que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso, a fim de manter sua esterilidade.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	Instrução de Uso	IUCCBC-H rev. 02

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes da embalagem devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd, Mechanicsville, Virginia - Estados Unidos da America 23116