	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	

## Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Campo Cirúrgico

Nome Comercial: Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Bolsa ou Janela

## Modelo e Especificações

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade por Caixa</u>
66350	Campo Cirúrgico SMS Reforçado com Janela para Anestesia Split CVARTS*	115 in. x 85 in. x 151 in. / 292 cm x 215 cm x 383 cm	6
89462	Campo Cirúrgico SMS Reforçado com Janela para Angiografia Femural	82 in. x 124 in. / 208 cm x 314 cm	18
89463	Campo Cirúrgico SMS Reforçado com Janela para Angiografia Femural	82 in. x 124 in. / 208 cm x 314 cm	16
89356	Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Bolsa Coletora e Cobertura- Oftálmico OCUARTS*	72 in. x 115 in. / 183 cm x 292 cm	10
89354	Campo Cirúrgico SMS Reforçado com Bolsa Coletora de Fluídos OCUARTS*	72 in. x 74 in. / 183 cm x 188 cm	10
89345	Campo Cirúrgico SMS Reforçado com Bolsa ORTHOARTS* para Quadril	114 in. x 88 in. x 126 in. / 289 cm x 223 cm x 320 cm	6
89267	Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Bolsa ou Janela ORTHOARTS*- Artroscopia Joelho	114 in. x 88 in. x 116 in. / 290 cm x 224 cm x 295 cm	7
89233	Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Bolsa ou Janela para Laparoscopia Abdominal	100 in. x 76 in. x 120 in. / 254 cm x 193 cm x 314 cm	15
89223	Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Bolsa Instrumentais- Laparoscopia/Colecistectomia	102 in. x 76 in. x 120 in. / 259 cm x 193 cm x 304 cm	10
89219	Campo Cirúrgico SMS Reforçado c/ Bolsa Coletora Fluídos- Laparoscopia/Pelviscopia	112 in. x 30 in. x 124 in. / 284 cm x 76 cm x 314 cm	10
89204	Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Bolsa Coletora Fluídos Acoplada- Gineco/Urologia	112 in. x 63 in. x 131 in. / 284 cm x 160 cm x 333 cm	10
89066	Campo Cirúrgico SMS Reforçado c/ Bolsa Coletora Fluídos- Ombro Cadeira de Praia	172 in. x 100 in. / 436 cm x 254 cm	6
89062	Campo Cirúrgico SMS Reforçado com bolsa para Craniotomia	122 in. x 74 in. x 134 in. / 310 cm x 188 cm x 340 cm	9
29155	Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Dupla Janela e Cobertura Total Corporal para PICC	110 in. x 78 in. / 279 cm x 198 cm	19
29149	Campo Cirúrgico SMS Reforçado com Janela Corporal para CVC	110 in. x 68 in. / 279 cm x 172 cm	20
89583	Campo Cirúrgico SMS Reforçado c/ Dupla Janela BASICS*- Angiografia Radio-Femural	94 in. x 149 in. / 240 cm x 380 cm	12

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	

29232	Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Bolsa ou Janela- Angiografia Femural Pediátrica	158 in. x 76.5 in. / 401 cm x 194 cm	12
29225	Campo Cirúrgico SMS Reforçado-Bolsa ou Janela Angio Femural/Acesso Jugular Int	142 in. x 79 in. / 360 cm x 200 cm	15
29227	Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Janelas Laterais e Inferior Angiografia Femural	135 in. x 79 in. / 342 cm x 200 cm	13
29229	Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Bolsa ou Janela Marca-Passo Fenestra Incisional	135 in. x 91 in. / 342 cm x 231 cm	12
29240	Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Bolsas para Instrumentos- Laparoscopia/Litotomia	104 in. x 124 in. / 264 cm x 314 cm	15
89528	Campo Cirúrgico SMS Reforçado- Bolsa ou Janela- Cesárea c/ Fenestra Incisional	100 in. x 72 in. x 120 in. / 254 cm x 183 cm x 305 cm	8
89235	Campo Cirúrgico SMS Reforçado com Bolsas Transparentes Duplas para Laparotomia	100 in. x 72 in. x 124 in. / 254 cm x 182 cm x 314 cm	13
89070	Campo Cirúrgico SMS Reforçado-Bolsa Coletora Fluido Acoplada- Artroscopia Ombro	160 in. x 102 in. / 406 cm x 259 cm	10

Registro Anvisa: 81832580022

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.




# Instrução de Uso

## Fotos


<p><b>29155</b></p> <p>78 in./198 cm</p> <p>110 in./279 cm</p>	<p><b>29225</b></p> <p>79 in./200 cm</p> <p>142 in./360 cm</p>
<p><b>29149</b></p> <p>68 in./172 cm</p> <p>110 in./279 cm</p>	<p><b>29227</b></p> <p>79 in./200 cm</p> <p>135 in./342 cm</p>
<p><b>29232</b></p> <p>76.5 in./194 cm</p> <p>158 in./401 cm</p>	<p><b>29229</b></p> <p>91 in./231 cm</p> <p>135 in./342 cm</p>
<p><b>29240</b></p>	<p><b>89062</b></p>




# Instrução de Uso

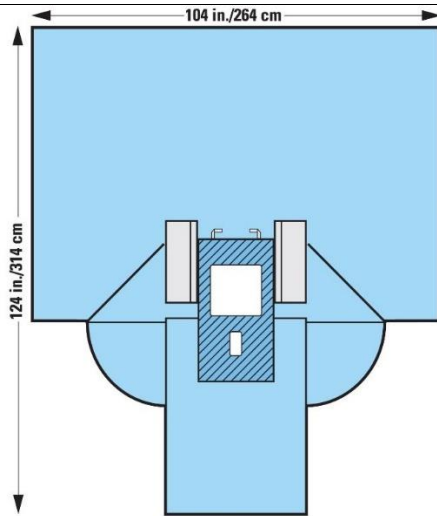


**89204**

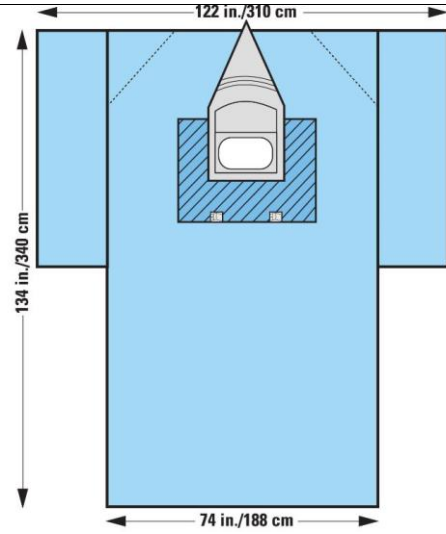



**89066**

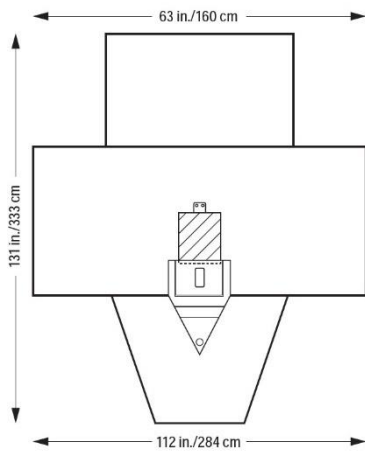

**89219**

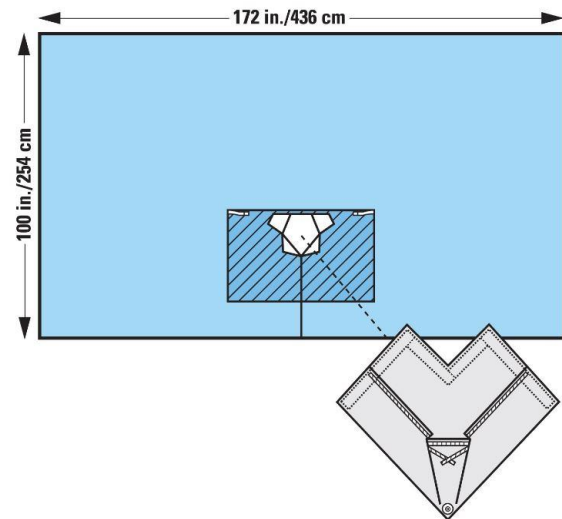

**89223**

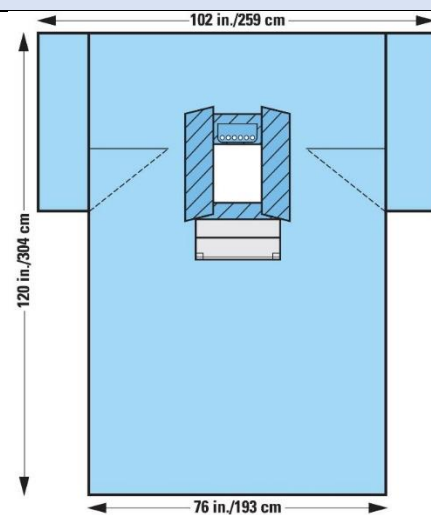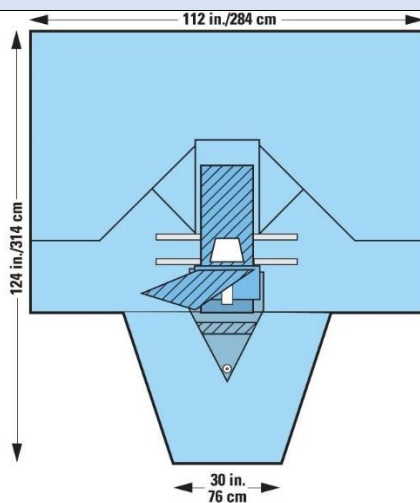




# Instrução de Uso

<p style="text-align: center;"><b>89267</b></p> <p style="text-align: center;">114 in./290 cm</p> <p style="text-align: center;">116 in./295 cm</p> <p style="text-align: center;">88 in./224 cm</p>	<p style="text-align: center;"><b>89233</b></p> <p style="text-align: center;">100 in./254 cm</p> <p style="text-align: center;">124 in./314 cm</p> <p style="text-align: center;">76 in./193 cm</p>
<p style="text-align: center;"><b>89345</b></p> <p style="text-align: center;">114 in./289 cm</p> <p style="text-align: center;">126 in./320 cm</p> <p style="text-align: center;">88 in./223 cm</p>	<p style="text-align: center;"><b>89354</b></p> <p style="text-align: center;">72 in./183 cm</p> <p style="text-align: center;">74 in./188 cm</p>
<p style="text-align: center;"><b>89462</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>89356</b></p>



# Instrução de Uso

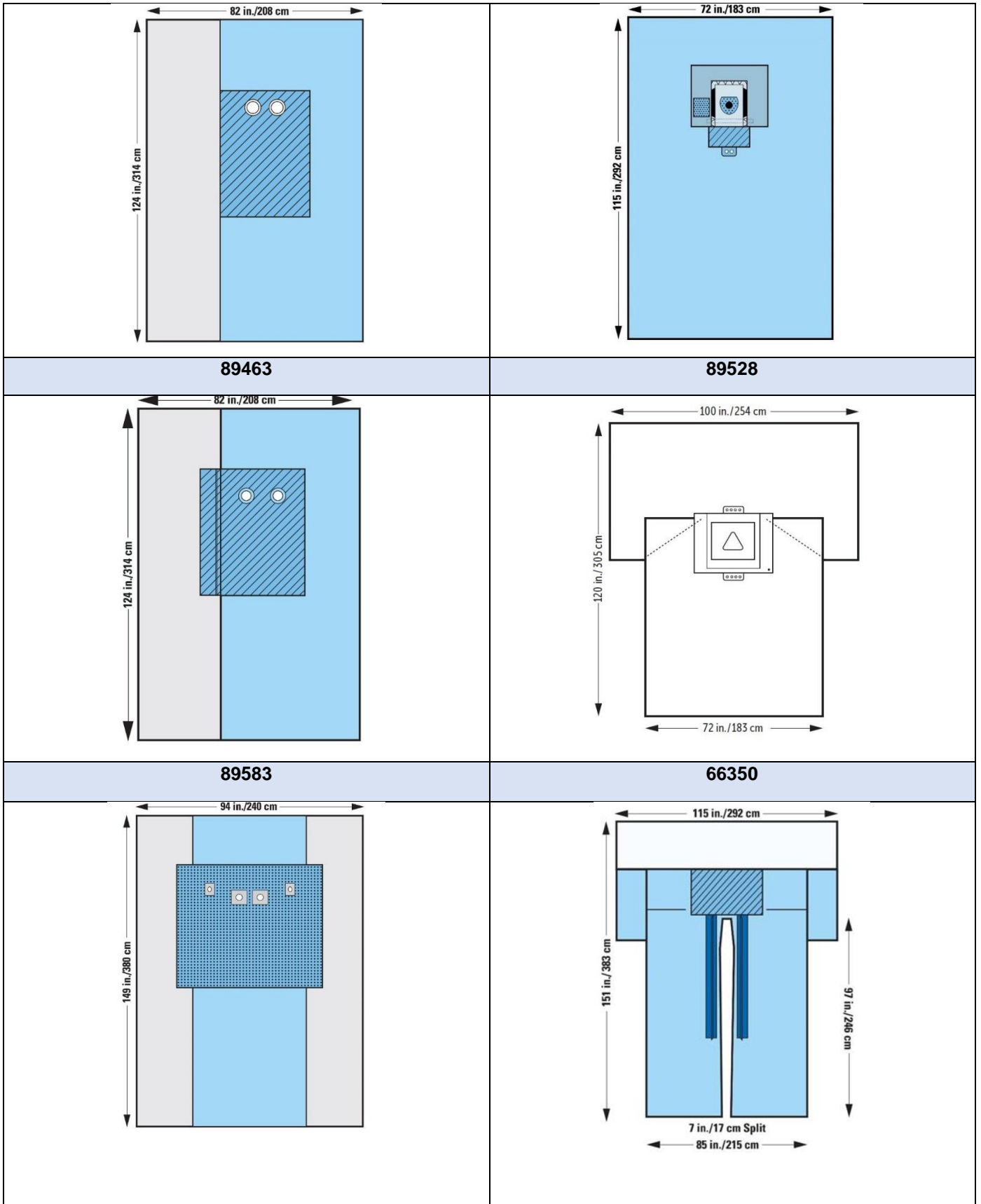

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUCCRBH-H rev. 01

## Conteúdo

Os campos são fornecidos estéreis, embalados individualmente.

A embalagem primária é Tyvek\* ou Papel Grau Cirúrgico com Filme Plástico. A embalagem secundária, para transporte, é papelão – celulose.

## Descrição e Indicação

Os campos cirúrgicos são destinados a proporcionar uma região estéril, limpa e seca, bem como proporcionar uma região isolada e livre de partículas ou líquidos para o cirurgião, paciente e ambiente cirúrgico garantindo assim uma área apropriada para a realização do procedimento cirúrgico.

## Instruções de Uso

- Remova o campo cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

## Composição

Campos: Não-Tecido SMS (spunbond-meltblown-spunbond) em 100% Polipropileno

Áreas de Reforço: Polietileno Laminado com Não-Tecido e Espuma de Polietileno.


Fenestras, Bolsas E Janelas: Filme Plástico de Polietileno.

Não contém látex.

Não contém DEHP.

## Condições de Armazenamento

- O produto deve ser conservado em sua embalagem original;
- Evitar sua exposição à luminosidade, umidade, altas temperaturas e partículas de pó;
- Os produtos devem ser acomodados em prateleiras suspensas ou em armários fechados;
- Cuidar para que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso, a fim de manter sua esterilidade.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUCCRBH-H rev. 01

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições de Manipulação**

Todos os componentes da embalagem devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

### **Advertências**

Proibido Reprocessar.

### **Precauções**

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

### **Contraindicações:**

Não aplicável.

### **Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

### **Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

### **Fabricante Responsável:** Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América