

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	

## Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Campo Cirúrgico

Nome Comercial: Campo Cirúrgico de SMS

## Modelo e Especificações

Código	Descrição	Tamanho	Quantidade por Caixa
89438	Campo Cirúrgico de SMS para Cabeça modelo Turbante 104 cm x 81 cm	41 in. x 32 in. / 104 cm x 81 cm	38
89431	Campo Cirúrgico de SMS para Cabeça modelo Turbante 127 cm x 92 cm	50 in. x 36 in. / 127 cm x 92 cm	38
89408	Campo Cirúrgico de SMS- Perneiras 79 cm x 122 cm	31 in. x 48 in. / 79 cm x 122 cm	52
89131	Campo Cirúrgico de SMS Extra-Grande 193 cm x 254 cm	76 in. x 100 in. / 193 cm x 254 cm	20
89124	Campo Cirúrgico de SMS Grande e Dobra Reversa 152 cm x 193 cm	60 in. x 76 in. / 152 cm x 193 cm	40
89121	Campo Cirúrgico de SMS Grande 152 cm x 193 cm	60 in. x 76 in. / 152 cm x 193 cm	36
89111	Campo Cirúrgico de SMS Médio 193 cm x 112 cm	76 in. x 44 in. / 193 cm x 112 cm	50
89101	Campo Cirúrgico de SMS Pequeno 152 cm x 112 cm	60 in. x 44 in. x / 152 cm x 112 cm	54
89023	Campo Cirúrgico de SMS Médio 193 cm x 105 cm	76 in. x 41.5 in. / 193 cm x 105 cm	50
89535	Campo Cirúrgico de SMS BASICS* Grande 152 cm x 193 cm	60 in. x 76 in. / 152 cm x 193 cm	60
47614	Campo Cirúrgico de SMS Pequeno 147 cm x 101 cm	58 in. x 40 in. / 147 cm x 101 cm	60
47617	Campo Cirúrgico de SMS Médio 185 cm x 101 cm	73 in. x 40 in. / 185 cm x 101 cm	60
47622	Campo Cirúrgico de SMS Grande 139 cm x 193 cm	55 in. x 76 in. / 139 cm x 193 cm	32
47626	Campo Cirúrgico de SMS Grande com Dobra Reversa 139 cm x 193 cm	55 in x 73 in / 139 cm x 193 cm	48
47630	Campo Cirúrgico de SMS Extra-Grande 193 cm x 243 cm	76 in. x 96 in. / 193 cm x 243 cm	24
47620	Campo Cirúrgico de SMS BASICS* Grande 139 cm x 193 cm	55 in. x 76 in. / 139 cm x 193 cm	52

Registro Anvisa: 81832580027

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.




# Instrução de Uso


## Fotos

<p><b>89101</b></p> <p>60 in./152 cm</p> <p>44 in./112 cm</p>	<p><b>89111</b></p> <p>76 in./193 cm</p> <p>44 in./112 cm</p>
<p><b>89023</b></p> <p>76 in./193 cm</p> <p>41.5 in./105 cm</p>	<p><b>89121</b></p> <p>60 in./152 cm</p> <p>76 in./193 cm</p>
<p><b>89408</b></p> <p>48 in./122 cm</p> <p>31 in./79 cm</p>	<p><b>89124</b></p> <p>60 in./152 cm</p> <p>76 in./193 cm</p>
<p><b>89431</b></p>	<p><b>89438</b></p>



# Instrução de Uso

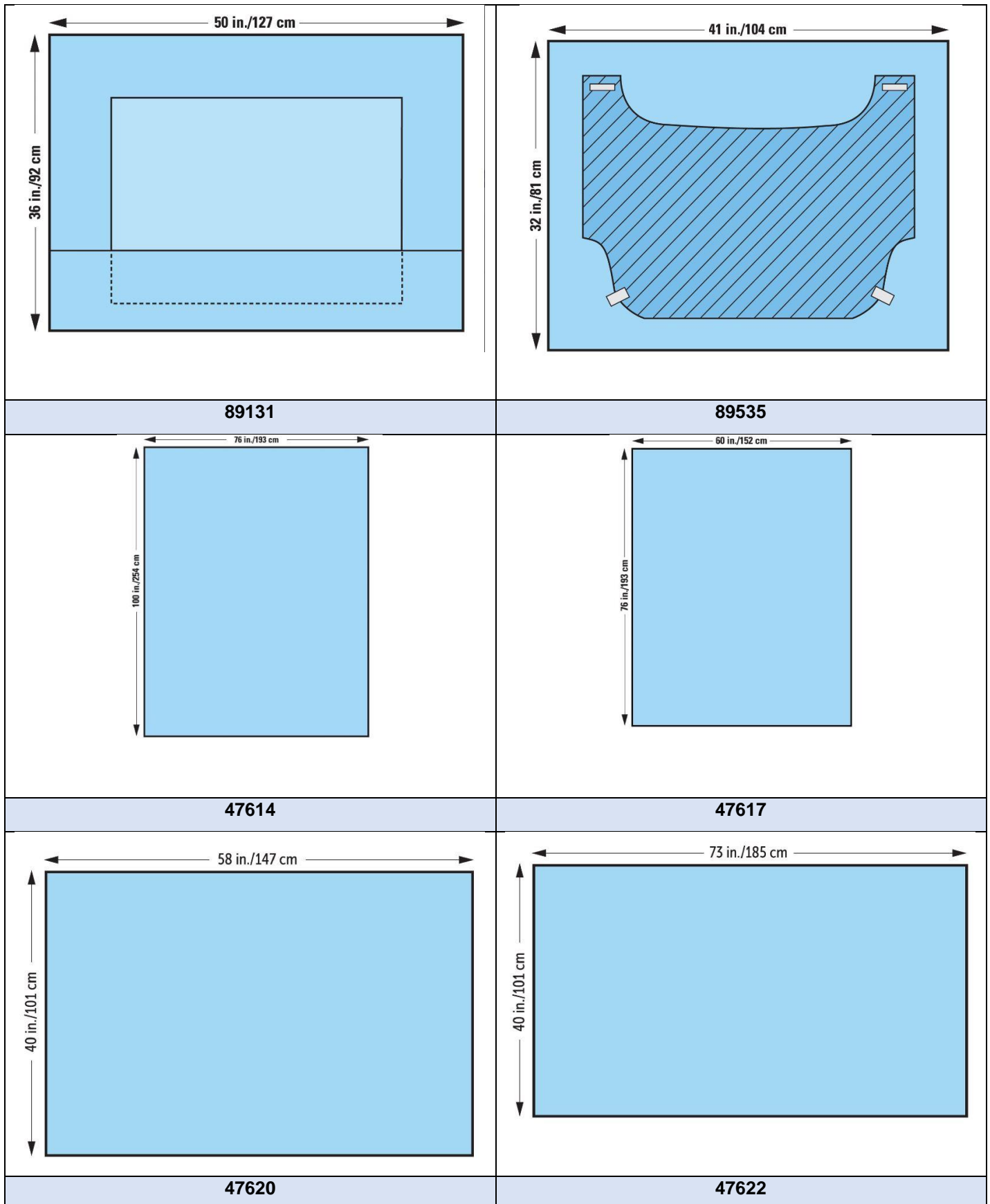

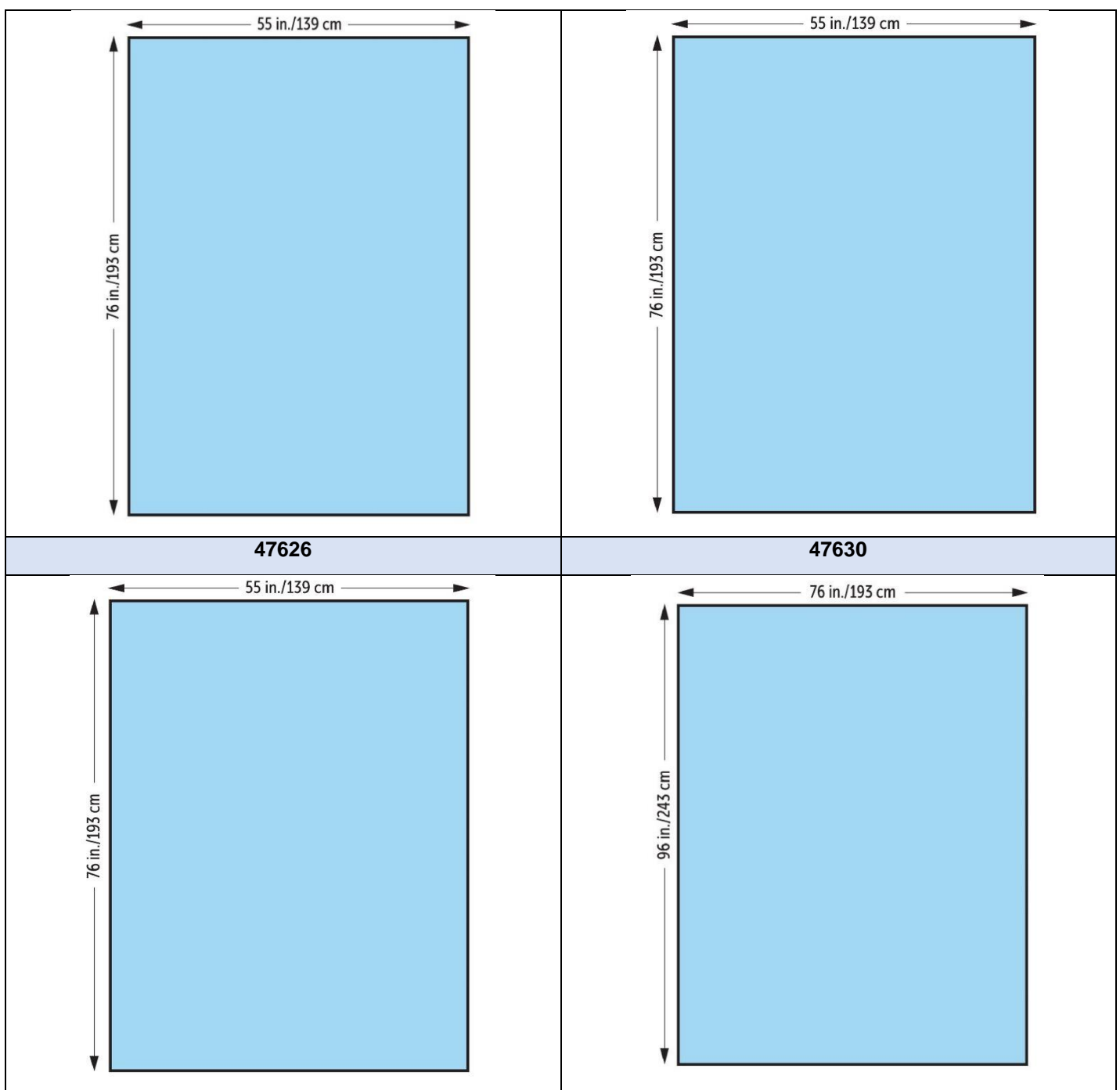


**Conteúdo**

Os campos são fornecidos estéreis, embalados individualmente.

A embalagem primária é Tyvek\* ou Papel Grau Cirúrgico com Filme Plástico. A embalagem secundária, para transporte, é papelão – celulose.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUCCSMS-H rev. 03

### **Descrição e Indicação**

Os campos cirúrgicos são destinados a proporcionar uma região estéril, limpa e seca, bem como proporcionar uma região isolada e livre de partículas ou líquidos para o cirurgião, paciente e ambiente cirúrgico garantindo assim uma área apropriada para a realização do procedimento cirúrgico.

### **Instruções de Uso**

- Remova o campo cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

### **Composição**

Campos em não-tecido SMS (spunbond-meltblown-spunbond) em 100% Polipropileno.

Não contém látex.

Não contém DEHP.

### **Condições de Armazenamento**

- O produto deve ser conservado em sua embalagem original;
- Evitar sua exposição à luminosidade, umidade, altas temperaturas e partículas de pó;
- Os produtos devem ser acomodados em prateleiras suspensas ou em armários fechados;
- Cuidar para que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso, a fim de manter sua esterilidade.

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições de Manipulação**

Todos os componentes da embalagem devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUCCSMS-H rev. 03

### **Advertências**

Proibido Reprocessar.

### **Precauções**

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

### **Contraindicações:**

Não aplicável.

**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

**Fabricante Responsável:** O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116