	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	

## Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Campo Cirúrgico

Nome Comercial: Campo Cirúrgico de SMS Reforçado

## Modelo e Especificações

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade por Caixa</u>
89227	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Torácico	100 in. x 72 in. x 124 in. / 254 cm x 182 cm x 314 cm	12
89352	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Split Cabeça e Pescoço ORL	76 in. x 124 in. / 193 cm x 314 cm	18
89258	Campo Cirúrgico SMS Reforçado-Tireóide c/ Extensão para Isolamento de Braços	100 in. x 72 in. x 124 in. / 254 cm x 182 cm x 314 cm	10
89255	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Tireóide	76 in. x 124 in. / 193 cm x 314 cm	13
89472	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Cobertura Total do Paciente para CVC	68 x 72 in. / 172 cm x 182 cm	20
89471	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Angiografia Braquial	31 in. x 44 in. / 78 cm x 111 cm	50
89466	Campo Cirúrgico SMS Reforçado CVARTS* para Incisão Cardiovascular	108 in. x 80 in. x 124 in. / 274 cm x 203 cm x 315 cm	5
89452	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Split CVARTS* Cardiovascular	108 in. x 80 in. x 124 in. / 274 cm x 203 cm x 315 cm	6
89381	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Ortopédico Transversal	100 in. x 60 in. / 254 cm x 152 cm	18
89348	Campo Cirúrgico SMS Reforçado ORTHOARTS* Transversal	112 in. x 72 in. / 284 cm x 183 cm	12
89347	Campo Cirúrgico SMS Reforçado ORTHOARTS* em U	88 in. x 108 in. / 223 cm x 274 cm	10
89346	Campo Cirúrgico SMS Reforçado ORTHOARTS* Quadril	114 in. x 88 in. x 126 in. / 290 cm x 224 cm x 320 cm	7
89311	Campo Cirúrgico SMS Reforçado em U Grande	88 in. x 125 in. / 223 cm x 317 cm	11
89301	Campo Cirúrgico SMS Reforçado em U	76 in. x 120 in. / 193 cm x 305 cm	17
89291	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Bilateral para Membros	76 in. x 120 in. / 193 cm x 305 cm	14
89282	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Laparotomia	100 in. x 72 in. x 120 in. / 254 cm x 183 cm x 305 cm	15
89281	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Laparotomia Transversal	100 in. x 72 in. x 120 in. / 254 cm x 183 cm x 304 cm	15
89279	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Extremidade Universal	90 in. x 131 in. / 229 cm x 333 cm	14

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	

89278	Campo Cirúrgico SMS Reforçado ORTHOARTS* Extremidade Inferior	114 in. x 88 in. x 126 in. / 289 cm x 223 cm x 320 cm	7
89276	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Extremidade Inferior	88 in. x 131 in. / 223 cm x 332 cm	14
89274	Campo Cirúrgico SMS Reforçado ORTHOARTS* para Ombro	112 in. x 60 in. / 284 cm x 152 cm	12
89272	Campo Cirúrgico SMS Reforçado ORTHOARTS* para Mão	114 in. x 150 in. x 62 in. / 289 cm x 381 cm x 157 cm	6
89271	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Extremidade Superior	76 in. x 120 in. / 193 cm x 304 cm	14
89251	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Tireóide	76 in. x 120 in. / 193 cm x 305 cm	13
89241	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Laparotomia Pediátrica	60 in. x 108 in. / 152 cm x 274 cm	15
89236	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Mamas	100 in. x 76 in. x 124 in. / 254 cm x 193 cm x 314 cm	10
89228	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Laparotomia	100 in. x 72 in. x 124 in. / 254 cm x 183 cm x 315 cm	13
89225	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Laparoscopia/Colecistectomia	102 in. x 76 in. x 120 in. / 259 cm x 193 cm x 304 cm	10
89224	Campo Cirúrgico SMS Reforçado - Laparoscopia/Pelviscopia com Perneiras Acopladas	100 in. x 30 in. x 123 in. / 254 cm x 76 cm x 312 cm	10
89222	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Laparoscopia/Pelviscopia	104 in. x 35 in. x 104 in. / 264 cm x 88 cm x 264 cm	14
89221	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Laparotomia c/ Extensão para Isolamento de Braços	104 in. x 76 in. x 120 in. / 264 cm x 193 cm x 304 cm	15
89220	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Laparoscopia/Pelviscopia com Perneiras	104 in. x 35 in. x 104 in. / 264 cm x 88 cm x 264 cm	10
89209	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Fenestrado para Pequenos Procedimentos	76 in. x 124 in. / 193 cm x 314 cm	19
89207	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Fenestrado para Pequenos Procedimentos	48 in. x 60 in. / 121 cm x 152 cm	40
89206	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Fenestrado para Pequenos Procedimentos	30 in. x 30 in. / 76 cm x 76 cm	100
89203	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Litotomia com Perneiras Acopladas	100 in. x 30 in. 87 in. / 254 cm x 76 cm x 220 cm	16
89079	Campo Cirúrgico SMS Reforçado em U	79 in x 124 in. / 200 cm x 314 cm	16
89063	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Ombro Cadeira de Praia	172 in. x 100 in. / 436 cm x 254 cm	10
89016	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Extremidades Inferiores	108 in. x 80 in. x 124 in. / 274 cm x 203 cm x 314 cm	12

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	

77450	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Mão	142 in. x 62 in. x 114 in. / 360 cm x 157 cm x 289 cm	11
66887	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Laparotomia Ped II- Extensão Isolamento de Braços	100 in. x 72 in. x 124 in. / 254 cm x 182 cm x 314 cm	13
66886	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Laparotomia Pediátrica II	74 in. x 124 in. / 188 cm x 315 cm	16
89704	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Angiografia Femural	76 in x 124 in. / 193 cm x 315 cm	14
89451	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Split Cardiovascular	116 in x 88 in x 140 in / 294 cm x 223 cm x 355 cm	4
89421	Campo Cirúrgico SMS Reforçado para Cabeça e Pescoço com Fenestra	76 in x 90 in / 193 cm x 229 cm	18
89141	Campo Cirúrgico SMS Reforçado com 3/4 de Reforço	60 in. x 76 in. / 152 cm x 193 cm	20
89275	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Split ORTHOARTS*	88 in. x 116 in. / 223 cm x 294 cm	10
89358	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Split Cabeça e Pescoço	76 in. x 124 in. / 193 cm x 315 cm	10
89229	Campo Cirúrgico SMS Reforçado Laparoscop/Colecistectomia extensão Isola. Braços	104 in. x 76 in. x 120 in / 264 cm x 193 cm x 304 cm	12
89531	Campo Cirúrgico SMS Reforçado-BASICS* para Pequenos Procedimentos com Fenestra	76 in. x 124 in. / 193 cm x 315 cm	32
47628	Campo Cirúrgico de SMS Reforçado com 3/4 de Reforço 139 cm x 193 cm	55 in. x 76 in. / 139 cm x 193 cm	22

Registro Anvisa: 81832580034

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos





Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.




# Instrução de Uso

## Fotos

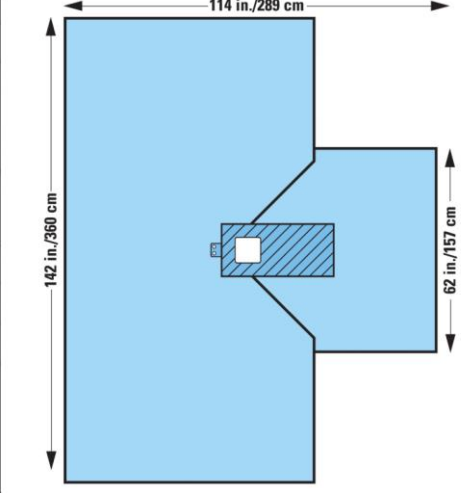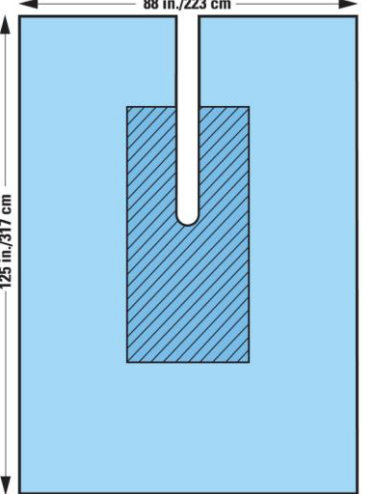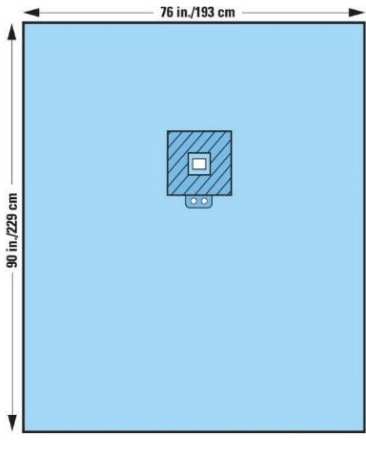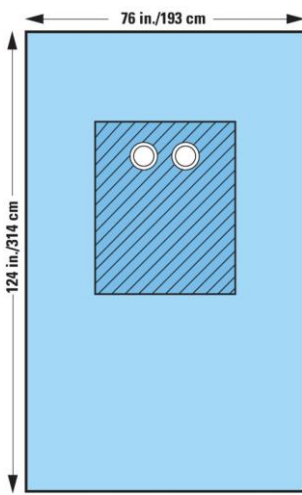
<b>77450</b>	<b>89311</b>
	
<b>89421</b>	<b>89704</b>
	
<b>89451</b>	<b>66886</b>




# Instrução de Uso

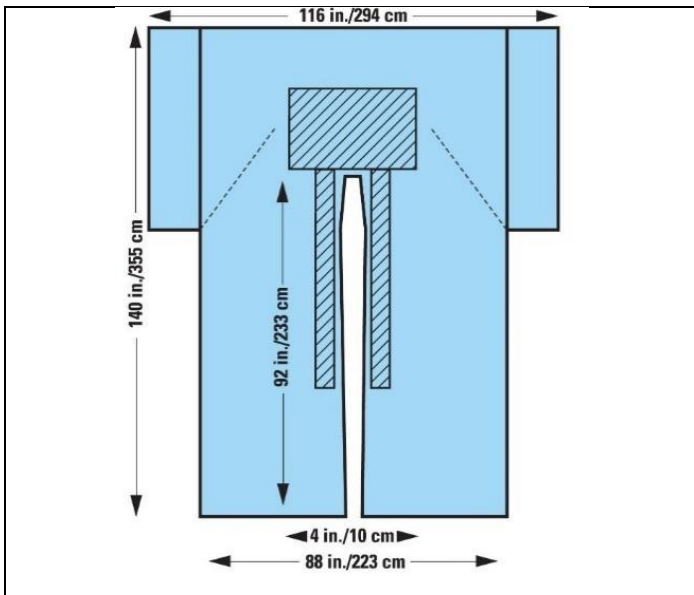


**66887**

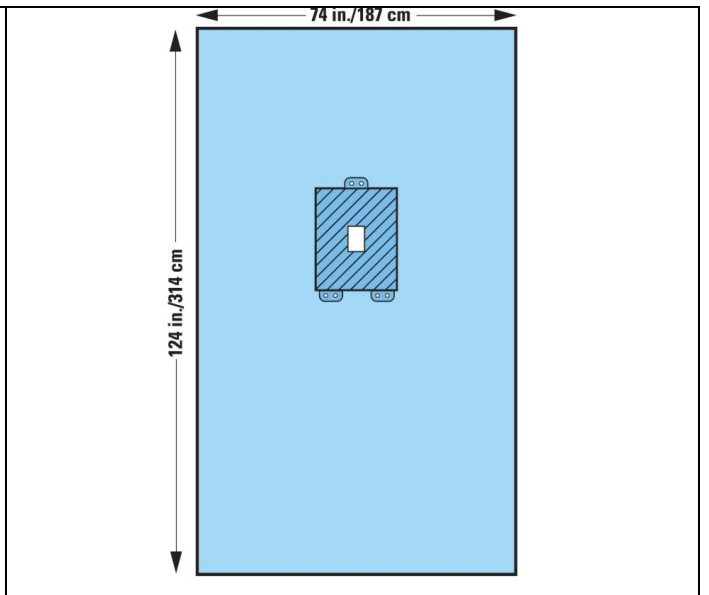

**89063**

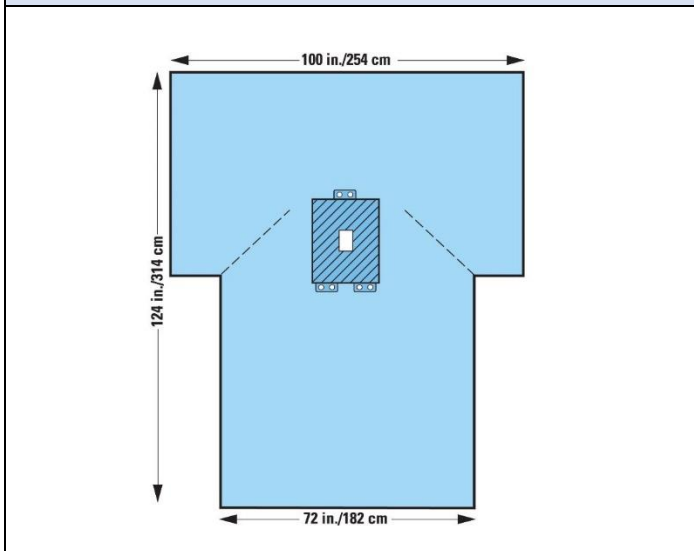


**89016**

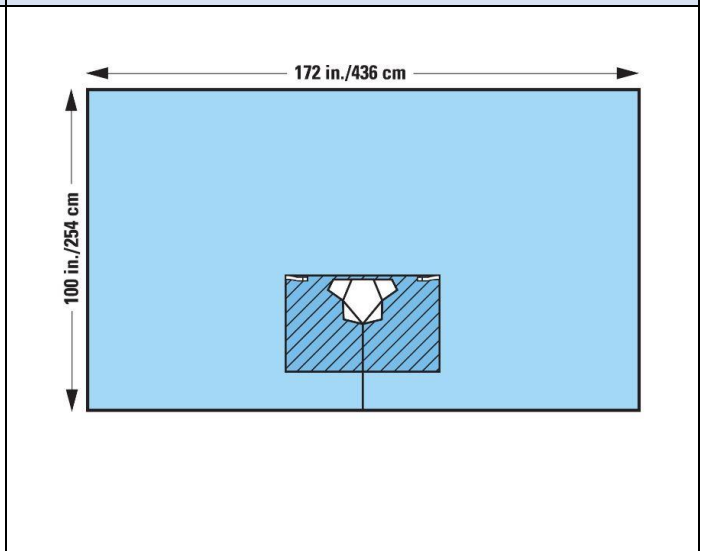


**89079**




# Instrução de Uso

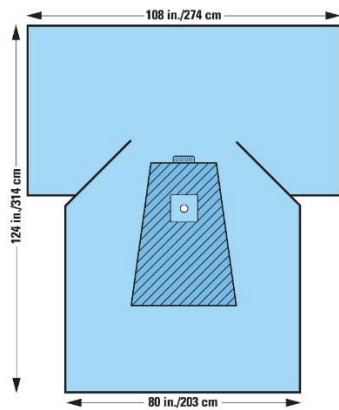


**89203**

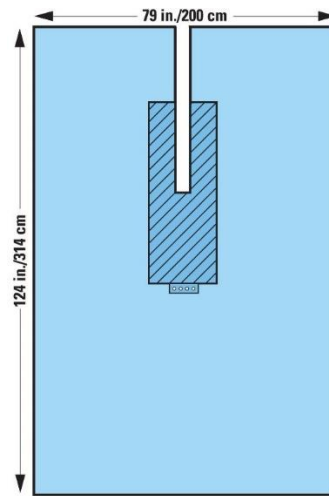

**89207**

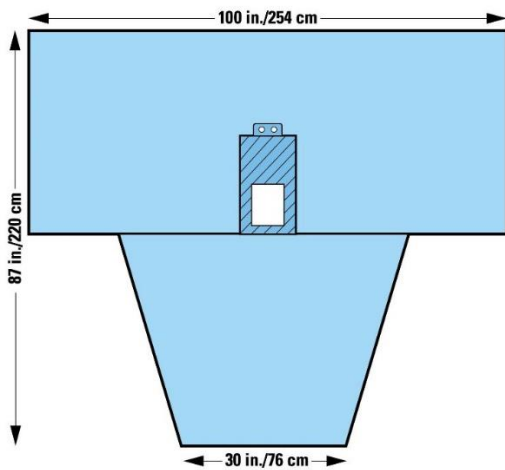


**89206**

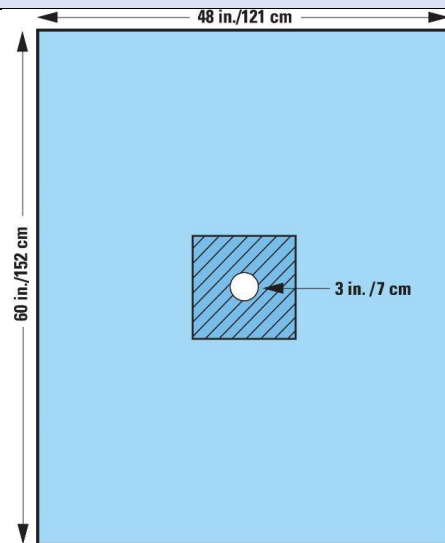


**89209**




# Instrução de Uso

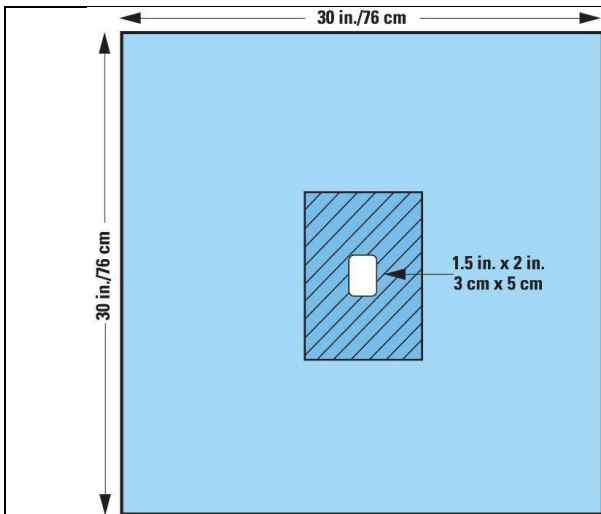


**89220**

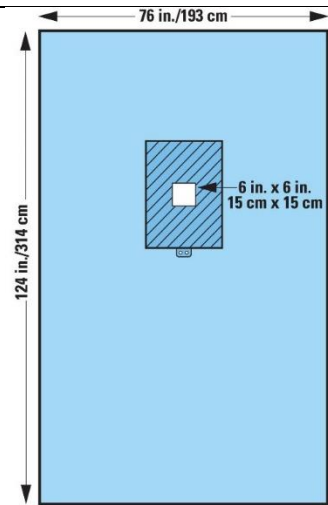


**89222**

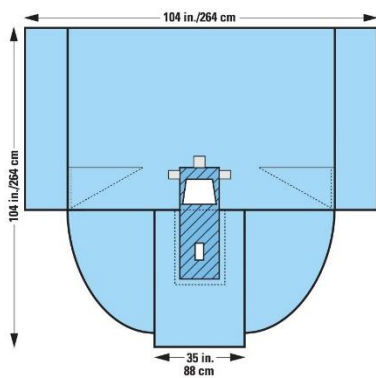


**89221**

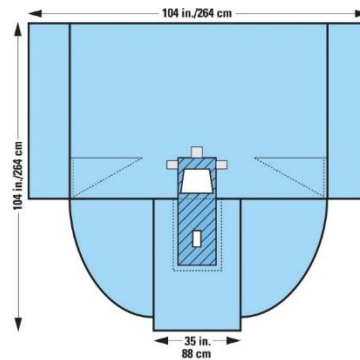

**89224**

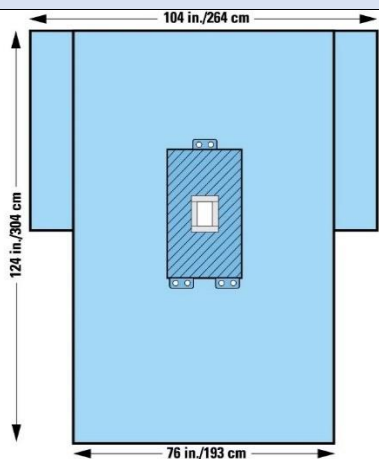


**89225**

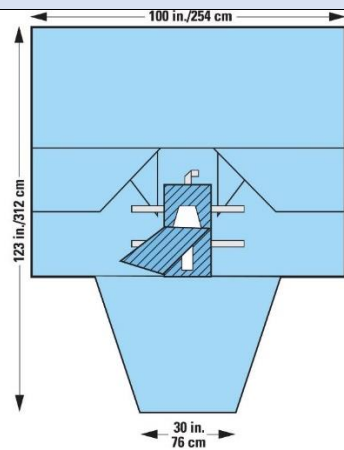


**89236**




# Instrução de Uso

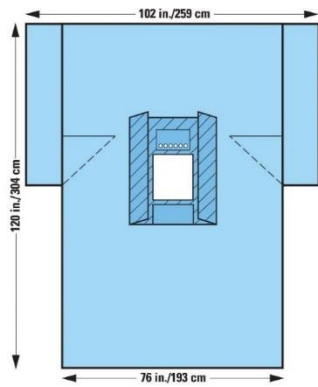


**89228**

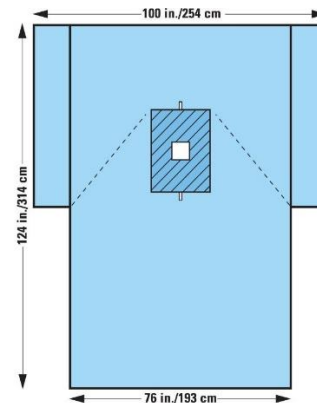


**89241**

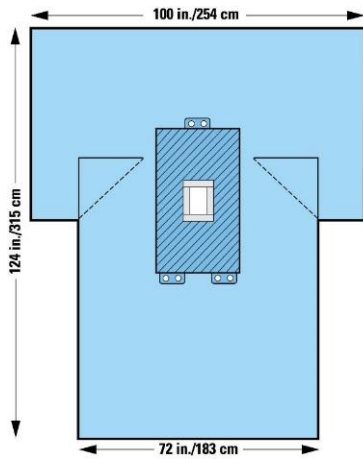


**89251**

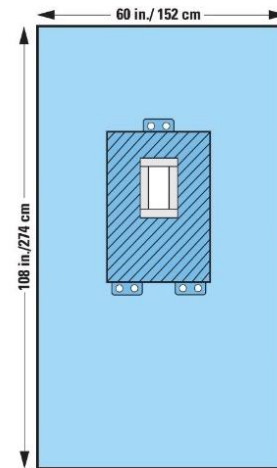

**89272**

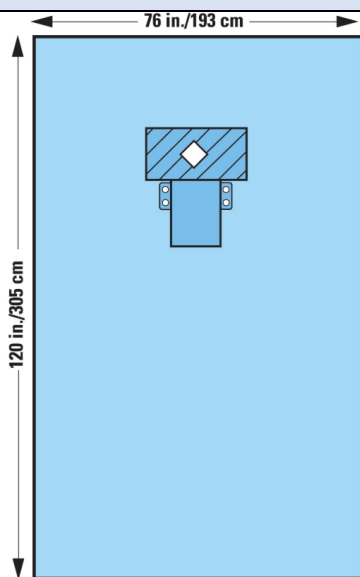

**89271**

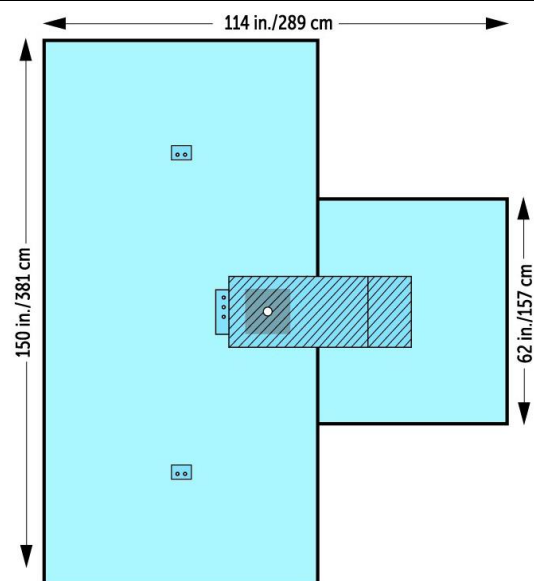


**89274**







# Instrução de Uso

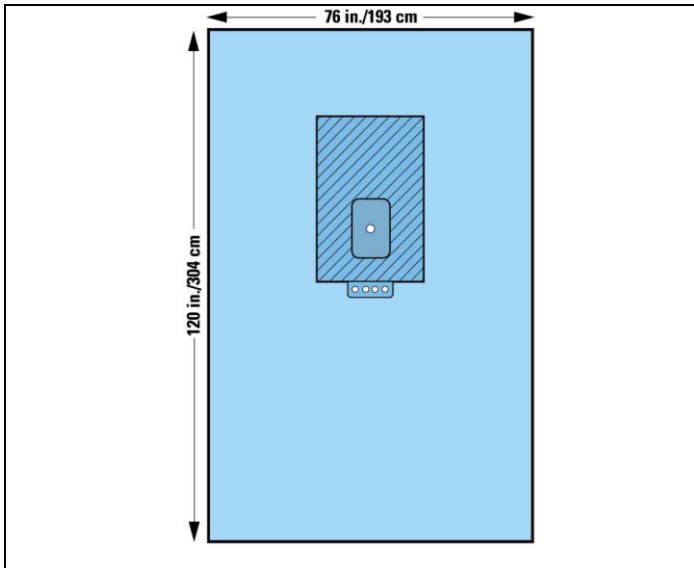


**89276**

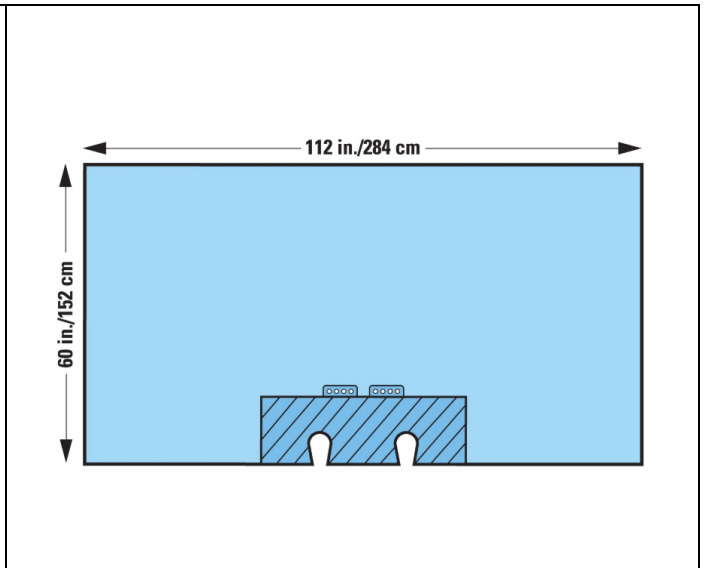


**89279**

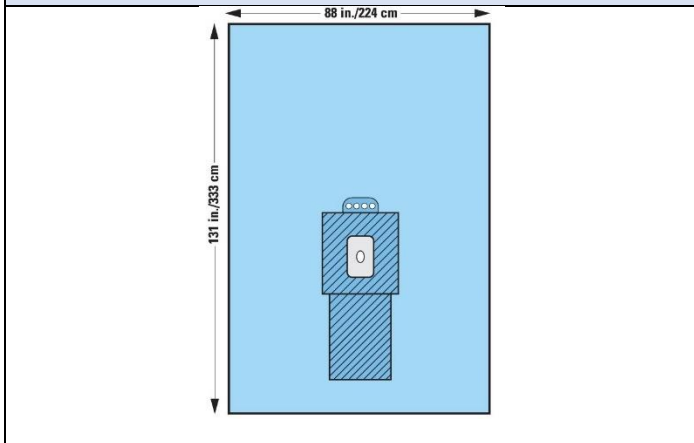


**89278**

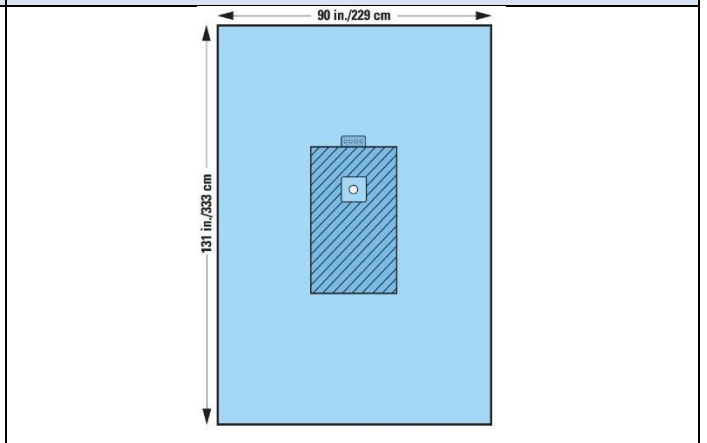

**89281**

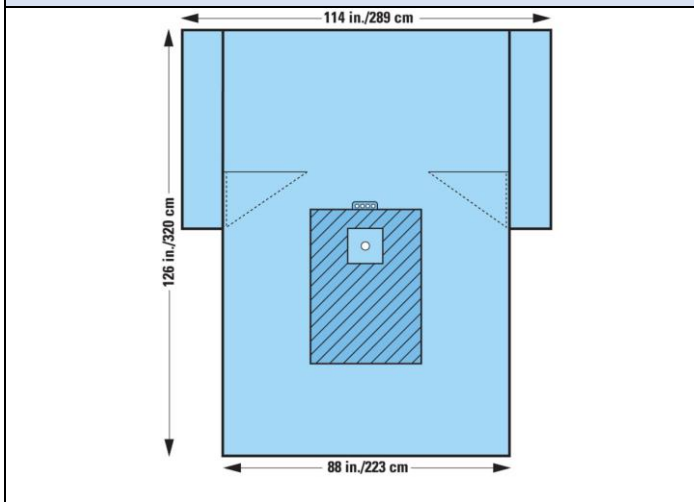


**89282**

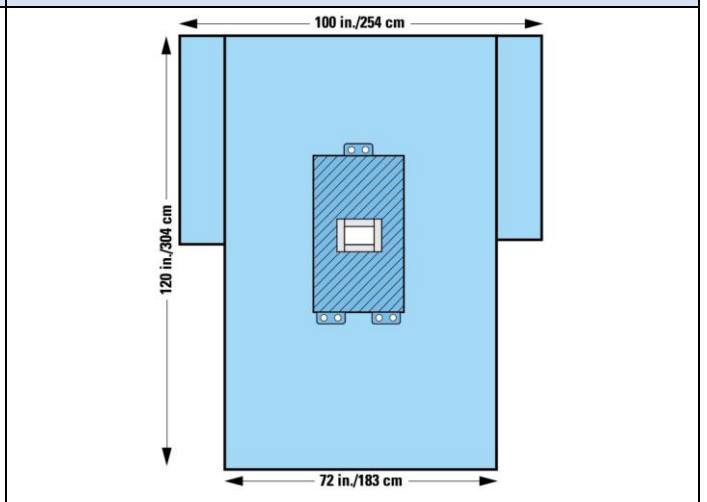


**89301**




# Instrução de Uso

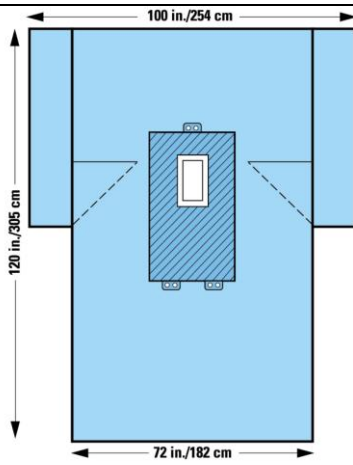


**89291**

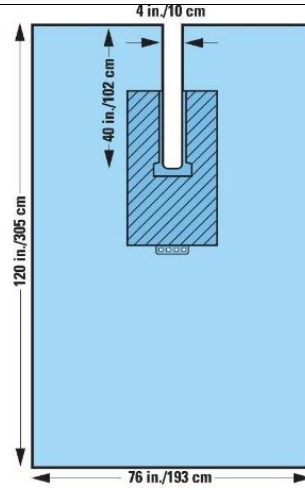


**89346**

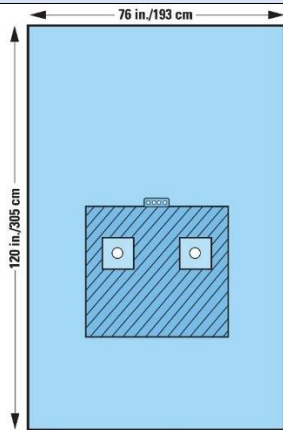


**89347**

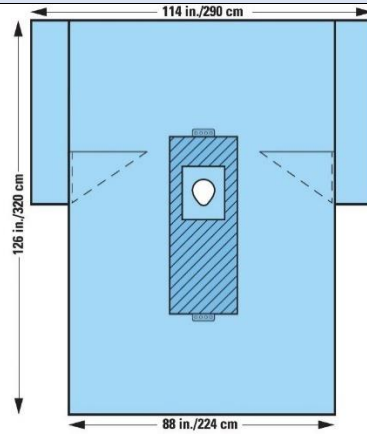

**89452**

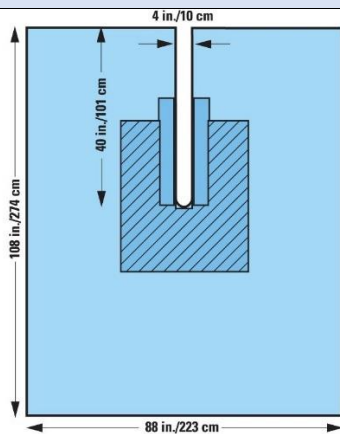


**89348**

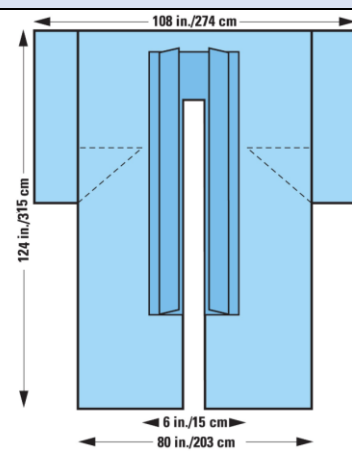


**89466**




# Instrução de Uso

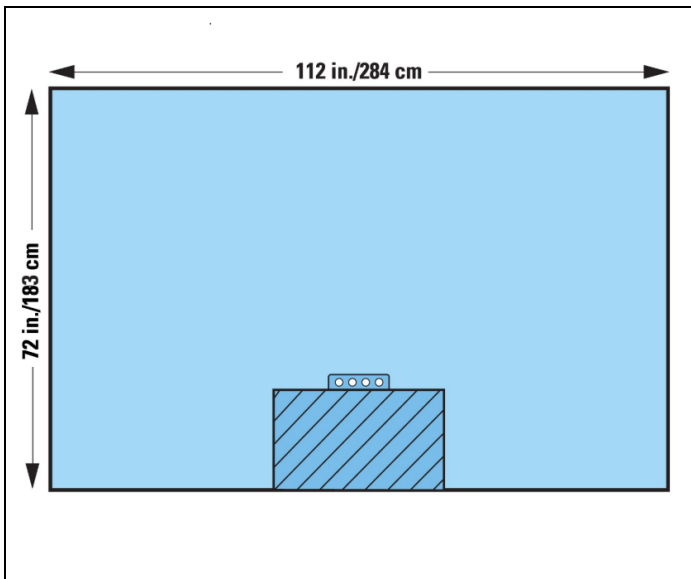


**89381**

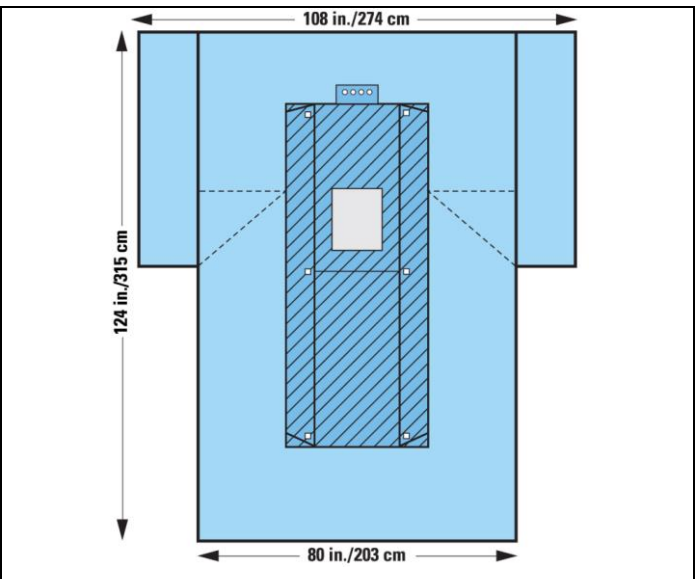


**89471**

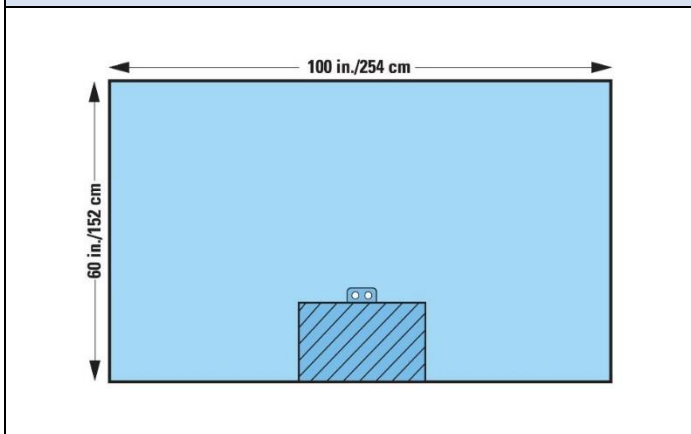


**89141**

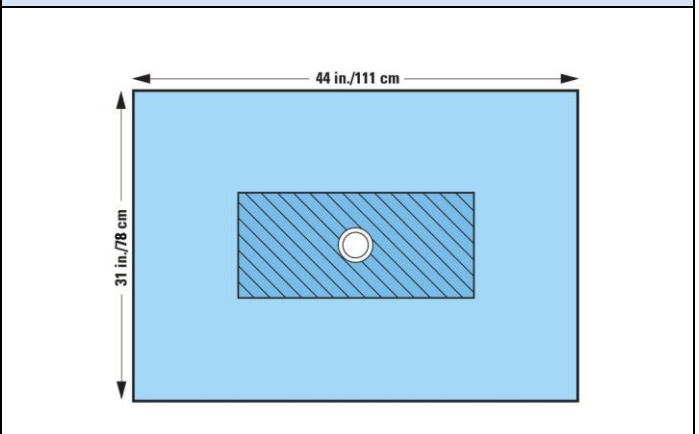

**89472**

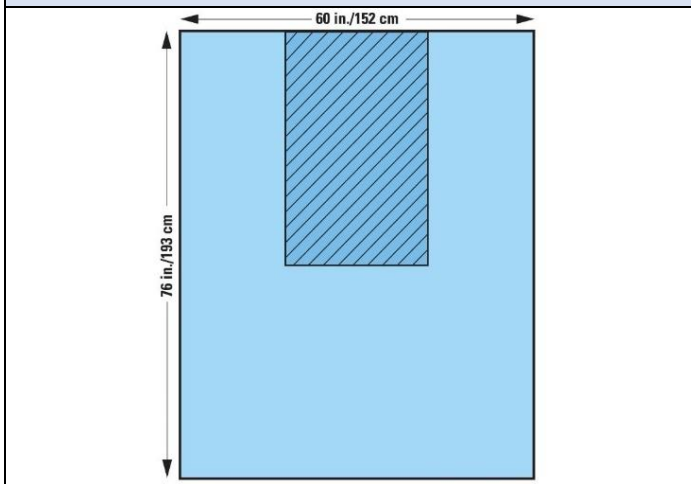


**89227**

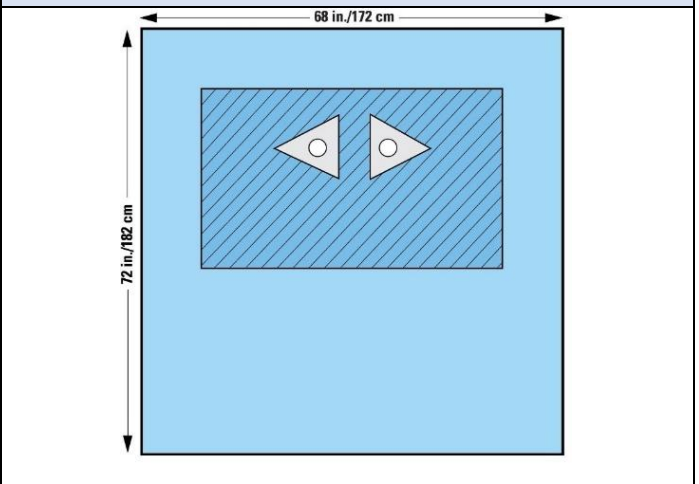


**89255**




# Instrução de Uso

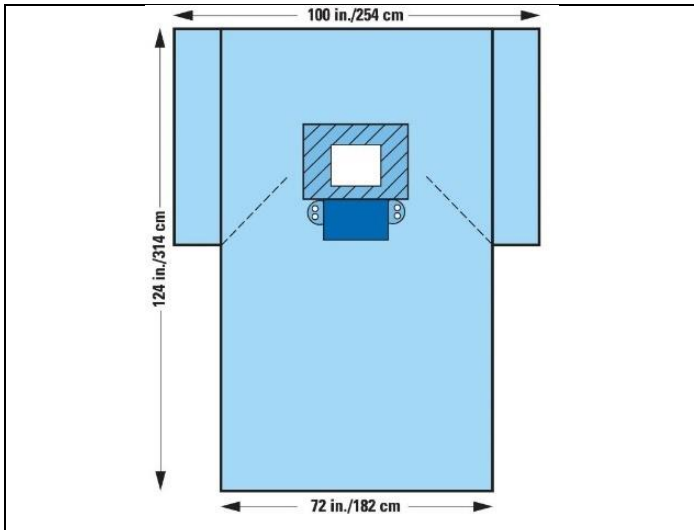


**89352**

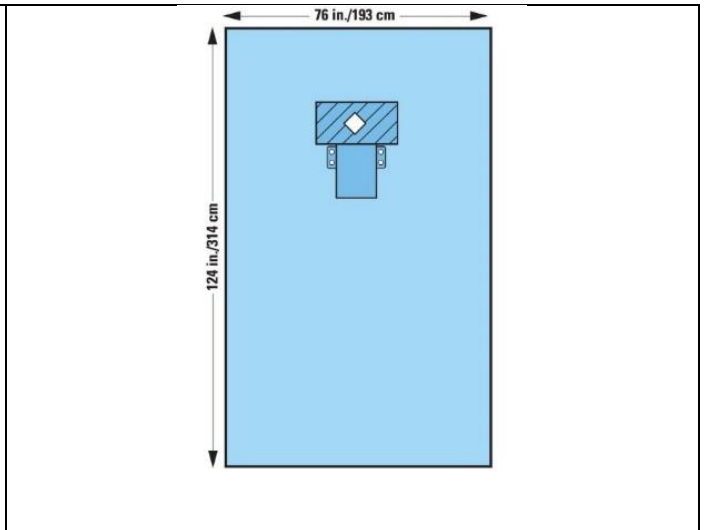


**89258**

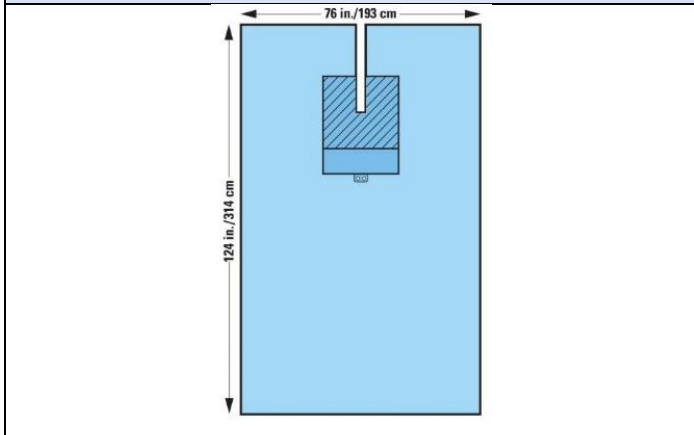


**89229**

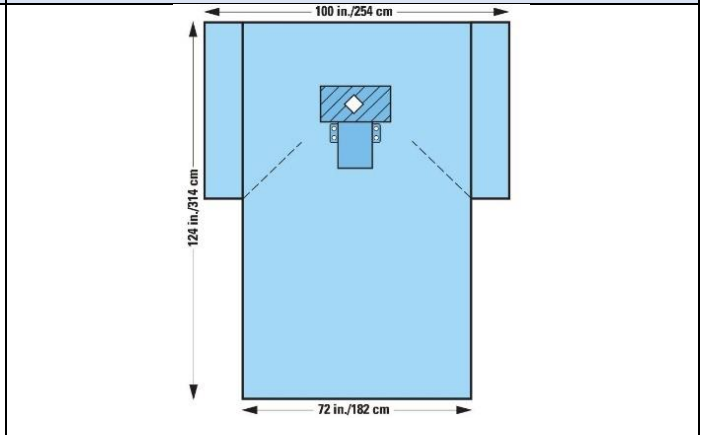

**89358**

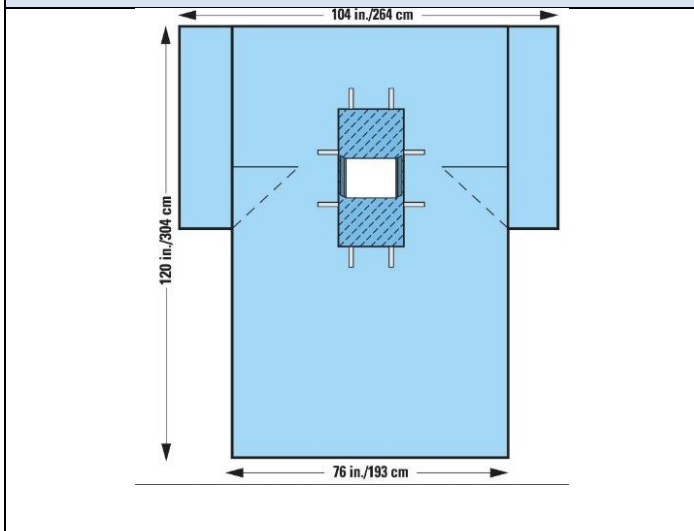


**89275**

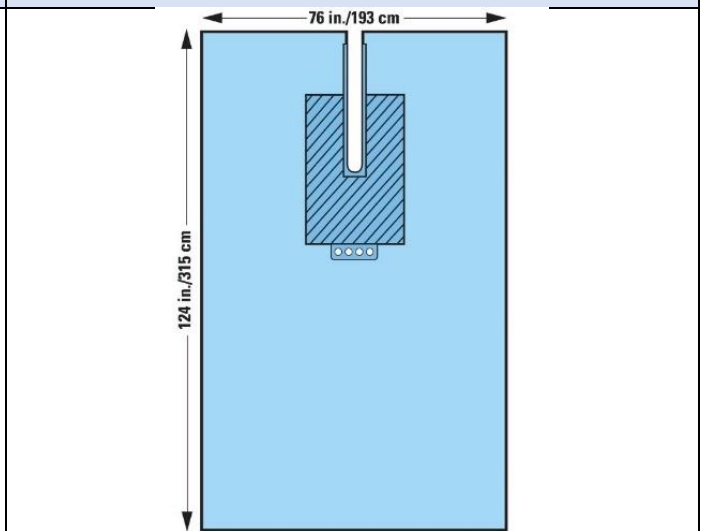

**89531**



## Instrução de Uso

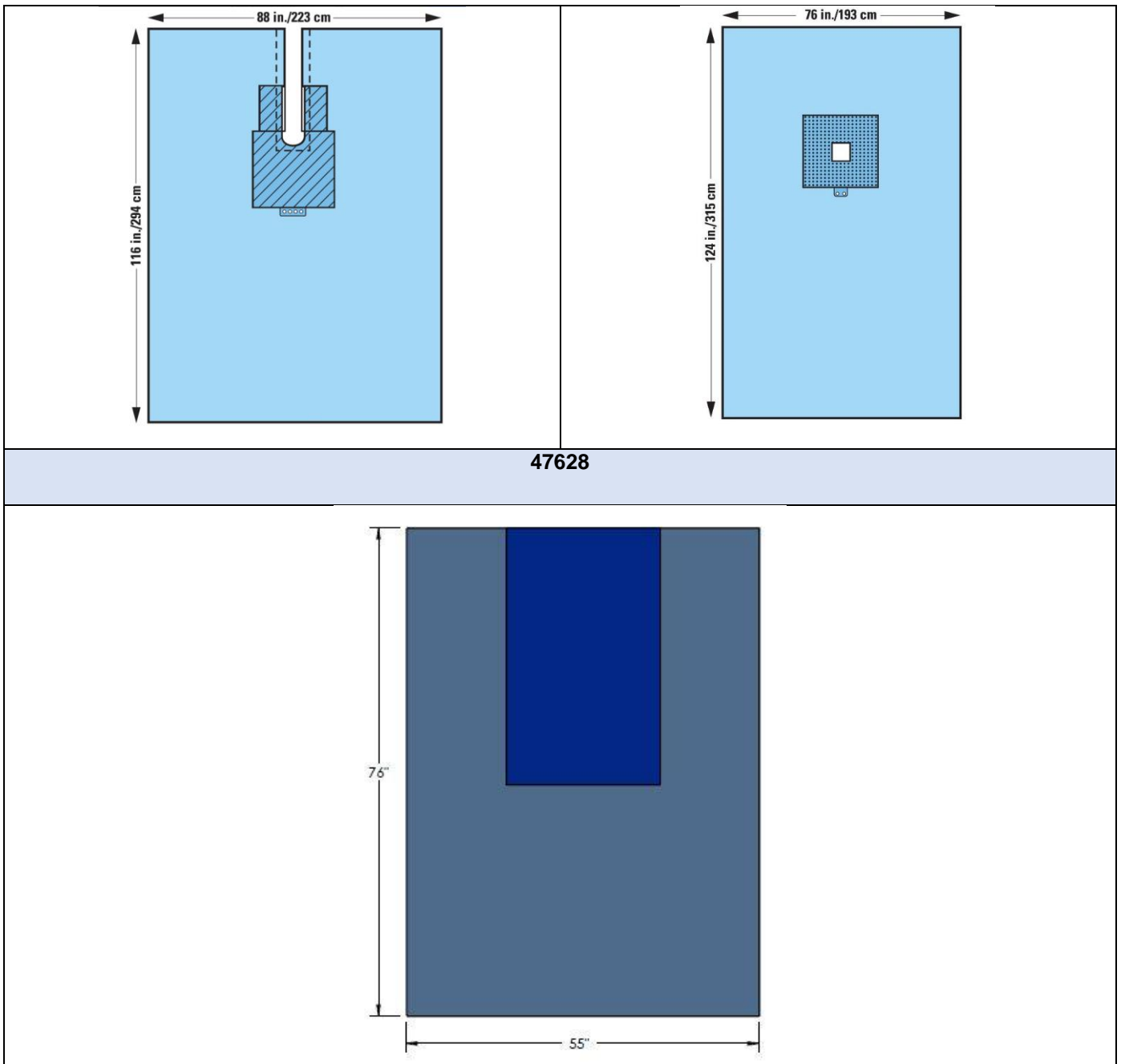**Conteúdo**

Os campos são fornecidos estéreis, embalados individualmente.

A embalagem primária é Tyvek\* ou Papel Grau Cirúrgico com Filme Plástico. A embalagem secundária, para transporte, é papelão – celulose.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUCCSMSR-H rev. 03

### **Descrição e Indicação**

Os campos cirúrgicos são destinados a proporcionar uma região estéril, limpa e seca, bem como proporcionar uma região isolada e livre de partículas ou líquidos para o cirurgião, paciente e ambiente cirúrgico garantindo assim uma área apropriada para a realização do procedimento cirúrgico.

### **Instruções de Uso**

- Remova o campo cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

### **Composição**

Campos em Não-Tecido SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) em 100% Polipropileno com Áreas de Reforço em Polietileno Laminado com Não-Tecido, Espuma de Polietileno.

Não contém látex.

Não contém DEHP.

### **Condições de Armazenamento**

- O produto deve ser conservado em sua embalagem original;
- Evitar sua exposição à luminosidade, umidade, altas temperaturas e partículas de pó;
- Os produtos devem ser acomodados em prateleiras suspensas ou em armários fechados;
- Cuidar para que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso, a fim de manter sua esterilidade.

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições de Manipulação**

Todos os componentes da embalagem devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUCCSMSR-H rev. 03

### **Advertências**

Proibido Reprocessar.

### **Precauções**

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

### **Contraindicações:**

Não aplicável.

**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

**Fabricante Responsável:** O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116