

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	Instrução de Uso	


Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Campo Descartável Estéril

Nome Comercial: Cobertura Descartável

Modelo e Especificações

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Dimensão</u>	<u>Quantidade por Caixa</u>
42226	Cobertura Descartável Padrão Mesa Auxiliar c/ Dobra Sanfonada 177 cm x 279 cm	70 in. x 110 in. / 177 cm x 279 cm	36
42224	Cobertura Descartável Padrão para Mesa Auxiliar 152 cm x 228 cm	60 in. x 90 in. / 152 cm x 228 cm	36
42301	Cobertura Descartável Padrão para Mesa Auxiliar 112 cm x 224 cm	44 in. x 88 in. / 112 cm x 224 cm	28
42217	Cobertura Descartável Padrão para Mesa Auxiliar 112 cm x 229 cm	44 in. x 90 in. / 112 cm x 229 cm	28
88666	Cobertura Descartável Mesa Auxiliar BASICS* com Área de Reforço 112 cm x 229 cm	44 in. x 90 in. / 112 cm x 229 cm	45
88665	Cobertura Descartável para Mesa Mayo BASICS* com Área de Reforço 58 cm x 137 cm	23 in. x 54 in. / 58 cm x 137 cm	80
88672	Cobertura Descartável Extra Grande Mesa Mayo BASICS*-Área Reforço 80cmx144cm	32 in. x 56 in. / 80 cm x 144 cm	65
89601	Cobertura Descartável para Mesa Mayo Reforçada 58 cm x 137 cm	23 in. x 54 in. / 58 cm x 137 cm	54
89602	Cobertura Descartável Extra Grande para Mesa Mayo Reforçada 76 cm x 127 cm	30 in. X 50 in. / 76 cm x 127 cm	44
42306	Cobertura Descartável Extra Resistente p/ Mesa Auxiliar 152 cm x 229 cm	60 in. x 90 in. / 152 cm x 229 cm	28
42309	Cobertura Descartável Extra Resistente p/ Mesa Auxiliar 177 cm x 279 cm	70 in. x 110 in. / 177 cm x 279 cm	15
29258	Cobertura Descartável Extra-Resistente Mesa Auxiliar Dobra Sanfonada 152cmx228cm	60 in. x 90 in. / 152 cm x 228 cm	20
29272	Cobertura Descartável Extra-Resistente Mesa Auxiliar Dobra Sanfonada 203cmx279cm	80 in x 110 in / 203 cm x 279 cm	16
89621	Cobertura Descartável Mesa cirúrgica tipo Varal 216 cmx193 cm/112 cmx152 cm	85 in. x 76 in / 44 in. X 60 in. / 216 cm x 193 cm / 112 cm x 152 cm	14
89641	Cobertura Descartável Mesa Cirúrgica tpo Varal 279cmx186cm/112cmx152cm Ex Grande	110 in. x 73.5 in / 44 in. X 60 in. / 279 cm x 186 cm / 112 cm x 152 cm	14
29329	Cobertura Descartável Transparente Equip Bolsa Circular Abertura Elástica 91x76cm	36 in. x 30 in. / 91 cm x 76 cm	25

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	<h2>Instrução de Uso</h2>	

29327	Cobertura Descartável Transparente para Arco em C 104 cm x 187 cm	41 in. x 74 in. / 104 cm x 187 cm	20
-------	---	-----------------------------------	----

Registro Anvisa: 81832580040

Reprocessamento Proibido.



Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

Fotos

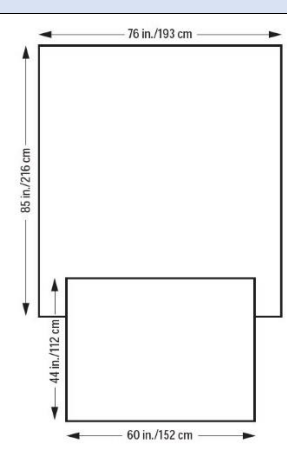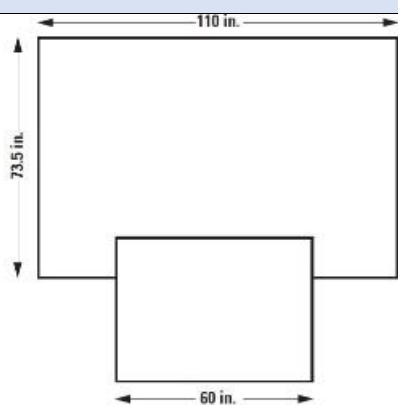


89621	89641
	
89602	89601




Instrução de Uso


IUCD-H
rev. 02

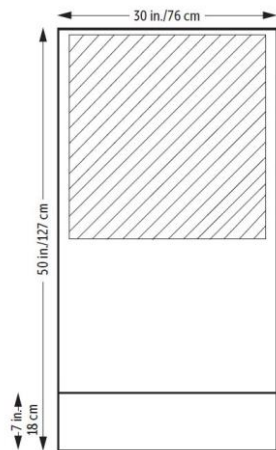


88666

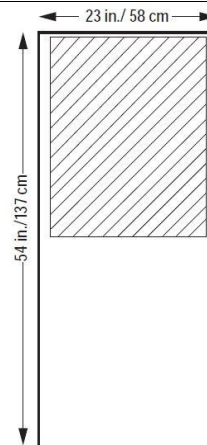


88672

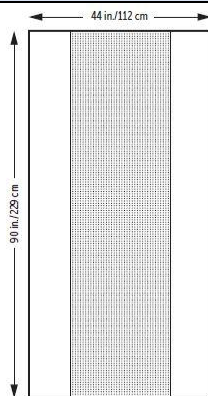


88665

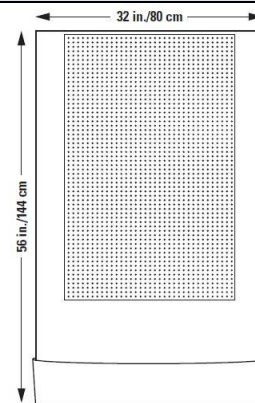

42309

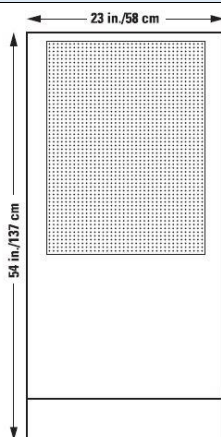

42301

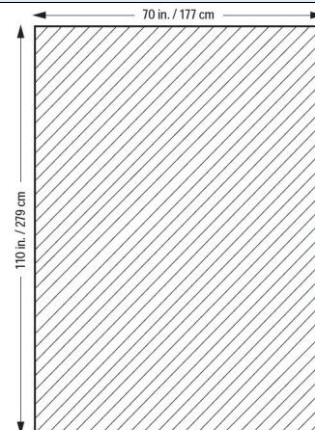


42306




Instrução de Uso


IUCD-H
rev. 02

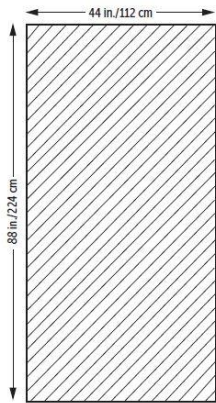


42226

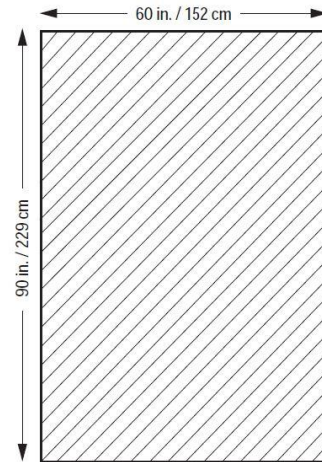


42217

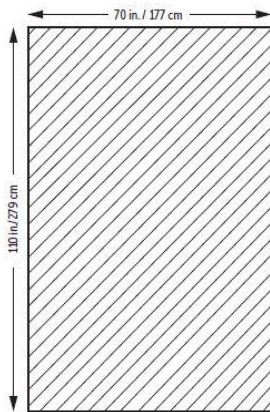


29327

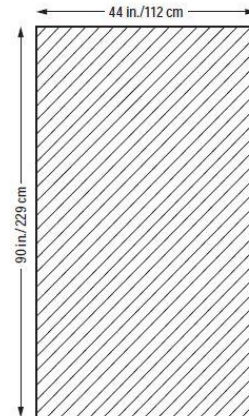

29329

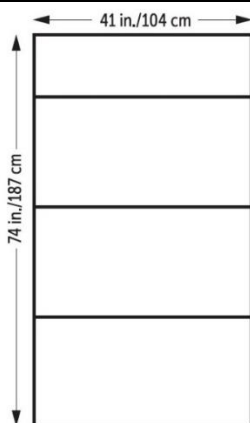


29272

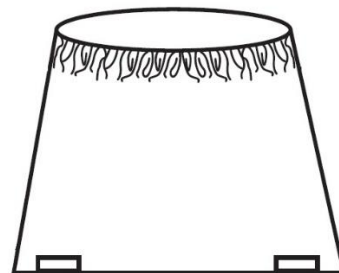

29258

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	<h2>Instrução de Uso</h2>	

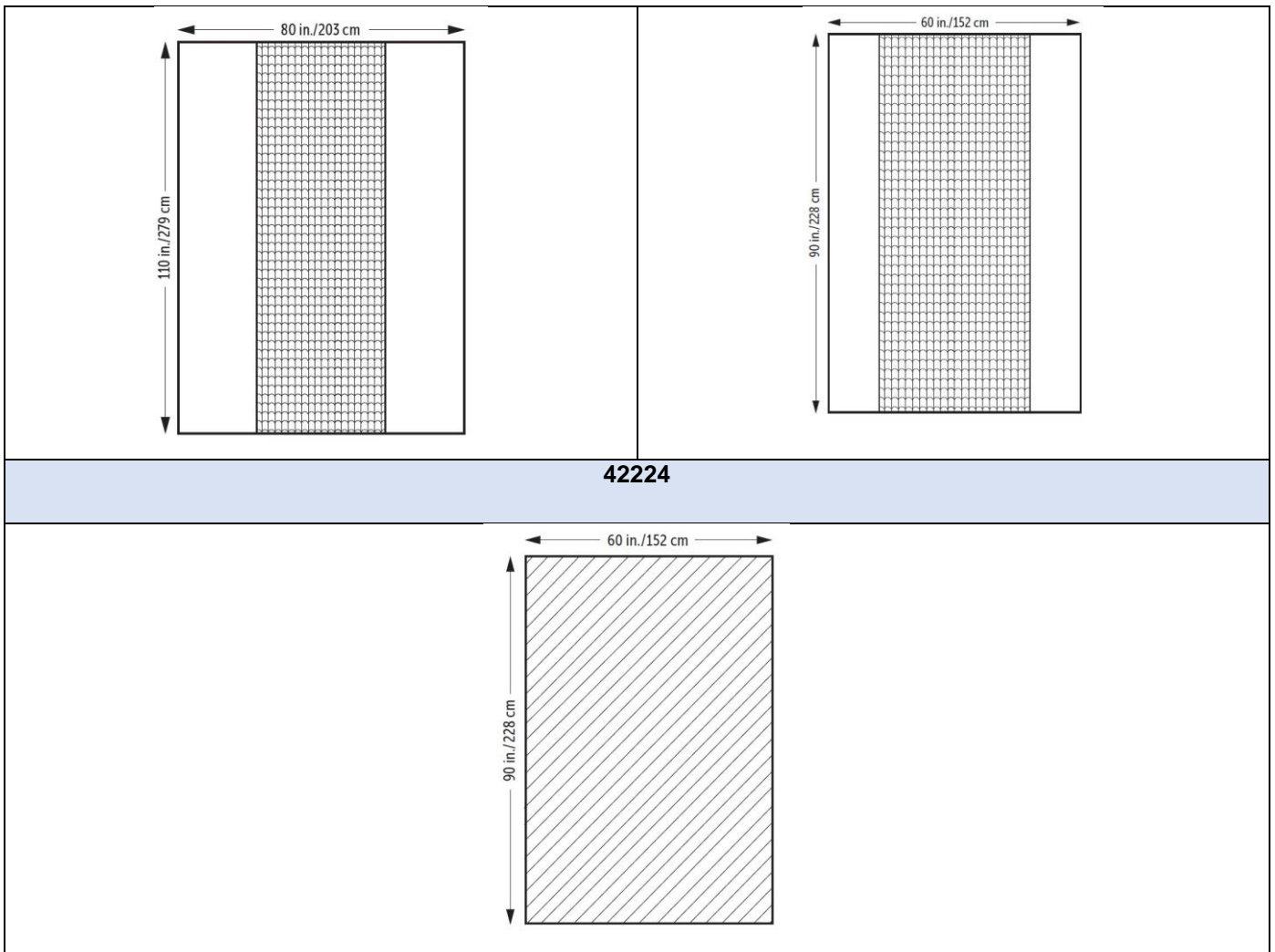

Conteúdo

As Coberturas Descartáveis são fornecidas estéreis, embaladas individualmente. A embalagem primária é Tyvek* ou Papel Grau Cirúrgico com Filme Plástico. A embalagem secundária, para transporte, é papelão – celulose.

Descrição e Indicação

As coberturas são usadas em ambiente cirúrgico para criar um campo estéril, cobrindo equipamentos não estéreis e / ou mesas com uma cobertura estéril. As coberturas são de uso único e são removidas após a conclusão do procedimento cirúrgico. Os elementos das coberturas incluem uma base de filme para barreira de fluidos e partículas e um revestimento de tecido como uma zona de aterragem para instrumentos cirúrgicos.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	Instrução de Uso	IUCD-H rev. 02

Coberturas de Equipamentos: são destinados ao uso nas configurações de cuidados de saúde para manter o ambiente estéril.

Cobertura de Mesa: fornece uma barreira estéril entre o conteúdo de uma embalagem cirúrgica e instrumentos cirúrgicos e a mesa traseira da sala de operação.

Instruções de Uso

- Remova a cobertura da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre a cobertura com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Não-Tecido (Polipropileno)

Filme Plástico de Polietileno

Não contém látex.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento


- O produto deve ser conservado em sua embalagem original;
- Evitar sua exposição à luminosidade, umidade, altas temperaturas e partículas de pó;
- Os produtos devem ser acomodados em prateleiras suspensas ou em armários fechados;
- Cuidar para que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso, a fim de manter sua esterilidade.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes da embalagem devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	Instrução de Uso	IUCD-H rev. 02

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd, Mechanicsville, Virginia - Estados Unidos da America 23116