



## Instrução de USO RDC185/01

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Cânula

Nome Comercial: Cânula das Vias Aéreas tipo Guedel Hudson RCI

Modelos: Cath-Guide (1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170 e 1171),  
Canal Duplo (1148,1149,1150,1151 e 1152).

Nº do Cadastro na ANVISA: 10342600007

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: Indeterminada

Embalagem: Unitária.

Pronto uso

Não estéril

### Fotos



### Indicação de Uso/Finalidade

A cânula de Guedel é utilizada nos procedimentos médicos auxiliares de ventilação e aeração diferencial forçada nos pacientes inconscientes. Ela evita a obstrução da orofaringe durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos.

No meio hospitalar é popularmente conhecida como "Chupeta", pois evita que o paciente morda a extremidade do tubo. Também denominada bloco de mordida.

### Componentes e Composição

Corpo da cânula: Polietileno de alta densidade e PVC.

Parte da mordida: Policarbonato.

Produto isento de látex.

**Instrução de USO RDC185/01**

Cath-Guide		
Código	Número	Tamanho
1165	12	120 mm
1166	11	110 mm
1167	10	100 mm
1164	9	90 mm
1168	8	80 mm
1169	7	70 mm
1170	6	60 mm
1171	5,5	55 mm

Duplo Canal		
Código	Número	Tamanho
1148	10	100 mm
1149	9	90 mm
1150	8	80 mm
1151	6	60 mm
1152	4	40 mm

**Condições de Armazenamento**

Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

**Condições para o Transporte**

Transportar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

**Condições de Manipulação**

Não há condições especiais para o uso do produto.

**Advertências**

- Proibido reprocessar.
- O procedimento é de forma simplificada, porém a utilização é uma prática clínica que não deve ser realizada por leigos

**Precauções**

- Certifique-se de que a embalagem esteja íntegra, sem danos ou rasgos. Caso apresente violação na embalagem, não utilize o produto.



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IUCGH-T  
rev.04

## Instrução de USO RDC185/01

### Contraindicações

- Este produto não é indicado em pacientes com queimaduras faciais.
- Este produto não é indicado para uso em tubos endotraqueais ou outro artifício de respiração.

**Importador/Distribuidor:** *CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares*

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Teleflex Medical Incorporated; 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, North Carolina 27560 - Estados Unidos da América