	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	Instrução de Uso	IUKAJB1-H rev. 02

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit para Artroscopia de Joelho BASICS I Halyard

Modelo

88886: Kit para Artroscopia de Joelho BASICS* I Halyard

Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura Mesa com Zona Reforçada	152 cm x 229 cm	1
Campo para Artroscopia de Joelho	229 cm x 315 cm	1
Campo Filme Impermeável	152 cm x 178 cm	1
Perneira Grande	30 cm x 122 cm	1
Cobertura Mesa Mayo com Zona Reforçada	58 cm x 137 cm	1


Registro Anvisa: 81832580026

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	<h1>Instrução de Uso</h1>	

Fotos

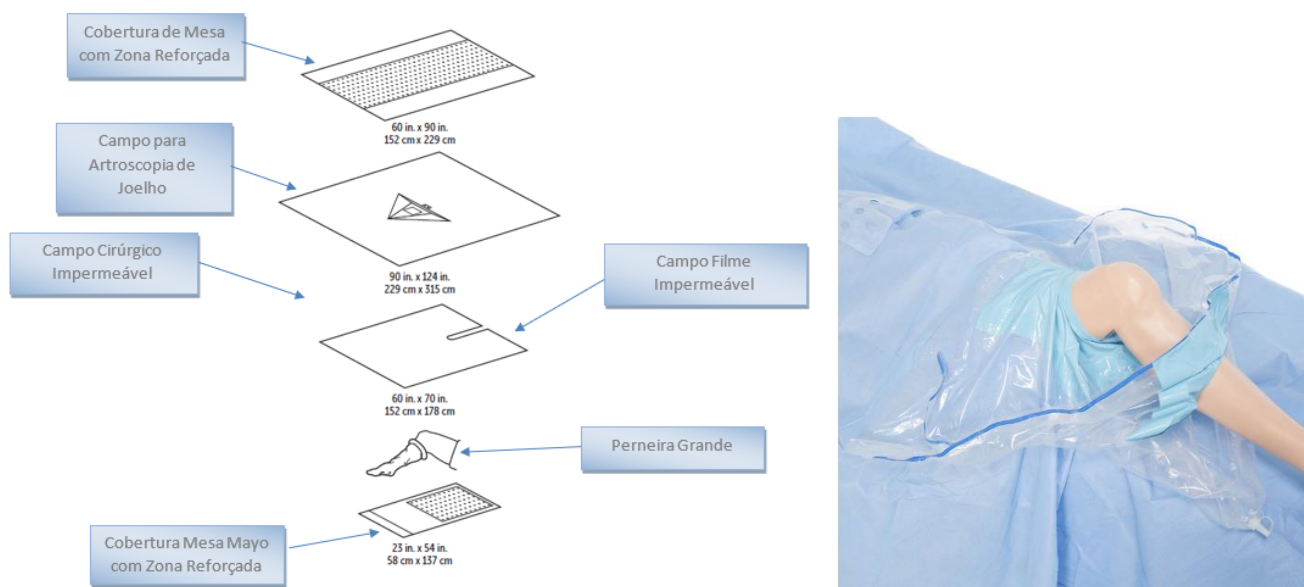

Conteúdo


Cada unidade do Kit é composta por: 01 Cobertura de Mesa com Zona Reforçada; 01 Campo para Artroscopia de Joelho, 01 Campo Filme Impermeável; 01 Perneira Grande e 01 Cobertura de Mesa Mayo com Zona Reforçada.

O Kit é embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e Filme Plástico ou Tyvek* e Filme Plástico. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de Polietileno contendo 05 unidades do Kit. E então, são acondicionados em caixa papelão para transporte.

Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Campos Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os campos cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	Instrução de Uso	IUKAJB1-H rev. 02

Instruções de Uso

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Cobertura Mesa c/ Zona Reforçada: Filme de Polietileno Laminado com Spunbond (Polipropileno)

Cobertura Mesa Mayo: Filme de Polietileno com Área de Absorção com Reforço em Spunbond (Polipropileno)

Campo para Artroscopia de Joelho: Filme e SMS (Polietileno e Polipropileno)

Campo Filme Impermeável: Filme de Polietileno

Perneira: Não-Tecido Elástico (Copolímeros) com SMS de Polipropileno.

Não contém látex.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

Proibido Reprocessar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jan/21
	Instrução de Uso	IUKAJB1-H rev. 02

Precauções

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd, Mechanicsville, Virginia - Estados Unidos da America 23116