

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUKBAJ-H rev. 00

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico BASICS* para Artroscopia de Joelho Halyard

Modelo

77910: Kit Cirúrgico BASICS* para Artroscopia de Joelho Halyard

Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa	152 cm x 229 cm	1
Campo para Artroscopia de Joelho com Bolsa	229 cm x 315 cm	1
Campo Filme Impermeável	152 cm x 178 cm	1
Cobertura Mesa Mayo	58 cm x 137 cm	1
Saco Descartável para Fios de Sutura	28 cm x 30 cm	1
Avental BASICS*	Grande	2
Toalha Absorvente	38 cm x 56 cm	2


Registro Anvisa: 81832580004

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<h1>Instrução de Uso</h1>	

Foto

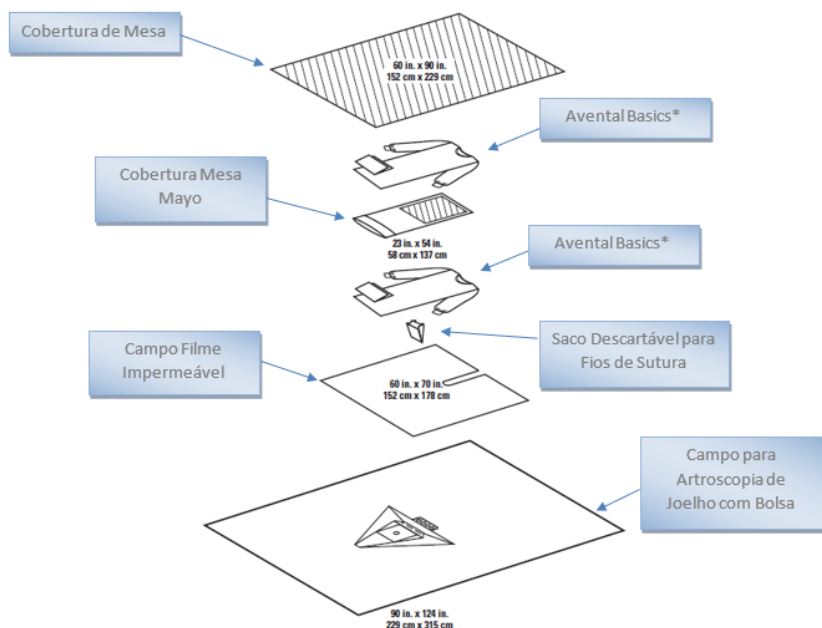

Conteúdo

Cada unidade do Kit é composta por: 01 Cobertura de Mesa, 01 Campo para Artroscopia de Joelho com Bolsa, 01 Campo Filme Impermeável, 01 Cobertura Mesa Mayo, 01 Saco Descartável para Fios de Sutura, 02 Aventais BASICS* e 02 Toalhas Absorventes.

O Kit é embalado individualmente em Filme Plástico e Papel Grau Cirúrgico ou Filme Plástico e Tyvek*. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de polietileno contendo 06 unidades do Kit. E então, são acondicionados em caixa papelão para transporte, contendo 01 bolsa com 06 Kit's.

Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Campos Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os campos cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

Instruções de Uso

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Os aventais devem ser desdobrados com cuidado. Os profissionais da sala de cirurgia deverão vesti-lo com cuidado, pois se trata de material estéril.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno laminado com Spunbond (Polipropileno)

Cobertura Mesa Mayo: Filme de Polietileno com área de absorção com reforço em Spunbond (Polipropileno)

Avental BASICS*: Não Tecido SMS (Polipropileno)

Toalha: Polpa de Celulose e Polímero (Polipropileno)

Saco de Sutura: Celulose

Campo Filme Impermeável: Filme de Polietileno

Campo para Artroscopia de Joelho com Bolsa: Não Tecido SMS (Polipropileno) + Filme Plástico de Polietileno

Não contém látex.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUKBAJ-H rev. 00

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América