

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUKCO1-H rev. 01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico Ortopédico I Halyard

Modelo

88411: Kit Cirúrgico Ortopédico I Halyard

Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa	111 cm x 229 cm	1
Campo Cirúrgico	152 cm x 254 cm	1
Campo Cirúrgico em U	223 cm x 274 cm	1
Campo Cirúrgico Impermeável	152 cm x 177 cm	1
Cobertura de Mesa Mayo	58 cm x 137 cm	1
Aventais Aero Chrome*	Extra-Grande	2
Toalhas Absorventes	38 cm x 56 cm	2
Saco Descartável para Suturas	28 cm x 30 cm	1


Registro Anvisa: 81832580007

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<h1>Instrução de Uso</h1>	


Fotos

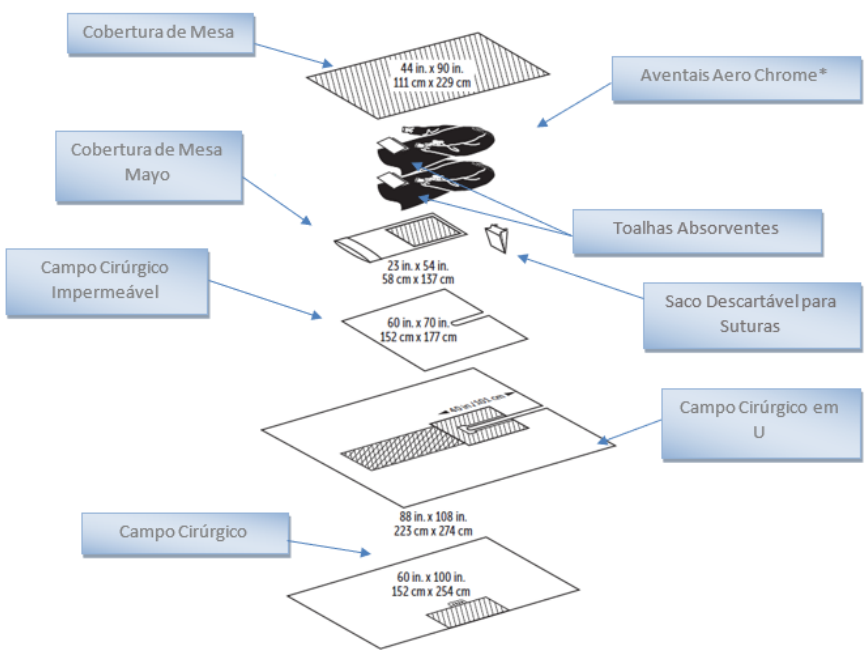

Conteúdo

Cada unidade do Kit é composta por: 01 Cobertura de Mesa; 01 Campo Cirúrgico; 01 Campo Cirúrgico em U; 01 Campo Cirúrgico Impermeável; 01 Cobertura de Mesa Mayo; 02 Aventais Aero Chrome*; 02 Toalhas Absorventes; 01 Saco Descartável para Suturas

O Kit é embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme plástico ou Tyvek e filme plástico. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de polietileno contendo 02 ou 03

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUKCO1-H rev. 01

unidades do Kit. E então, são acondicionados em caixa papelão para transporte, contendo 02 bolsas com 04 a 06 Kit's.

Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Campos Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os campos cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

Instruções de Uso

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Os aventais devem ser desdobrados com cuidado. Os profissionais da sala de cirurgia deverão vesti-lo com cuidado, pois se trata de material estéril.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno Laminado com Spunbond (Polipropileno)

Cobertura Mesa Mayo: Filme de Polietileno com área de absorção com reforço em Spunbond (Polipropileno)

Avental AeroChrome: Parte Posterior do Avental: SMS Polipropileno; Parte Frontal e Mangas: Laminado de Spunbond, Filme plástico de polietileno e não tecido de SMS

Toalha: Polpa Celulose e Polipropileno

Saco de Sutura: Celulose

Campo Cirúrgico e Campo Cirúrgico em U: Não Tecido SMS (Polipropileno) + Filme Plástico de Polietileno

Campo Impermeável: filme de polietileno

Não contém látex.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUKCO1-H rev. 01

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.


Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUKCO1-H rev. 01

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América