	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKOB3EI-H rev. 01

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico Ortopédico BASICS\* III – Extremidade Inferior Halyard

### Modelo

77911: Kit Cirúrgico Ortopédico BASICS\* III – Extremidade Inferior Halyard

### Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa	152 cm x 229 cm	1
Campo para Extremidade – Universal	229 cm x 315 cm	1
Campo Filme Impermeável	152 cm x 178 cm	1
Cobertura Mesa Mayo	58 cm x 137 cm	1
Avental BASICS*	Grande	2
Toalha Absorvente	38 cm x 56 cm	2
Saco Descartável para Fios de Sutura	28 cm x 30 cm	1

Registro Anvisa: 81832580017

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<h1>Instrução de Uso</h1>	

## Foto

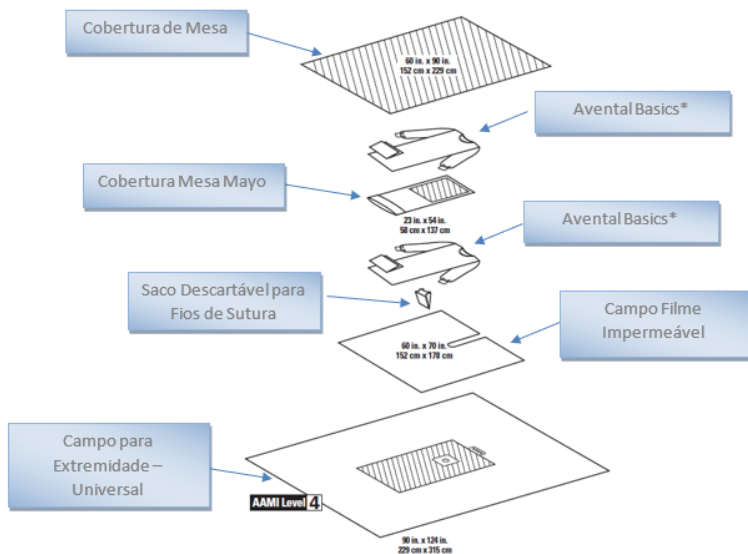

## Conteúdo

Cada unidade do Kit é composta por: 01 Cobertura de Mesa, 01 Campo para Extremidade – Universal, 01 Campo Filme Impermeável, 01 Cobertura Mesa Mayo, 02 Aventais BASICS\*, 02 Toalhas Absorventes e 01 Saco Descartável para Fios de Sutura.

O Kit é embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme plástico ou Tyvek e filme plástico. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de polietileno contendo 06 unidades do Kit. E então, são acondicionados em caixa papelão para transporte, contendo 01 bolsa com 06 Kit's.

## Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Kit's Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os kit's cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

## Instruções de Uso

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKOB3EI-H rev. 01

- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Os aventais devem ser desdobrados com cuidado. Os profissionais da sala de cirurgia deverão vesti-lo com cuidado, pois se trata de material estéril.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

### **Composição**

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno laminado com Spunbond (Polipropileno)

Cobertura Mesa Mayo: Filme de Polietileno com área de absorção com reforço em Spunbond (Polipropileno)

Avental BASICS\*: Não Tecido SMS (Polipropileno)

Toalha: Polpa de Celulose e Polímero (Polipropileno)

Saco de Sutura: Celulose

Campo Filme Impermeável: Filme de Polietileno

Campo para Extremidade – Universal: Não Tecido SMS (Polipropileno) com área de reforço (SMS + filme plástico)

Não contém látex.

Não contém DEHP.

### **Condições de Armazenamento**

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições de Manipulação**

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

### **Advertências**

Proibido Reprocessar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKOB3EI-H rev. 01

### **Precauções**

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

### **Contraindicações:**

Não aplicável.

**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

**Fabricante Responsável:** Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América