

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKOEI-H rev. 01

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico Ortopédico III – Extremidade Inferior Halyard

### Modelo

88431: Kit Cirúrgico Ortopédico III – Extremidade Inferior Halyard

### Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa	111 cm x 228 cm	1
Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável	Extra-Grande, Extra-Longo	1
Cobertura Mesa Mayo com Zona Reforçada	58 cm x 137 cm	1
Perneira Grande	30 cm x 122 cm	1
Campo Filme Impermeável	152 cm x 178 cm	1
Campo para Extremidade Inferior	223 cm x 332 cm	1
Toalha	38 cm x 56 cm	1
Fitas Adesivas	N/A	3


Registro Anvisa: 81832580015

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	

## Foto

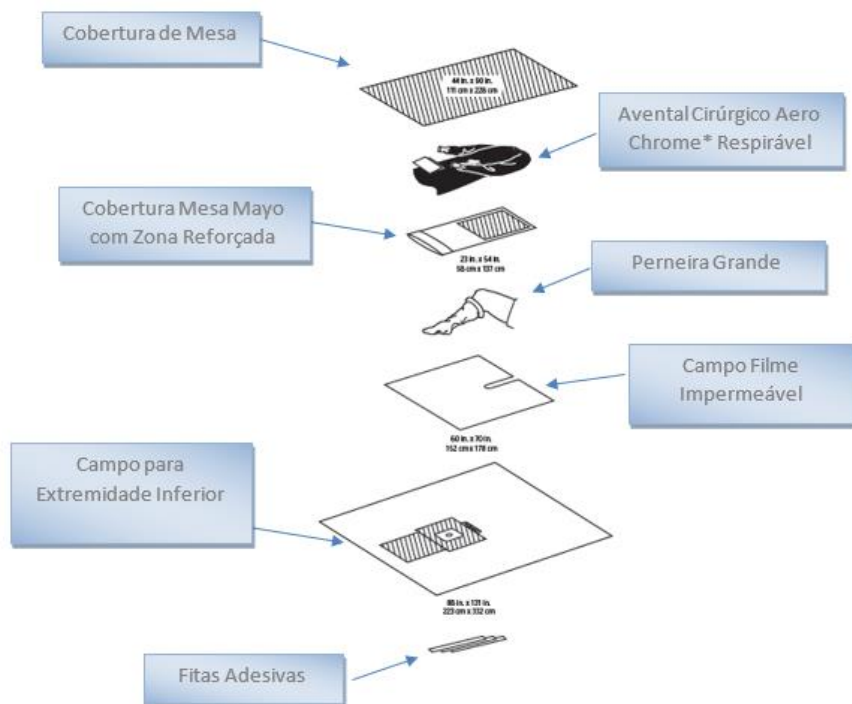

## Conteúdo

Cada unidade do Kit é composta por: 01 Cobertura de Mesa, 01 Avental Cirúrgico Aero Chrome\* Respirável, 01 Cobertura Mesa Mayo com Zona Reforçada, 01 Perneira Grande, 01 Campo Filme Impermeável, 01 Campo para Extremidade Inferior, 01 Toalha e 03 Fitas Adesivas.

Embalado individualmente em embalagem de Papel Grau Cirúrgico e filme plástico ou Tyvek e filme plástico. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de polietileno contendo 02 ou 03 unidades. E então, é acondicionado em caixa papelão para transporte, contendo 05 ou 06 unidades por caixa.

## Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Kit's Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os kit's cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	

### **Instruções de Uso**

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Os aventais devem ser desdobrados com cuidado. Os profissionais da sala de cirurgia deverão vesti-lo com cuidado, pois se trata de material estéril.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

### **Composição**

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno laminado com Spunbond (Polipropileno)

Cobertura Mesa Mayo com Zona Reforçada: Filme de Polietileno com área de absorção com reforço em Spunbond (Polipropileno)

Campo Filme Impermeável: Filme de Polietileno

Campo para Extremidade Inferior: Não Tecido SMS (Polipropileno) com área de reforço (SMS + filme plástico)

Perneira: Não-Tecido Elástico (Copolímeros) com SMS de Polipropileno

Avental Cirúrgico Aero Chrome\* Respirável: SMS + SFSMS (Polipropileno + Elastômero à Base de Propileno)

Toalha: Polpa de Celulose e Polímero (Polipropileno)

Fitas Adesivas: Poliéster

Não contém látex.


Não contém DEHP.

### **Condições de Armazenamento**

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKOEI-H rev. 01

### **Condições de Manipulação**

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

### **Advertências**

Proibido Reprocessar.

### **Precauções**

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

### **Contraindicações:**

Não aplicável.

### **Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

### **Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

### **Fabricante Responsável:** Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América