

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUKOVQ-H rev. 01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico Ortopédico V – Quadril Halyard

Modelo

88451: Kit Cirúrgico Ortopédico V – Quadril Halyard

Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa	152 cm x 228 cm	1
Campo para Quadril	294 cm x 223 cm x 332 cm	1
Campo Filme Impermeável	152 cm x 178 cm	1
Perneira Grande	30 cm x 122 cm	1
Campo Avulso	111 cm x 152 cm	1
Cobertura Mesa Mayo	58 cm x 137 cm	1
Saco Descartável para Fios de Sutura	28 cm x 30 cm	1
Ponteira de Aspiração Yankauer	N/A	1
Extensão de Aspiração	300 cm	1
Avental Cirúrgico Aero Chrome* Respirável	Extra-Grande	2
Avental Cirúrgico ULTRA	Grande	1
Toalha Absorvente	38 cm x 56 cm	3

Registro Anvisa: 81832580011

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<h1>Instrução de Uso</h1>	

Foto

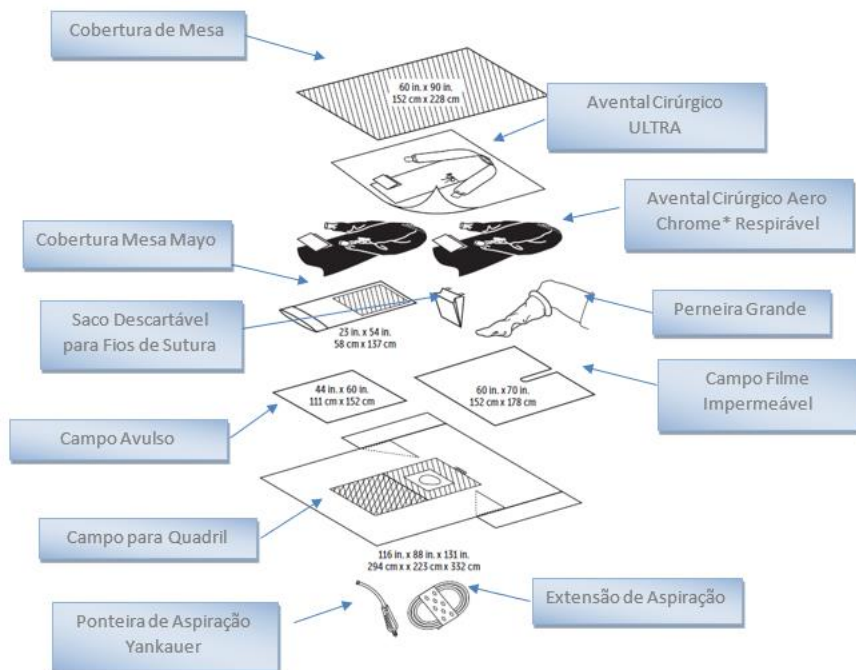

Conteúdo

Cada unidade do Kit é composta por: 01 Cobertura de Mesa, 01 Capô para Quadril, 01 Campo Filme Impermeável, 01 Perneira Grande, 01 Campo Avulso, 01 Cobertura de Mesa Mayo, 01 Saco Descartável para Fios de Sutura, 01 Ponteira de Aspiração Yankauer, 01 Extensão de Aspiração, 02 Aventais Cirúrgicos Aero Chrome* Respirável, 01 Avental Cirúrgico ULTRA e 03 Toalhas Absorventes.

Cada kit é embalado individualmente em embalagem Filme Plástico e Papel Grau Cirúrgico ou Filme Plástico e Tyvek*. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de polietileno contendo 01 ou 02 unidades. E então, é acondicionado em caixa papelão para transporte, contendo 02 bolsas (03 unidades por caixa).

Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Kit's Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os kit's cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUKOVQ-H rev. 01

Instruções de Uso

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Os aventais devem ser desdobrados com cuidado. Os profissionais da sala de cirurgia deverão vesti-lo com cuidado, pois se trata de material estéril.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno laminado com Spunbond (Polipropileno)

Cobertura Mesa Mayo: Filme de Polietileno com área de absorção com reforço em Spunbond (Polipropileno)

Campo Filme Impermeável: Filme de Polietileno

Campo Avulso: Não Tecido SMS (Polipropileno)

Campo para Quadril: Não Tecido SMS (Polipropileno) com área de reforço (SMS + filme plástico)

Perneira: Não-Tecido Elástico (Copolímeros) com SMS de Polipropileno

Avental ULTRA: SMS (Polipropileno)

Avental Aero Chrome: SMS + SFSMS (: SMS + SFSMS (Polipropileno + Elastômero à Base de Propileno)

Toalha: Polpa de Celulose e Polímero (Polipropileno)

Saco de Sutura: Celulose

Ponteira de Aspiração Yankauer: Copoliéster (Polietileno Tereftalato de Etileno Glicol)


Extensão de Aspiração: Policloreto de Vinila (PVC)

Não contém látex.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUKOVQ-H rev. 01

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América