



## Instrução de USO RDC185/01

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: lâminas para laringoscopia

Nome Comercial: Lâmina Descartável para Laringoscopia Comepa

**Modelos:** LSFMAC0; LSFMAC1; LSFMAC2; LSFMAC3; LSFMAC4; LSFMAC5;  
LSFMIL00; LSFMILO; LSFMIL1; LSFMIL2; LSFMIL3; LSFMIL4.

Nº do Cadastro na ANVISA: 10342600063

Fabricante Recomenda o Uso Único.

Prazo de Validade: 3 Anos

Embalagem: Unitária.

Não estéril

### Fotos

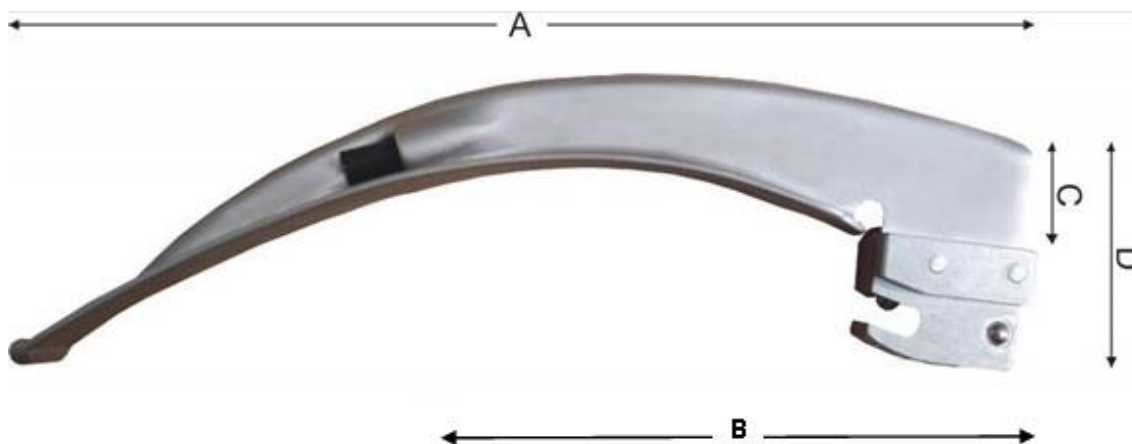


### Indicação de Uso/Finalidade

A Lâmina descartável para Laringoscopia Comepa é indicada para uso em conjunto com o cabo de laringoscópio (não objeto desse cadastro).

A Laringoscopia é um procedimento médico realizado para examinar e visualizar a via aérea do paciente e auxiliar na colocação do tubo traqueal durante as intubações, ressuscitação e alguns casos para exames da área da garganta.

Pode ser realizada para facilitar a intubação traqueal durante anestesia geral ou ressuscitação cardiopulmonar ou para procedimentos na laringe ou em outras partes da árvore superior traqueobronquial.

**Instrução de USO RDC185/01****Dimensões:**

Lâmina	Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Miller 00	LSFMIL00	68	27,3	11,6	31
Miller 0	LSFMIL0	80	29,5	11,6	31
Miller 1	LSFMIL1	102	45,75	12,7	32
Miller 2	LSFMIL2	153	76,5	13,6	33
Miller 3	LSFMIL3	195	111	13,6	33
Miller 4	LSFMIL4	205	123	15,6	35
Mac 0	LSFMAC0	80	15,25	14,5	34,5
Mac 1	LSFMAC1	95	57	14,6	34
Mac 2	LSFMAC2	105	67	14,6	34
Mac 3	LSFMAC3	135	90	14,6	34
Mac 4	LSFMAC4	155	110	15,50	36
Mac 5	LSFMAC5	175	128	17,5	37

**Componentes e Composição**

Corpo da lâmina: Aço inoxidável AISI 430

Condutor de luz: Acrílico

Revestimento do condutor de luz: Tubo de polietileno isolante

Base da Lâmina: Alumínio

Pino para travamento no cabo: Aço inoxidável AISI 430

**Condições de Armazenamento**

Armazenar em local seco, fresco e protegido da luz solar.



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IULDL-C  
rev.01

## Instrução de USO RDC185/01

### **Condições para o Transporte**

Transportar em local seco, fresco e protegido da luz solar.

### **Condições de Manipulação**

Este produto não possui manutenção.

### **Advertências/ Precauções**

- Não usar a lâmina se a embalagem estiver danificada.
- Este produto deve ser manipulado por profissional capacitado.
- Leia as instruções de uso antes de abrir a embalagem
- Manuseie com cuidado

**Importador/Distribuidor:** *CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares*

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: COMEPA INDUSTRIES 88 - Avenue du general de Gaulle - 93541 Bagnolet cedex – FRANÇA