

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Luvas Descartáveis

Nome Comercial: Luva Nitrílica Descartável AQUASOFT* Halyard

Modelo e Especificações Técnicas:

Código	Tamanho	Cor	Comprimento*	Largura da palma *	Espessura* Dedo do meio	Espessura* Palma	Quantidade por Dispenser	Quantidade por Caixa
43932	PP	Azul	242 mm	70 mm	0.08 mm	0.07 mm	300	3000
43933	P	Azul	242 mm	80 mm	0.08 mm	0.07 mm	300	3000
43934	M	Azul	242 mm	95 mm	0.08 mm	0.07 mm	300	3000
43935	G	Azul	242 mm	110 mm	0.08 mm	0.07 mm	300	3000
43936	GG	Azul	242 mm	120 mm	0.08 mm	0.07 mm	250	2500

Nível de qualidade aceitável (AQL) - Atende ou excede

Padrões de Teste ASTM D5151 Atende ou excede

Padrões de teste ASTM D6319 Atende ou excede

Padrão ISO de biocompatibilidade para irritação e sensibilidade primária da pele - Atende ou excede

Sem pó

Tipo de Ajuste: Ambidestro

Registro Anvisa: 81832580062

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 03 anos

Produto de Pronto Uso.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IULNA -H rev. 00

Fotos



Conteúdo

São acondicionadas em forma de dispenser e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte.

Descrição e Indicação

A Luva Nitrílica descartável AQUASOFT* Halyard é indicada para uso por profissionais da assistência à saúde em situações clínicas (procedimentos não cirúrgicos e/ou exames) onde existe a possibilidade de contato direto ou indireto com sangue, secreções, excreções, objetos visivelmente sujos com fluidos corporais; procedimentos que necessitam superior sensibilidade tátil; quando há exposição inesperada a produtos químicos e também para manipulação de medicamentos quimioterápicos.

As luvas não contêm pó, são texturizadas, ambidestras, fáceis de calçar e proporcionam aos usuários uma sensação de ajuste e conforto. mbidestras, possuem 9,5 polegadas de comprimento e cor azul.


Instruções de Uso

- Retirar a luva da caixa;
- Calçar a luva;
- Descartar após o uso.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	<h2>Instrução de Uso</h2>	

Instruções do Dispenser

- 1) As luvas são empilhadas de forma plana e inseridas na caixa do distribuidor de tamanho apropriado (consulte a Ilustração A).
- 2) Os dispensadores são selados nas abas das duas extremidades e colocados na caixa de transporte (orientação do dispensador de cartão conforme a Ilustração B).
- 3) Aplique duas etiquetas da caixa de remessa nos painéis adjacentes que incluem Código do produto, Número do lote, Data de fabricação e Data de vencimento. (veja a ilustração abaixo).
- 4) A caixa de remessa está selada. As caixas de remessa seladas são colocadas no palete.

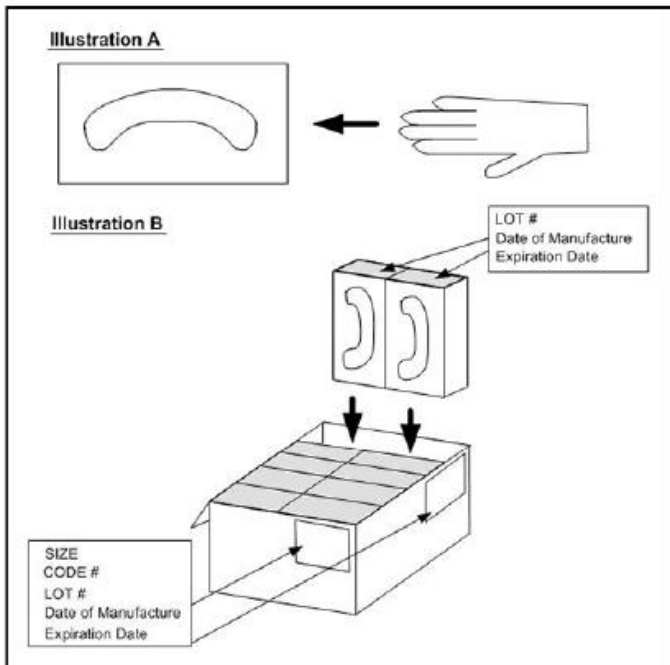


Composição

Nitrila.

Condições de Armazenamento

Armazene em local seco e fresco, longe de fontes intensas de calor.

Mantenha o máximo possível em sua caixa de remessa. A caixa aberta deve ser protegida contra a exposição à luz solar direta, luz artificial intensa, máquinas de raio-x e outras fontes de ozônio.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IULNA -H rev. 00

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

- Proibido Reprocessar
- Não utilizar com os quimioterápicos Carmustine, ThioTEPA.

Precauções

— Cuidados: As condições de teste utilizadas destinam-se a aproximar as piores condições para uso clínico. O teste foi realizado em material de luva de camada única. É de responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade dessas luvas para o uso pretendido com medicamentos quimioterápicos. As luvas usadas para proteção contra a exposição a medicamentos de quimioterapia devem ser selecionadas especificamente para o tipo de produtos químicos utilizados. Revise as informações de segurança da bula do medicamento que está sendo usado para determinar o nível adequado de proteção.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.
CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -
CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IULNA -H rev. 00

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc
9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116