



Instrução de USO RDC185/01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Lâmina para Laringoscopia

Nome Comercial: Lâmina plástica descartável para laringoscopia Comepa

Modelos: LPMAC1; LPMAC2; LPMAC3; LPMAC4; LPMILO; LPMIL1; LPMIL2; LPMIL3.

Nº do Cadastro na ANVISA: 10342600065

Fabricante Recomenda o Uso Único.

Prazo de Validade: 3 Anos

Embalagem: Unitária.

Pronto uso

Não estéril

Fotos



Indicação de Uso/Finalidade

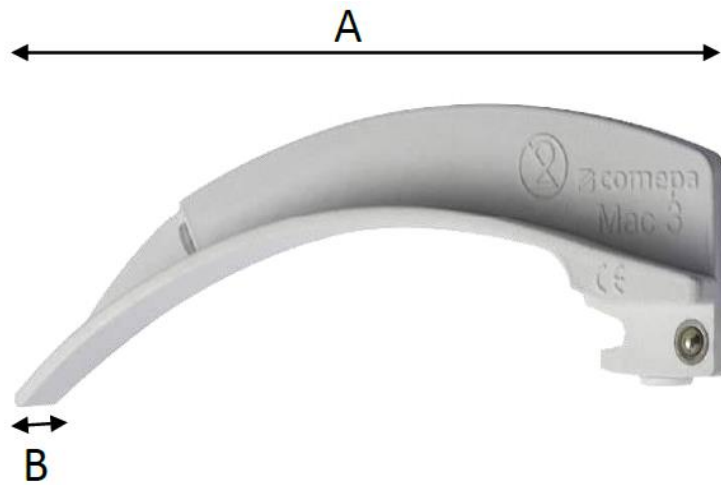
A Lâmina plástica descartável para Laringoscopia Comepa é indicada para uso em conjunto com o cabo de laringoscópio (não objeto desse cadastro).

A Laringoscopia é um procedimento médico realizado para examinar e visualizar a via aérea do paciente e auxiliar na colocação do tubo traqueal durante as intubações, ressuscitação e alguns casos para exames da área da garganta.

Pode ser realizada para facilitar a intubação traqueal durante anestesia geral ou ressuscitação cardiopulmonar ou para procedimentos na laringe ou em outras partes da árvore superior traqueobronquial.



Instrução de USO RDC185/01

Dimensões:

Lâmina	Código	A (mm)	B (mm)
Miller 0	LPMILO	80	11
Miller 1	LPMIL1	105	11
Miller 2	LPMIL2	155	13
Miller 3	LPMIL3	195	13
Mac 1	LPMAC1	90	10
Mac 2	LPMAC2	116	11
Mac 3	LPMAC3	133	14
Mac 4	LPMAC4	154	15,8

Componentes e Composição

Corpo da lâmina: fibra de vidro e nylon

Condutor de luz: Acrílico

Base da Lâmina: ABS

Pino para travamento no cabo: Aço inoxidável AISI 303/304

Condições de Armazenamento

Armazenar em local seco, fresco e protegido da luz solar.

Condições para o Transporte

Transportar em local seco, fresco e protegido da luz solar.



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IULPL-C
rev.01

Instrução de USO RDC185/01

Condições de Manipulação

Este produto não possui manutenção.

Advertências

- Não usar a lâmina se a embalagem estiver danificada.
- Este produto deve ser manipulado por profissional capacitado.
- Leia as instruções de uso antes de abrir a embalagem
- Manuseie com cuidado.

Precauções

- Não usar a lâmina se a embalagem estiver danificada.
- Este produto deve ser manipulado por profissional capacitado.
- Leia as instruções de uso antes de abrir a embalagem
- Manuseie com cuidado

Importador/Distribuidor: *CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares*

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: COMEPA INDUSTRIES 88 - Avenue du general de Gaulle - 93541 Bagnolet cedex – FRANÇA