



Instrução de USO RDC185/01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscaras

Nome Comercial: Máscaras para Aerossolterapia Hudson RCI

Modelos: 1075, 1076, 1080, 1083, 1084, 1085, 1095, 1385, 1388

Nº do Cadastro na ANVISA: 10342600044

O fabricante recomenda o uso único.

Prazo de Validade: Indeterminado.

Embalagem: Unitária.

Pronto uso

Não estéril

Fotos



1083



1084



1095



1075



Instrução de USO RDC185/01

Indicação de Uso/Finalidade

As máscaras de aerosolterapia são usadas em conjunto com nebulizadores para fornecer gás umidificado para os pacientes pois realiza a hidratação, mobilização e remoção da secreção ressecada, auxilia na melhora da função muco-ciliar e do mecanismo da tosse.

Indicado para os seguintes casos:

- Pacientes que necessitam de apoio à ventilação assistida com aerossol; Pacientes com via aérea artificial necessitam de um sistema artificial de umidificação;
- Pacientes com secreção espessa que tendem a desenvolver patologias;
- Durante o período de recuperação pós-extubação;
- Pacientes que serão submetidos a broncoscopia;
- Pacientes com patologias obstrutivas e inflamatórias.

Modo de Uso

- Conecte um tubo de suprimento de aerossol entre a máscara e a fonte de gás.
- Se houver indicação, um nebulizador pode ser conectado à entrada da máscara e a linha de suprimento pode ser conectada diretamente à fonte de gás.
- Ajuste o fluxo apropriado de gás e verifique se o fluxo está passando através da máscara.
- Coloque a máscara na face do paciente de modo que ela se ajuste adequadamente.
- Cuidadosamente, puxe o final das tiras até que a máscara esteja segura.

Componentes e Composição

Corpo da máscara: PVC

Tira elástica: vinil.

Tira de metal: Alumínio

Produto livre de látex

**Instrução de USO RDC185/01****Condições de Armazenamento**

Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

Condições para o Transporte

Transportar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

Condições de Manipulação

N/A

Advertências

- Siga corretamente as Instruções de Uso e técnicas seguras de procedimentos médicos.

Precauções

- Siga corretamente as Instruções de Uso e técnicas seguras de procedimentos médicos.
- Um bom ajuste da máscara facial à face do paciente é essencial. Ele evita vazamentos de gás sem que seja necessário exercer muita pressão à face do paciente.

Importador/Distribuidor: *CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares*

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Teleflex Medical; 2917 Week Drive, Research Triangle Park, NC 27709 – EUA.