	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUMCTLO-H rev. 01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscaras

Nome Comercial: Máscara Cirúrgica THE LITE ONE* Halyard

Modelo

48100 Máscara Cirúrgica THE LITE ONE* Halyard Azul com Tiras

48105 Máscara Cirúrgica THE LITE ONE* Halyard Verde com Tiras

62367 Máscara Cirúrgica THE LITE ONE* Halyard Branca com Tiras

Especificações Técnicas:

Estilo: Plissado

Indicação: Cirurgia

Resistente a Fluidos: Não

Proteção Fluida: Nenhuma

PFE - Eficiência de filtração de partículas (0,1 microns): $\geq 98\%$

BFE - Eficiência de filtração bacteriana (3 microns): $\geq 98\%$

Camadas de Proteção: 03

48100: Cor Azul com Tiras

48105: Cor Verde com Tiras

62367: Cor Branca com Tiras


Registro Anvisa: 81832580038

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem em forma de Dispenser

Produto de Pronto Uso.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

Fotos

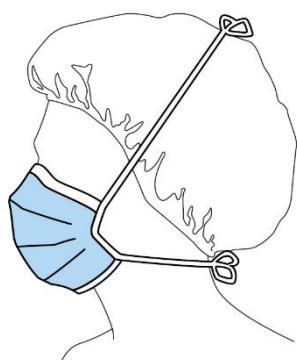

Conteúdo

São embaladas 50 unidades de máscaras em um dispenser de papel cartonado e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte contendo 300 unidades (6 dispensers).

Descrição e Indicação

As Máscaras Cirúrgicas Halyard destinam-se a ser usadas por profissionais de saúde em vários ambientes de cuidados de saúde, principalmente em cirurgias. Elas fornecem proteção facial básica.

Possui tiras para o fechamento, garantindo um bom ajuste quando devidamente vestidas.

Instruções de Uso

- Retire a máscara da caixa.
- Colocar a máscara com as mãos limpas.
- Sobreponha a máscara sobre a face.
- Molde o aro maleável. Ajustar ao perfil do rosto do usuário.
- Para os modelos com tiras, amarrar atrás da cabeça de forma que fique confortável, porém, não frouxo.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUMCTLO-H rev. 01

- Molde novamente o aro maleável para que ele se ajuste perfeitamente ao rosto.
- Posicione a máscara no rosto de maneira que a parte colorida fique voltada para a área exterior.
- Descartar após o uso.

OBS: A máscara facial deve ser usada com o lado colorido para fora.

Composição

Tecido de celulose, Polipropileno, Poliéster, Fio De Alumínio.

Não contém látex de borracha natural.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Manter em sua embalagem original.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação


Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

- Proibido Reprocessar
- Não deve ser usado quando for necessário resistência adicional ao fluido ou alto desempenho de filtração;
- Nenhuma máscara elimina completamente o risco de contaminação por sangue ou fluidos corporais.

Precauções

- Não deixe a máscara pendurada no pescoço;
- Não guarde a máscara usada no bolso;

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUMCTLO-H rev. 01

- Evitar tocar na máscara desnecessariamente durante o seu uso;
- Deve ser usada por um único indivíduo;
- Avaliar a utilização do produto caso o pacote esteja aberto, violado ou danificado.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América