

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUMD-H rev. 01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscaras

Nome Comercial: Máscara Descartável Halyard

Modelo

47147 Máscara Descartável Procedimento FLUIDSHIELD* Nível 3 Laranja com Visor e Elástico

00146 Máscara Descartável Procedimento FLUIDSHIELD* Nível 3 Azul com Visor e Elástico

47298 Máscara Descartável Procedimento FLUIDSHIELD* Nível 3 Ursinhos com Visor e Elástico

48247 Máscara Descartável Cirúrgica FLUIDSHIELD* Nível 3 Laranja com Visor e Tiras

Especificações Técnicas:

Estilo: Plissado

Forro: SO SOFT* (macio)

Tipo de Visor de Proteção: Visor Envolvente

Resistência a Embaçamento: Sistema de Não Embaçamento com Tira de Espuma

Resistente a Fluídos: Sim

Proteção contra Fluídos: Alta

ASTM F2100-11

Nível de Proteção ASTM 3

PFE - Eficiência de filtração de partículas (0,1 microns): $\geq 99\%$

BFE - Eficiência de filtração bacteriana (3 microns): $\geq 99\%$

Resistência ao Respingo: 160 mm Hg - ASTM F1862

16 CFR Parte 1610: Propagação da Chama = Classe 1

Indicação: Procedimentos

47147: cor laranja com elástico

00146: cor azul com elástico

47298: desenho de ursinhos com elástico

Indicação: Cirurgia

48247: cor laranja com tiras

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

Registro Anvisa: 81832580033

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem em forma de Dispenser


Produto de Pronto Uso.


Fotos

Máscara Descartável Procedimento FLUIDSHIELD*

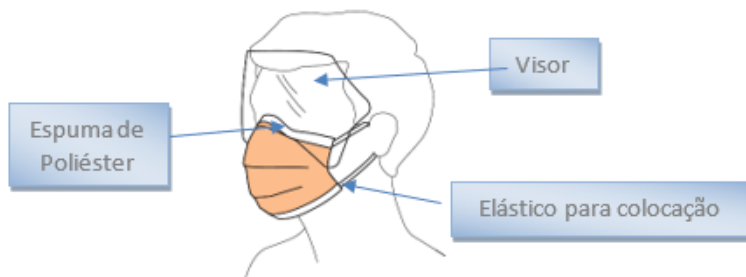

Máscara Descartável Cirúrgica FLUIDSHIELD*

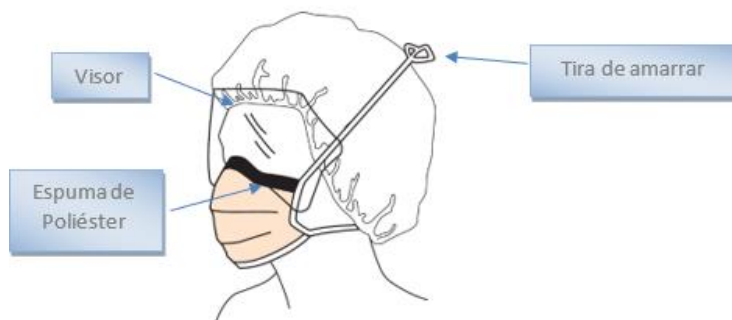

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUMD-H rev. 01



Conteúdo

São embaladas 25 unidades de máscaras em um dispenser de papel cartonado e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte contendo 100 unidades (04 dispensers).

Descrição e Indicação


As Máscaras Descartáveis Halyard destinam-se a ser usadas por profissionais de saúde e/ou pacientes em vários ambientes de cuidados de saúde. Elas fornecem proteção facial básica. Atende ao padrão ASTM F2100-11 Nível 3.

Possuem 04 camadas de barreira, que protegem o profissional contra fluidos (sangue e demais fluidos corporais) ainda mantendo um alto grau de respirabilidade.

Instruções de Uso

- Retire a máscara da caixa.
- Colocar a máscara com as mãos limpas.
- Sobreponha a máscara sobre a face.
- Molde o aro maleável. Ajustar ao perfil do rosto do usuário.
- Para os modelos com tiras, amarrar atrás da cabeça de forma que fique confortável, porém, não frouxo.
- Molde novamente o aro maleável para que ele se ajuste perfeitamente ao rosto.
- Posicione a máscara no rosto de maneira que a parte colorida fique voltada para a área exterior.
- Descartar após o uso.

OBS: A máscara facial deve ser usada com o lado colorido para fora.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUMD-H rev. 01

Composição

Máscara, Elástico e Tira: Tecido de Celulose, Polipropileno, Poliéster, Fio De Alumínio e Espuma de Poliéster.

Visor: Poliéster.

Não contém látex de borracha natural.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Manter em sua embalagem original.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

- Proibido Reprocessar
- Nenhuma máscara elimina completamente o risco de contaminação por sangue ou fluidos corporais.

Precauções

- Não deixe a máscara pendurada no pescoço;
- Não guarde a máscara usada no bolso;
- Evitar tocar na máscara desnecessariamente durante o seu uso;
- Deve ser usada por um único indivíduo;
- Avaliar a utilização do produto caso o pacote esteja aberto, violado ou danificado.

Contraindicações:

Não aplicável.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUMD-H rev. 01

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América