

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUMDEPB-H rev. 00

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscaras

Nome Comercial: Máscara Descartável com Elástico para Procedimento - BASICS* Halyard

Modelo e Especificações Técnicas:

47253 Máscara descartável com elástico para Procedimento - BASICS Azul

47254 Máscara descartável com elástico para Procedimento - BASICS Branca

BFE \geq 98%

$\Delta P < 40$ Pa / cm²

Limpeza microbiana \leq 30 ufc / g

Registro Anvisa: 81832580058

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos


Embalagem em forma de Dispenser

Produto de Pronto Uso.

Fotos



	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	

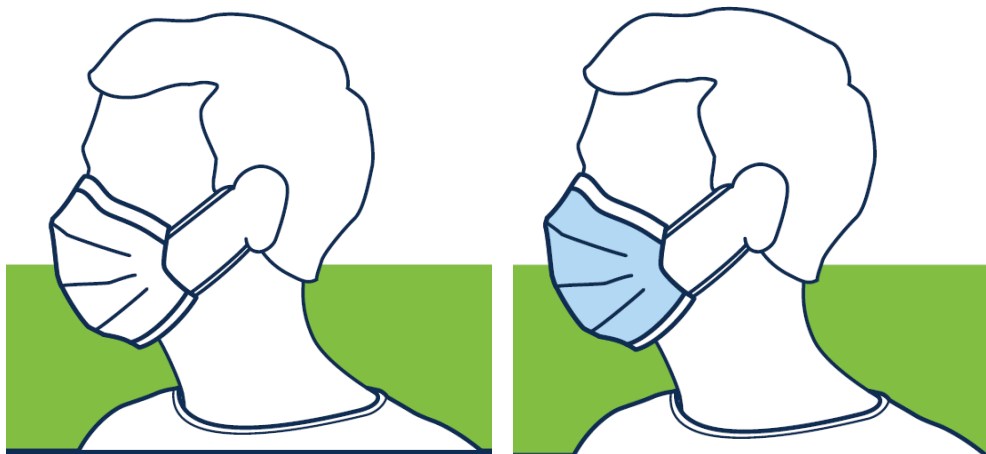

Conteúdo

São embaladas 50 unidades de máscaras em um dispenser de papel cartonado e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte contendo 300 unidades (6 dispensers).

Descrição e Indicação

As Máscaras descartáveis para Procedimento Halyard são indicadas para uso por profissionais de saúde e/ou pacientes em diferentes ambientes de cuidados com a finalidade de proteção facial básica.

Possuem elástico para facilitar o encaixe atrás das orelhas após serem vestidas.

Instruções de Uso

- Com as mãos limpas, retirar a máscara da caixa dispensadora.
- Colocar a máscara sobre a face do usuário.
- Moldar o aro maleável sobre o nariz e ajustar ao perfil do rosto.
- Encaixar as tiras elásticas atrás das orelhas.
- Descartar após o uso.

Composição

Spunbond, branco ou azul

Meltblown

Spunbond

Cabo de aço

Fita de poliuretano ou spunbond

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUMDEPB-H rev. 00

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta. Manter em sua embalagem original.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

- Proibido Reprocessar
- Não deve ser usado quando for necessário resistência adicional ao fluido ou alto desempenho de filtração;
- Nenhuma máscara elimina completamente o risco de contaminação por sangue ou fluidos corporais.

Precauções

- Não deixe a máscara pendurada no pescoço;
- Não guarde a máscara usada no bolso;
- Evitar tocar na máscara desnecessariamente durante o seu uso;
- Deve ser usada por um único indivíduo;
- Avaliar a utilização do produto caso o pacote esteja aberto, violado ou danificado


Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.
CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUMDEPB-H rev. 00

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116