

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscaras

Nome Comercial: Máscara de Procedimento Descartável Halyard

Modelo e

Especificações Técnicas:

Código	Cor	Quantidade por Dispenser	Quantidade por Caixa	PFE - Eficiência de filtração de partículas (0,1 micron)
47080	Azul	50	500	≥ 97%
47127	Branca com Desenhos Disney ®	75	750	≥ 94%
47359	Branca com Desenhos de Ursinhos I	75	750	≥ 97%
47295	Branca com Desenhos de Ursinhos II	50	500	≥ 97%
47090	Branca	50	500	≥ 97%
47085	Verde	50	500	≥ 97%
47117	Amarelo	50	500	≥ 97%
47095	Rosa	50	500	≥ 97%

Estilo: Plissado

Indicação: Procedimento

Resistente a Fluidos: Não

Proteção Fluida: Nenhuma

Camadas de Proteção: 03

Registro Anvisa: 81832580037

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem em forma de Dispenser

Produto de Pronto Uso.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	<h2>Instrução de Uso</h2>	

Fotos



Máscara de Procedimento
Descartável Halyard SO
SOFT*



Máscara de Procedimento
Descartável Halyard Pediátrica
SO SOFT* (Disney®)



Máscara de Procedimento
Descartável Halyard Pediátrica
SO SOFT* Ursinhos I e II

Conteúdo

Embalado em dispenser de papel cartonado e acondicionadas em caixa de papelão para transporte.

Descrição e Indicação

As Máscaras de Procedimento Descartável destinam-se a ser usadas por profissionais de saúde e/ou pacientes em vários ambientes de cuidados de saúde. Elas fornecem proteção facial básica. É apropriado para situações em que a exposição a sangue e / ou fluidos corporais não seja um risco.

Possuem elástico para fácil ajuste quando devidamente vestidas.

Instruções de Uso

- Retire a máscara da caixa.
- Colocar a máscara com as mãos limpas.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

- Sobreponha a máscara sobre a face.
- Molde o aro maleável. Ajustar ao perfil do rosto do usuário.
- Para os modelos com tiras, amarrar atrás da cabeça de forma que fique confortável, porém, não frouxo.
- Molde novamente o aro maleável para que ele se ajuste perfeitamente ao rosto.
- Posicione a máscara no rosto de maneira que a parte colorida fique voltada para a área exterior.
- Descartar após o uso.

OBS: A máscara facial deve ser usada com o lado colorido para fora.

Composição

Tecido de Celulose, Polipropileno, Poliéster, Fio De Alumínio.

Não contém látex de borracha natural.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Manter em sua embalagem original.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

- Proibido Reprocessar
- Não deve ser usado quando for necessário resistência adicional ao fluido ou alto desempenho de filtração;
- Nenhuma máscara elimina completamente o risco de contaminação por sangue ou fluidos corporais.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUMPD-H rev. 01

Precauções

- Não deixe a máscara pendurada no pescoço;
- Não guarde a máscara usada no bolso;
- Evitar tocar na máscara desnecessariamente durante o seu uso;
- Deve ser usada por um único indivíduo;
- Avaliar a utilização do produto caso o pacote esteja aberto, violado ou danificado.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América