



Instrução de USO RDC185/01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Nebulizador

Nome Comercial: Nebulizador Descartável de Pequeno Volume Micromist com bocal

Código do Fabricante: 1882

Nº de registro na ANVISA: 10342600062

Produto de reprocessamento proibido

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem: Unitária.

Pronto uso

Não estéril

Fotos



Indicação e Finalidade

A terapia com nebulizadores de pequeno volume é indicada para uso em hospitais e home care. Sua finalidade é o tratamento de obstrução da via aérea. A obstrução da via aérea é uma das causas mais comuns dos problemas respiratórios e pode ser consequência dos seguintes motivos:

- Doenças crônicas tais como asma, bronquite crônica e enfisema;
- Exposição à poluição ambiental em local de trabalho;
- Fumantes de longo prazo,
- Exposição à fumaça, fumos e outras substâncias nocivas presentes na atmosfera;



Instrução de USO RDC185/01

- Alergias, gripes, resfriados e pneumonia

Modo de Uso

- Coloque a solução prescrita no copo do nebulizador.
- Conecte a tampa do copo do nebulizador girando-a no sentido horário.
- Conecte o tubo de suprimento de O2 entre a fonte de gás e o nebulizador.
- Conecte o copo de nebulizador na máscara.
- Ajuste o fluxo de gás. Verifique visualmente o aparecimento de névoa. Caso necessário, dê uma leve batida no copo até que se inicie a nebulização.
- Coloque a máscara no paciente.
- Descartar após o uso.

Componentes e Composição

- Copo do nebulizador (Reservatório): Poliestireno
- Tampa do reservatório: Poliestireno
- Tubo de suprimento de O2 (2,10m): PVC
- Bocal: Polietileno

Condições de Armazenamento

Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

Condições para o Transporte

Transportar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

Condições de Manipulação

N/A

Advertências

N/A

Precauções



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IUNPBH-T
rev.02

Instrução de USO RDC185/01

Certifique-se que todas as conexões estão seguras.

Importador/Distribuidor: *CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares*

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Teleflex Medical - 2917 Week Drive Research Triangle Park, NC 27709 - EUA