

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Protetores

Nome Comercial: Protetor Facial Halyard Face Shield

Modelo e Especificações Técnicas:

Código	Descrição	Tamanho em polegadas	Tamanho em cm	Cor
41204	Protetor Facial Halyard Face Shield Grande	9.5	24,13	Transparente
41205	Protetor Facial Halyard Face Shield	7.5	19,05	Transparente


Registro Anvisa: 81832580066

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos

Produto de Pronto Uso.

Fotos

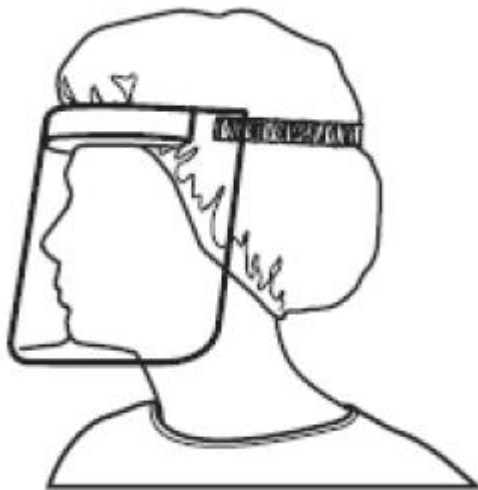

Conteúdo

São acondicionados em embalagem de polietileno contendo 40 unidades e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUPFFS -H rev. 01

Descrição e Indicação

O protetor facial foi projetado para uso por profissionais em ambientes e/ou durante procedimentos nos quais existem riscos de exposição ao sangue e/ou fluidos corporais por meio de respingos.

Pode ser usado com ou sem óculos de grau e óculos de proteção, pois possui propriedades antiembaçamento.

Instruções de Uso

- Retirar o protetor da embalagem;
- Colocar o protetor no rosto mantendo a parte de proteção em espuma sobre a testa;
- Passar a tira de ajuste por detrás da cabeça;
- Ajustar ao rosto
- Descartar após o uso.

Composição

- Retirar o protetor da embalagem;
- Colocar o protetor no rosto mantendo a parte de proteção em espuma sobre a testa;
- Passar a tira de ajuste por detrás da cabeça;
- Ajustar ao rosto
- Descartar após o uso.

Condições de Armazenamento

Armazene em local seco e fresco, longe de fontes intensas de calor.

Mantenha o máximo possível em sua caixa original.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUPFFS -H rev. 01

Advertências

- Proibido Reprocessar
- Não se destina a exposição direta e prolongada a produtos químicos.

Precauções

Não aplicável.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116