	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscaras

Nome Comercial: Respirador e Máscara Cirúrgica N95 com película - FLUIDSHIELD* 3 Halyard

Modelo e Especificações Técnicas:

Código	Tamanho	Largura Rosto cm	Altura cm	Largura Queixo cm	Cor
46767	Normal	25,4	9,65	7,6	Laranja
46867	Pequeno	21,6	8,9	6,3	Laranja

O filtro de partículas N95 (95% do nível de eficiência do filtro) é eficaz contra aerossóis em partículas sem óleo.

Cor: Laranja

Tipo: Respirador

Nível de Proteção: Nível 3

Resistencia a Fluídos: Sim

Nível de Proteção ASTM: Nível 3

BFE (3) \geq 99%

Resistência ao Respingo (80,120,160): 160

Eficiência de Filtração: 95%

PFE (.1) \geq 99%


Registro Anvisa: 81832580065

Reprocessamento Proibido.



Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem em forma de Dispenser

Produto de Pronto Uso.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	

Fotos

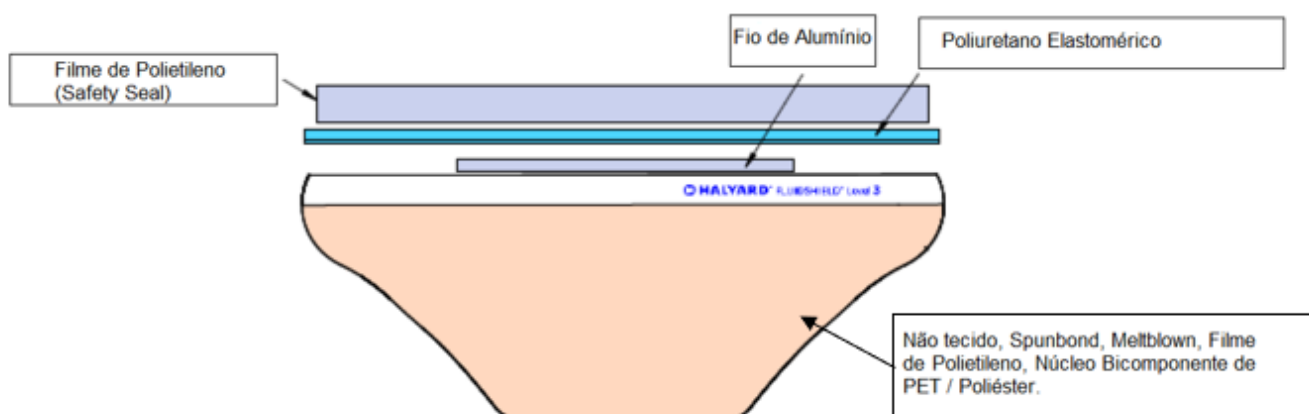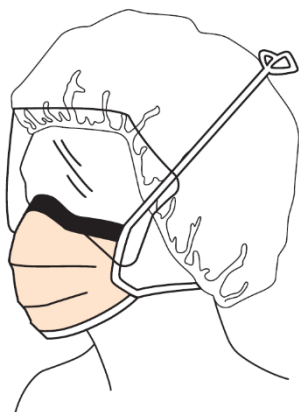

Conteúdo

São embaladas 35 unidades de máscaras em um dispenser de papel cartonado e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte contendo 210 unidades (6 dispensers).

Descrição e Indicação

Os Respiradores e Máscaras Cirúrgicas N95 com película são indicados para proteção contra a inalação de partículas sólidas e líquidas.

O Respirador e Máscara Cirúrgica N95 com película devem ser utilizados pelo pessoal da sala de operações e outros profissionais de saúde para proteger pacientes e profissionais de saúde da transferência de microrganismos, fluidos corporais e sanguíneos e materiais particulados transportados pelo ar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IURMN95P-H rev. 00

Este produto não elimina completamente o risco de contrair doenças ou infecções.

A máscara possui uma película transparente para evitar o embaçamento de óculos do profissional durante o uso.

Instruções de Uso

Instruções de aplicação

1. Retire o respirador/máscara da embalagem
2. Separe as bordas do respirador para abri-lo por completo.
3. Dobre levemente o ajuste do nariz como para formar uma curvatura.
4. Segure o respirador/máscara ao contrário para que os elásticos fiquem expostos.
5. Separe os dois elásticos com o indicador e o polegar.
6. Enquanto segura os elásticos com o indicador e o polegar, posicione o respirador/máscara abaixo do queixo.
7. Puxe os elásticos para cima sobre a cabeça.
8. Solte o elástico inferior dos polegares e coloque-o na base do pescoço.
9. Coloque o outro elástico na nuca.
10. Pressione o respirador/máscara firmemente com os dedos de forma a poder moldá-lo no nariz.
11. Continue a ajustar o respirador/máscara e mantenha as bordas seguras até sentir que tenha conseguido um bom ajuste facial. Agora, verifique se o respirador/máscara está bem ajustado.

Instruções de ajustamento:

- Utilize com o lado cor de laranja virado para fora.
- Siga as instruções de aplicação sempre que o respirador/máscara for utilizado.
- Verifique a aderência facial para garantir o ajustamento adequado antes de entrar em qualquer área contaminada.
- Ajuste bem ao nariz. Se verificar a saída de ar em volta do nariz:
- Reposicione os elásticos para assegurar a aderência facial em volta das extremidades do respirador/máscara.
- Não entre numa área contaminada se não puder obter uma aderência adequada. Siga todas as instruções e advertências sobre a utilização deste respirador/máscara, obtenha um ajustamento adequado e utilize-o durante todas as situações de exposição. Se não proceder

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IURMN95P-H rev. 00

deste modo, reduzirá a eficiência do respirador e a proteção do utilizador, o que pode resultar em doença ou morte.

Instruções de utilização:

1. Antes de utilizar, o profissional deve ser treinado sobre a utilização adequada do respirador/máscara, em conformidade com as normas aplicáveis de segurança e de higiene.
2. Se o respirador/máscara for danificado ou se sentir dificuldade em respirar, saia da área onde se encontra.
3. Descarte e substitua o respirador/máscara.

Composição

Não tecido, Spunbond - Polipropileno na cor Laranja

Meltblown - Polipropileno

Filme de Polietileno

Núcleo Bicomponente de PET / Poliéster

Não tecido, Spunbond - Polipropileno

Fio de Alumínio

Poliuretano Elastomérico

Não contém látex de borracha natural

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em temperatura entre -20°C e 30°C. Manter em local limpo, sem poeira, fresco, seco (com menos de 60% de umidade), longe de luz fluorescente ou ultravioleta e deve-se proteger do calor e da radioatividade.

Mantenha o máximo possível em sua embalagem original.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IURMN95P-H rev. 00

Advertências

— Proibido Reprocessar

Precauções

- Não deve ser usado em atmosferas que contenham menos de 19,5% de oxigênio;
- Não deve ser usado em atmosferas imediatamente perigosas para a vida ou a saúde;
- Não exceda as concentrações máximas de uso estabelecidas pelos padrões regulamentares;
- A não utilização adequada deste produto pode não alcançar os objetivos esperados

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116