

**Identificação do produto e Apresentação**

Nome Técnico: Geral

Nome Comercial: Superfície suporte tipo almofada Descartável

Modelos:

Código	Comprimento cm	Largura cm	Altura cm	Diâmetro cm	Quantidade por Caixa
LHP-100	26,67	27,94	22,86 - 25,4	-	08
UPSP100	22,86	20,32	16,51	-	10
AAR100	31,75	11,43	10,16	-	10
CR100	50,8	11,43	12,7	-	07
ATS100	48,26	33,02	16,51	-	03
IP100	50,8	43,18	12,7	-	03
CHC100	19,05	16,51	8,89	-	36
PD100	-	-	3,81	17,78	48
CLHP	26,67	27,94	22,86 - 25,4	-	08
AD09	-	-	5,08	22,86	36
FP100	43,18	-	-	12,07	10

Nº do Cadastro na ANVISA: 81832580046

Proibido Reprocessar

Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem: Unitária.

Pronto uso



Fotos

LHP-100	UPSP100
	
AAR100	CR100
	
ATS100	IP100
	
CHC100	PD100



CLHP



AD9



FP100





Conteúdo

Cada código é acondicionado e comercializado individualmente em embalagem plástica de polietileno.

Então, são acondicionados em caixa de papelão para transporte.

Indicação de Uso/Finalidade

As superfícies suporte tipo almofadas descartáveis são utilizadas para ajustar adequadamente o paciente em uma posição confortável durante uma variedade de procedimentos cirúrgicos, fornecendo uma alternativa superior a uso de toalhas enroladas, bandagens, cobertores, lençóis etc.

Modo de Uso

1. Selecione a almofada (superfície suporte) de acordo com o tipo de cirurgia e o posicionamento do paciente.
2. Retire o produto da embalagem e coloque-a sobre a mesa e em contato direto com o paciente.
3. Ajuste a almofada de modo que fique confortável ao paciente, sem que prejudique sua postura. Caso necessário, remova uma parte da espuma para que a altura da almofada se ajuste adequadamente a posição do paciente.
4. Certifique-se de que não exista nenhum tipo de material como lençóis, toalhas ou outro tipo de roupa de cama entre o paciente e a almofada (superfície suporte).
5. Após o término do procedimento a almofada deverá ser descartada.

Componentes e Composição

Espuma de poliuretano.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IUSAD-P

Instrução de USO RDC185/01

Rev. 00

Condições de Manipulação

A Superfície suporte tipo almofada deve ser descartada de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição.

Advertências

Não aplicável

Precauções

Não aplicável

Detentor do Registro: CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA – CNPJ: 27.242.576/0001-11 – Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 - Ipiranga – SP – CEP: 05208-001– Tel: (11) 23054285 – Resp. Técnica: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN-SP: 039.294.

Fabricante Legal: Prime Medical, LCC - 1410 E Weisgarber - Knoxville - TN - Estados Unidos da América 37909

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares
Rua Gama Cerqueira, 331 e 337 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP - Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br
Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian. CRF-SP:84.729