

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Embalagem para Esterilização

Nome Comercial: Sistema de Barreira Estéril de SMS

Modelos e Especificações


<u>Código</u>	<u>Nome Comercial</u>	<u>Gramatura em g/m²</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Cor</u>	<u>Forma de Apresentação</u>	<u>Quantidade por Caixa</u>
68012	Sequencial H200 30cm x 30cm (12in. x 12in.)	41	12in. x 12in. (30cm x 30cm)	Azul claro	500 folhas/pacote	1000 folhas/caixa
68018	Sequencial H200 45cm x 45cm (18in. 18in.)	41	18in. x 18in. (45cm x 45cm)	Azul claro	500 folhas/pacote	1000 folhas/caixa
68024	Sequencial H200 60cm x 60cm (24in. x 24in.)	41	24in. x 24in. (60cm x 60cm)	Azul claro	250 folhas/pacote	500 folhas/caixa
68030	Sequencial H200 76cm x 76cm (30in. x 30in.)	41	30in. x 30in. (76cm x 76cm)	Azul claro	100 folhas/pacote	300 folhas/caixa
68036	Sequencial H200 91cm x 91cm (36in. x 36in.)	41	36in. x 36in. (91cm x 91cm)	Azul claro	100 folhas/pacote	300 folhas/caixa
68040	Sequencial H200 101cm x 101cm (40in. x 40in.)	41	40in. x 40in. (101cm x 101cm)	Azul claro	50 folhas/pacote	250 folhas/caixa
68048	Sequencial H200 121cm x 121cm (48in. x 48in.)	41	48in. x 48in. (121cm x 121cm)	Azul claro	50 folhas/pacote	100 folhas/caixa
10824	Sequencial H300 60cm x 60cm (24in. x 24in.)	48	24in. x 24in. (60cm x 60cm)	Azul médio	250 folhas/pacote	500 folhas/caixa
10830	Sequencial H300 76cm x 76cm (30in. x 30in.)	48	30in. x 30in. (76cm x 76cm)	Azul médio	100 folhas/pacote	300 folhas/caixa
10836	Sequencial H300 91cm x 91cm (36in. x 36in.)	48	36in. x 36in. (91cm x 91cm)	Azul médio	100 folhas/pacote	300 folhas/caixa
10840	Sequencial H300 101cm x 101cm (40in. x 40in.)	48	40in. x 40in. (101cm x 101cm)	Azul médio	50 folhas/pacote	250 folhas/caixa
10845	Sequencial H300 114cm x 114cm (45in. x 45in.)	48	45in. x 45in. (114cm x 114cm)	Azul médio	50 folhas/pacote	100 folhas/caixa
10848	Sequencial H300 121cm x 121cm (48in. x 48in.)	48	48in. x 48in. (121cm x 121cm)	Azul médio	50 folhas/pacote	100 folhas/caixa

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

10854	Sequencial H300 137cm x 137cm (54in. x 54in.)	48	54in. x 54in. (137cm x 137cm)	Azul médio	50 folhas/pacote	100 folhas/caixa
34192	QUICK CHECK* H100 50cm x 50cm (20in. x 20in.)	72	20in. x 20in. (50cm x 50cm)	Azul claro e branco	240 folhas/pacote	480 folhas/caixa
34178	QUICK CHECK* H100 60cm x 60cm (24in. x 24in.)	72	24in. x 24in. (60cm x 60cm)	Azul claro e branco	120 folhas/pacote	240 folhas/caixa
34176	QUICK CHECK* H100 76cm x 76cm (30in. x 30in.)	72	30in. x 30in. (76cm x 76cm)	Azul claro e branco	48 folhas/pacote	144 folhas/caixa
34194	QUICK CHECK* H100 91cm x 91cm (36in. x 36in.)	72	36in. x 36in. (91cm x 91cm)	Azul claro e branco	48 folhas/pacote	144 folhas/caixa
34161	QUICK CHECK* H100 121cm x 121cm (48in. x 48in.)	72	48in. x 48in. (121cm x 121cm)	Azul claro e branco	24 folhas/pacote	120 folhas/caixa
34171	QUICK CHECK* H300 60cm x 60cm (24in. x 24in.)	96	24in. x 24in. (60cm x 60cm)	Azul médio e branco	120 folhas/pacote	240 folhas/caixa
34173	QUICK CHECK* H300 76cm x 76cm (30in. x 30in.)	96	30in. x 30in. (76cm x 76cm)	Azul médio e branco	48 folhas/pacote	144 folhas/caixa
34160	QUICK CHECK* H300 91cm x 91cm (36in. x 36in.)	96	36in. x 36in. (91cm x 91cm)	Azul médio e branco	48 folhas/pacote	144 folhas/caixa
34189	QUICK CHECK* H300 101cm x 101cm (40in. x 40in.)	96	40in. x 40in. (101cm x 101cm)	Azul médio e branco	24 folhas/pacote	96 folhas/caixa
34159	QUICK CHECK* H300 114cm x 114cm (45in. x 45in.)	96	45in. x 45in. (114cm x 114cm)	Azul médio e branco	24 folhas/pacote	48 folhas/caixa
34181	QUICK CHECK* H300 121cm x 121cm (48in. x 48in.)	96	48in. x 48in. (121cm x 121cm)	Azul médio e branco	24 folhas/pacote	96 folhas/caixa
34182	QUICK CHECK* H300 137cm x 137cm (54in. x 54in.)	96	54in. x 54in. (137cm x 137cm)	Azul médio e branco	24 folhas/pacote	48 folhas/caixa
14268	SMART-FOLD* H450 101cm x 119cm (40in. x 47in.)	41 e 63	40in. x 47in. (101cm x 119cm)	Azul médio e branco	12 folhas/pacote	48 folhas/caixa
14275	SMART-FOLD* H450 101cm x 139cm (40in. x 55in.)	41 e 63	40in. x 55in. (101cm x 139cm)	Azul médio e branco	12 folhas/pacote	48 folhas/caixa

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

14279	SMART-FOLD* H450 71cm x 116cm (28in. x 46in.)	41 e 63	28in. x 46in. (71cm x 116cm)	Azul médio e branco	12 folhas/pacote	72 folhas/pacote
14324	SMS SMART-FOLD* H450 55cm x 114cm (22in. x 45in.)	41 e 63	22in. x 45in. (55cm x 114cm)	Azul médio e branco	24 folhas/pacote	72 folhas/pacote
14313	SMART-FOLD* H450 121cm x 154cm (48in. x 61in.)	41 e 63	48in. x 61in. (121cm x 154cm)	Azul médio e branco	12 folhas/pacote	48 folhas/caixa
46972	QUICK CHECK INTERLEAVED* H200 60cm x 60cm (24in. x 24in.)	41	24in. x 24in. (60cm x 60cm)	Azul claro e branco	240 folhas/pacote	480 folhas/caixa
46973	QUICK CHECK INTERLEAVED* H200 76cm x 76cm (30in. x 30in.)	41	30in. x 30in. (76cm x 76cm)	Azul claro e branco	96 folhas/pacote	288 folhas/caixa
46974	QUICK CHECK INTERLEAVED* H200 91cm x 91cm (36in. x 36in.)	41	36in. x 36in. (91cm x 91cm)	Azul claro e branco	96 folhas/pacote	288 folhas/caixa
46989	QUICK CHECK INTERLEAVED* H200 101cm x 101cm (40in. x 40in.)	41	40in. x 40in. (101cm x 101cm)	Azul claro e branco	48 folhas/pacote	240 folhas/caixa
46985	QUICK CHECK INTERLEAVED* H200 121cm x 121cm (48in. x 48in.)	41	48in. x 48in. (121cm x 121cm)	Azul claro e branco	48 folhas/pacote	96 folhas/caixa
46991	QUICK CHECK INTERLEAVED* H200 137cm x 182cm (54in. x 72in)	41	54in. x 72in (137cm x 182cm)	Azul claro e branco	48 folhas/pacote	96 folhas/caixa
47005	QUICK CHECK INTERLEAVED* H200 137cm x 137cm (54in. x 54in.)	41	54in. x 54in. (137cm x 137cm)	Azul claro e branco	48 folhas/pacote	96 folhas/caixa
46978	QUICK CHECK INTERLEAVED* H300 91cm x 91cm (36in. x 36in.)	48	36in. x 36in. (91cm x 91cm)	Azul médio e branco	96 folhas/pacote	288 folhas/caixa
46979	QUICK CHECK INTERLEAVED* H300 101cm x 101cm (40in. x 40in.)	48	40in. x 40in. (101cm x 101cm)	Azul médio e branco	48 folhas/pacote	240 folhas/caixa
46982	QUICK CHECK INTERLEAVED* H300 121cm x 121cm (48in. x 48in.)	48	48in. x 48in. (121cm x 121cm)	Azul médio e branco	48 folhas/pacote	96 folhas/caixa
46984	QUICK CHECK INTERLEAVED* H300 137cm x 137cm (54in. x 54in.)	48	54in. x 54in. (137cm x 137cm)	Azul médio e branco	48 folhas/pacote	96 folhas/caixa
46995	QUICK CHECK INTERLEAVED* H400 101cm x 101cm (40in. x 40in.)	63	40in. x 40in. (101cm x 101cm)	Azul médio e branco	48 folhas/pacote	144 folhas/caixa

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

46996	QUICK CHECK INTERLEAVED* H400 121cm x 121cm (48in. x 48in.)	63	48in. x 48in. (121cm x 121cm)	Azul médio e branco	48 folhas/ pacote	48 folhas/ caixa
46994	QUICK CHECK INTERLEAVED* H500 91cm x 91cm (36in. x 36in.)	70	36in. x 36in. (91cm x 91cm)	Azul escuro e branco	72 folhas/ caixa	144 folhas/ caixa
46997	QUICK CHECK INTERLEAVED* H500 121cm x 121cm (48in. x 48in.)	70	48in. x 48in. (121cm x 121cm)	Azul escuro e branco	48 folhas/ pacote	48 folhas/ caixa
46998	QUICK CHECK INTERLEAVED* H500 137cm x 137cm (54in. x 54in.)	70	54in. x 54in. (137cm x 137cm)	Azul escuro e branco	48 folhas/ pacote	48 folhas/ caixa

Registro Anvisa: 81832580001


Reprocessamento Proibido.



Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária.

Fotos

Sequencial	QUICK CHECK*
	 

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

QUICK CHECK INTERLEAVED*	SMART-FOLD*
	

Conteúdo

Cada Sistema de Barreira Estéril é acondicionado e comercializado individualmente em embalagem primária de plástico. E então, acondicionado em embalagem secundária de papelão para transporte.

Descrição e Indicação

Os Sistemas de Barreira Estéril são compostos por tecidos de contenção de esterilização que são projetados para embalar bandejas de instrumentos médicos e outros itens cirúrgicos.

Devem ser usados para incluir outro dispositivo médico que deve ser esterilizado por um fornecedor de serviços de saúde usando vapor pré-vácuo, óxido de etileno 100%, Sistemas de Esterilização a Baixa Temperatura STERIS V-PRO, Vapor Gravítico, Sistemas de Esterilização Avançada STERRAD ou ESTERILUCENT Esterilizador de Peróxido de Hidrogênio PSD-85.

O invólucro destina-se a permitir a esterilização do (s) dispositivo (s) médico (s) fechado (s) e a manter a esterilidade do (s) dispositivo (s) fechado (s) até ser usado.

Instruções de Uso

O invólucro de esterilização HALYARD * deve ser usado de acordo com as recomendações de carregamento de preparação, invólucro e câmara de esterilização dos seguintes padrões:

- ANSI / AAMI ST79: Guia Abrangente de Esterilização a Vapor e Garantia de Esterilidade em Instalações de Assistência Médica

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	

- ANSI / AAMI ST41: Esterilização por Óxido de Etileno em Instalações de Saúde
- Normas da AORN, práticas recomendadas e diretrizes

Técnicas comuns de envolvimento com a família HALYARD * de invólucro de esterilização.

Modo de Uso:

- Coloque o (s) item (ns) no invólucro usando técnicas típicas de acondicionamento asséptico conforme ANSI / AAMI ST79: Guia Abrangente de Esterilização a Vapor e Garantia de Esterilidade em Instalações de Assistência Médica.
- Se estiver usando a técnica de agrupamento simultâneo, assegure-se de que a primeira dobra seja puxada o suficiente para cobrir todas as superfícies da embalagem para garantir a manutenção da esterilidade.
- Prenda a embalagem enrolada com fita indicadora de esterilização ou método de fechamento alternativo adequado para o método de esterilização a ser usado.
- O fechamento deve permitir que o esterilizante penetre na embalagem envolvida, evite a constrição da embalagem e mantenha a integridade da embalagem.

Composição

Tecido SMS: Polipropileno.

Não contém látex de borracha natural.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte


O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Não existem condições especiais de manipulação.

Advertências

- Não use o invólucro em métodos de esterilização por calor seco ou radiação.
- Não use o invólucro se forem detectados danos ou materiais estranhos antes do uso.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUSBE-H rev. 01

- Não use o conteúdo do envelope se o envelope estiver rasgado, molhado ou comprimido.
- Não use na presença de anestesia inflamável. O invólucro é não-condutor.

Precauções

Não aplicável.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América