

**Identificação do produto e Apresentação**

Nome Técnico: Suporte de posicionamento

Nome Comercial: Superfície suporte tipo colchão descartável de espuma com gel viscoelástico e tiras de fixação

Modelos:

Código	Comprimento cm	Largura cm	Altura Dorsal cm	Altura Perineal cm	Quantidade por Caixa
STP100 S	111,76	58,42	2,54	2,54	10
STP150 S	111,76	58,42	5,08	2,54	04
STP200 S	111,76	58,42	5,08	5,08	04

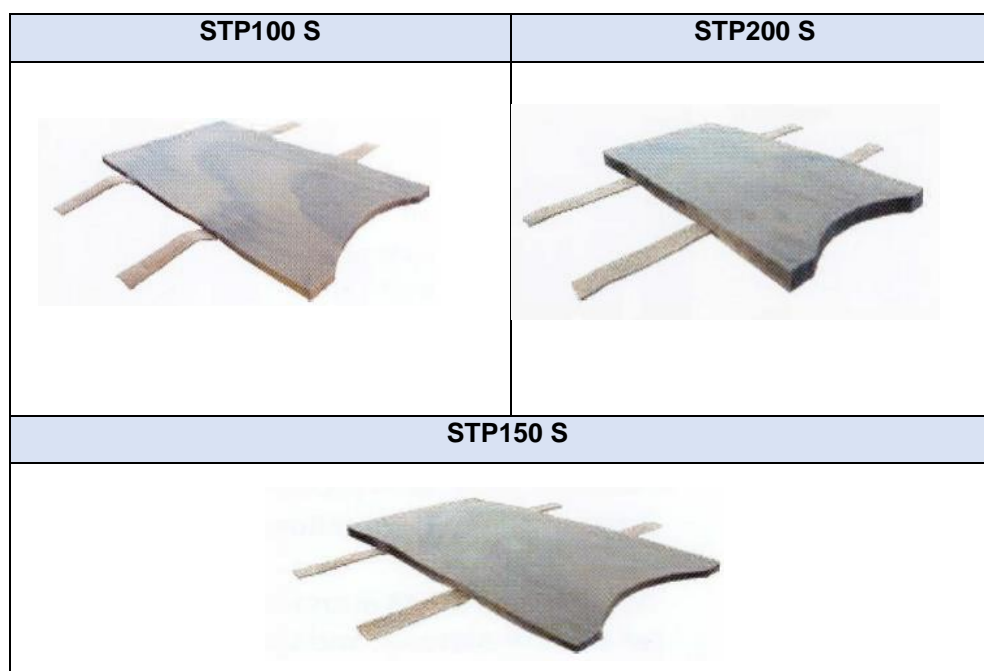
Nº do Cadastro na ANVISA: 81832580048

Proibido Reprocessar

Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem: Unitária.

Pronto uso

Fotos



Conteúdo

Cada código contém correias integradas que encaixam ao trilho da mesa de cirurgia.

É acondicionado e comercializado individualmente em embalagem plástica selada a vácuo.

Então, são acondicionados em caixa de papelão para transporte.

Indicação de Uso/Finalidade

As superfícies suportes tipo colchão descartável são indicadas para auxiliar em qualquer procedimento cirúrgico que requeira o posicionamento dos pacientes em posições de Trendelenburg, Trendelenburg Reverso ou Posicionamento Lateral. Sua finalidade é evitar lesões de pele por pressão, melhorar o conforto e evitar o deslocamento do paciente na mesa cirúrgica durante o procedimento cirúrgico. Este tipo de colchão distribui uniformemente o peso corporal do paciente ao longo da base da mesa cirúrgica e fornece suporte e estabilidade superiores quando comparados aos colchões convencionais.

Modo de Uso

1. Abra a embalagem e desenrole o colchão descartável (superfície suporte) sobre a mesa cirúrgica;
2. Coloque o colchão descartável diretamente sobre a mesa cirúrgica certificando-se de que não exista nenhum tipo de material como lençóis de tração/elevação ou outro tipo de roupa de cama entre o colchão e a mesa.
3. Ajuste o colchão descartável de modo que a borda cefálica fique uniforme com a borda cefálica da mesa de cirurgia. O recorte perineal também ajudará na orientação do posicionamento do colchão descartável sobre a mesa.
4. Posicione o paciente colocando-o em contato direto com o colchão descartável (superfície suporte),
5. Deslize as correias laterais integradas ao colchão para baixo entre o trilho e a mesa, traga-as de volta para cima e ao redor da parte externa do trilho e prenda a correia firmemente na mesa.
6. Após o término do procedimento o colchão deverá ser descartado.



Componentes e Composição

No caso de informações sigilosas, que não possam ser disponibilizadas no Portal da Anvisa, este campo deverá ser preenchido de modo resumido, e a descrição detalhada da composição deverá ser informada em anexo.

100% espuma de poliuretano com infusão de gel viscoelástico.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

O Posicionador deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição.

Advertências

Não aplicável

Precauções

Não aplicável

Detentor do Registro: CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA – CNPJ: 27.242.576/0001-11 – Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 - Ipiranga – SP – CEP: 05208-001– Tel: (11) 23054285 – Resp. Técnica: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN-SP: 039.294.

Fabricante Legal: Prime Medical, LCC - 1410 E Weisgarber - Knoxville - TN - Estados Unidos da América 37909



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IUSCDT-P

Instrução de USO RDC185/01

Rev. 00

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 e 337 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo -

SP - Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian. CRF-SP: 84.729