



Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Tubos

Nome Comercial: Tubo Descartável para Evacuação de Fumaça ou Aerossóis resistente a laser

Modelos:

| Código | Diâmetro Polegadas | Diâmetro cm | Comprimento Cm | Quantidade por Caixa |
|--------|--------------------|-------------|----------------|----------------------|
| SELW | 7/8 | 2,22 | 20 cm | 03 |

Nº do Cadastro na ANVISA: 81832580055

Proibido Reprocessar

Prazo de Validade: 03 anos

Embalagem: Unitária.

Não estéril

Foto



Conteúdo

Contém: 01 Tubo SETWS. É comercializado individualmente em embalagem de nylon. As embalagens são então acondicionadas em caixa de papelão (contendo 03 unidades) para transporte.



Indicação de Uso/Finalidade

O tubo SELW é indicado para ser utilizado nos equipamentos de evacuação de fumaça cirúrgica e contaminantes do ar (não objeto desse cadastro) que possuam conexão para encaixe de um tubo de 7/8 polegadas/ 2,22cm. Sua finalidade é conduzir o ar aspirado do ambiente até o equipamento.

Modo de Uso

1. Inspeccione a integridade da embalagem do tubo e certifique-se que a mesma encontra-se íntegra.
2. Utilize técnica asséptica para abertura da embalagem e ofereça o tubo de evacuação a algum integrante da equipe cirúrgica que esteja devidamente paramentado.
3. Solicite então a equipe cirúrgica que disponibilize uma das extremidades do tubo de evacuação para encaixe no equipamento de evacuação.
4. Seguindo as orientações e instruções de uso fornecidas pelo fabricante do equipamento de evacuação (não objeto deste cadastro) encaixe o tubo no local apropriado do equipamento.
5. Após o término do procedimento, o tubo deve ser descartado de acordo com o protocolo da Instituição.

Componentes e Composição

Acrílico e polietileno

Não contém látex

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta. Com temperatura entre -10°C e 60°C e umidade relativa entre 10 - 75%



Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta. Com temperatura entre -10°C e 60°C e umidade relativa entre 10 - 75%

Condições de Manipulação

Deve ser descartada de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição.

Advertências

- Proibido reprocessar.
- Não Utilizar se a embalagem estiver danificada.

Precauções

Não bloquear ou obstruir os tubos.

Detentor do Registro: CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA – CNPJ: 27.242.576/0001-11 – Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 - Ipiranga – SP – CEP: 05208-001– Tel: (11) 23054285 – Resp. Técnica: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN-SP: 039.294.

Fabricante: Bovie Medical Corporation - 5900 Genesee Street, Lancaster, New York - Estados Unidos da América – 14086

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares
Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP
Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br
Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo. CRF-SP: 74338