



Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Tubos

Nome Comercial: Tubo Descartável para Evacuação de Fumaça ou Aerossóis com Ponteira

Modelos:

Código	Diâmetro Polegadas	Diâmetro cm	Comprimento Cm	Ponteira/Ajuste	Quantidade por Caixa
SETWS	7/8	2,22	180 cm	X	24

Nº do Cadastro na ANVISA: 81832580054

Proibido Reprocessar

Prazo de Validade: 03 anos

Embalagem: Unitária.

Produto Esterilizado por Radiação Gama

Foto



Conteúdo

Contém: 01 Tubo SETWS. É comercializado envolto em uma fita Ty-band (papel kraft branqueado com revestimento coesivo a frio) e acondicionado



em uma embalagem de polietileno. As embalagens são então acondicionadas em caixa de papelão (contendo 24 unidades) para transporte.

Indicação de Uso/Finalidade

O tubo descartável é indicado para ser utilizado nos equipamentos de evacuação de contaminantes do ar com encaixe para tubo de 7/8 polegadas / 2,22cm (não objeto deste cadastro), que aspiram e filtram contaminantes como: fumaça ou aerossóis, produzidos em decorrência do uso de dispositivos térmicos ou ultrassônicos utilizados durante os procedimentos cirúrgicos. Sua finalidade é conduzir o ar aspirado do ambiente até o equipamento.

Modo de Uso

1. Inspeccione a integridade da embalagem do tubo de evacuação e certifique-se que a mesma encontra-se íntegra.
2. Utilize técnica asséptica para abertura da embalagem e ofereça o tubo de evacuação a algum integrante da equipe cirúrgica que esteja devidamente paramentado.
3. Solicite então a equipe cirúrgica que disponibilize a extremidade do tubo de evacuação para que encaixe no equipamento de evacuação.
4. Seguindo as orientações e instruções de uso fornecidas pelo fabricante do evacuador (não objeto desta notificação) encaixe o tubo de evacuação no local apropriado do equipamento.
5. Após o término do procedimento, o tubo de evacuação deve ser descartado de acordo com o protocolo da Instituição.

Componentes e Composição

Etil Vinil Acetato e Polietileno.

Não contém látex.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta. Com temperatura entre -10°C e 60°C e umidade relativa entre 10 - 75%



Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta. Com temperatura entre -10°C e 60°C e umidade relativa entre 10 - 75%

Condições de Manipulação

Deve ser descartada de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição.

Advertências

- Proibido reprocessar.
- Os tubos não devem entrar em contato direto com o tecido do paciente.
- Não Utilizar se a embalagem estiver danificada.

Precauções

Não bloquear ou obstruir os tubos.

Detentor do Registro: CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA – CNPJ: 27.242.576/0001-11 – Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 - Ipiranga – SP – CEP: 05208-001– Tel: (11) 23054285 – Resp. Técnica: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN-SP: 039.294.

Fabricante: Bovie Medical Corporation - 5900 Genesee Street, Lancaster, New York - Estados Unidos da América – 14086

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares
Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP
Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br
Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo. CRF-SP: 74338



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IUSETWS-B

Instrução de USO RDC185/01

Rev. 00