



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IUTEF-B

Instrução de USO RDC185/01

Rev. 00

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Tubos

Nome Comercial: Tubo Descartável para Evacuação de Fumaça Cirúrgica ou Aerosóis

Modelos:

Código	Diâmetro Polegadas	Diâmetro cm	Comprimento Cm	Quantidade por Caixa
786TS	7/8	2,22	180 cm	24

Nº do Cadastro na ANVISA: 81832580049

Proibido Reprocessar

Prazo de Validade: 03 anos

Embalagem: Unitária.

Produto Esterilizado por Radiação Gama

Foto



Conteúdo

Contém: 01 Tubo 786TS é comercializado individualmente envolto em uma fita Ty-band (papel kraft branqueado com revestimento coesivo a frio) e acondicionado em uma embalagem de polietileno. As embalagens



individualizadas, são então acondicionados em caixa de papelão (contendo 24 unidades) para transporte.

Indicação de Uso/Finalidade

O tubo 786TS é indicado para ser utilizado nos equipamentos de evacuação de fumaça cirúrgica e contaminantes do ar (não objeto desse cadastro) que possuam conexão para encaixe de um tubo de 7/8 polegadas/ 2,22cm. Sua finalidade é conduzir o ar aspirado do ambiente até o equipamento.

Modo de Uso

1. Inspeção a integridade da embalagem do tubo e certifique-se que a mesma encontra-se íntegra.
2. Utilize técnica asséptica para abertura da embalagem e ofereça o tubo de evacuação a algum integrante da equipe cirúrgica que esteja devidamente paramentado.
3. Solicite então a equipe cirúrgica que disponibilize uma das extremidades do tubo de evacuação para encaixe no equipamento de evacuação.
4. Seguindo as orientações e instruções de uso fornecidas pelo fabricante do equipamento de evacuação (não objeto deste cadastro) encaixe o tubo no local apropriado do equipamento.
5. Após o término do procedimento, o tubo deve ser descartado de acordo com o protocolo da Instituição.

Componentes e Composição

Etil Vinil Acetato e Policarbonato

Não contém látex

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Com temperatura entre -10°C e 60°C e umidade relativa entre 10 - 75%



Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta. Com temperatura entre -10°C e 60°C e umidade relativa entre 10 - 75%

Condições de Manipulação

Deve ser descartada de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição.

Advertências

- Proibido reprocessar.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

Precauções

Não bloquear ou obstruir os tubos.

Detentor do Registro: CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 27.242.576/0001-11 - Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 - Ipiranga - SP - CEP: 05208-001- Tel: (11) 23054285 - Resp. Técnica: Maria Angélica Rodrigues Pereira - COREN-SP: 039.294.

Fabricante: Bovie Medical Corporation - 5900 Genesee Street, Lancaster, New York - Estados Unidos da America - 14086

Distribuidor: CNPH - Comercial Nacional de Produtos Hospitalares
Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 - Cambuci - São Paulo - SP - CEP: 01539-010 - CNPJ: 00.142.576/0001-86
Tel: 011-3385-9339 - sac@cnph.com.br
Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian - CRF-SP: 84.729