



Instrução de USO RDC185/01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Tubos

Nome Comercial: Tubo de Suprimento de Oxigênio

Modelos

1112, 1115, 1118, 1119, 1120, 1124, 1127, 1925, 1927, 1928, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 9000, 9001

Nº do Cadastro na ANVISA: 10342600048

Proibido reprocessar


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem: Unitária.


Pronto uso

Não estéril.

Fotos

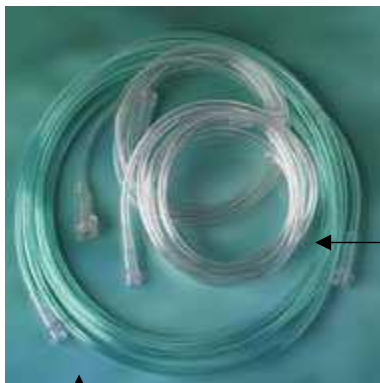

Tubo de suprimento
incolor

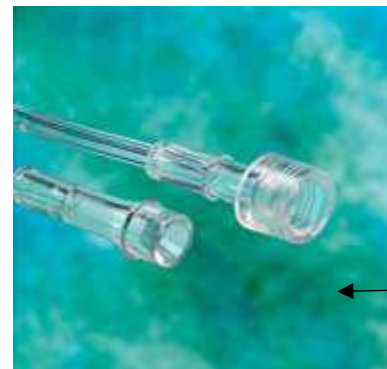

Conector
Universal

Tubo de suprimento verde
Conector Padrão



Desenho esquemático do Tubo Star Lúmen



Adaptador Nipple (2555)



Instrução de USO RDC185/01

Indicação de Uso/Finalidade

O Tubo de Suprimento de Oxigênio é um tubo de PVC de diâmetro pequeno que liga a fonte de fornecimento de gás à interface do paciente. Sendo que a interface pode ser um cateter nasal, uma máscara para aerosolterapia, uma máscara de inaloterapia ou um ressuscitador manual.

Internamente o Tubo Star Lúmen é canelado o que o torna mais resistente à dobra ou oclusão.

Modo de Uso

- Conectar o tubo de suprimento de oxigênio à fonte de gás (fluxômetro);
- Conectar o tubo de suprimento de oxigênio à interface do paciente;
- Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras.
- Colocar a interface no paciente;
- Ajustar o fluxo no fluxômetro de acordo com indicação clínica.

Obs: Enquanto o tubo com conector Padrão necessita de um adaptador tipo Nipple (código 2555 - cadastro ANVISA 10342609002) para ser conectado ao fluxômetro, o tubo com conector Universal conecta-se diretamente.

Componentes e Composição

- Conector Universal: PVC
- Conector do tubo de suprimento: PVC
- Tubo de suprimento: PVC
- Produto sem látex

Condições de Armazenamento

Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

Condições para o Transporte

Transportar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

Condições de Manipulação

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	IUTSH-T rev.02
	Instrução de USO RDC185/01	

N/A

Advertências

- Os produtos foram concebidos para uso único, não devendo, por isso, ser limpos ou reutilizados.

Precauções

- Certifique-se que todas as conexões estejam seguras.

Importador/Distribuidor: *CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares*

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Teleflex Medical; 2917 Week Drive, Research Triangle Park, NC 27709 – EUA.